

## Installeren en instellen Connect software

### 1 Inleiding

De Vitalograph Connect software koppelt de Vitalograph Spirometer met Medicom middels de Medicom Meetapparatuur Interface (MMI).

In deze handleiding wordt beschreven hoe de Vitalograph Connect software te installeren op de PC en hoe de Connect Software en Spirotrac in te stellen.

### 2 Inleiding

Met de MMI kunnen de onderzoeksgegevens in Medicom worden opgeslagen. De onderzoeksgegevens, bestaande uit meetwaarden, worden automatisch in het diagnostisch dossier (F6) en bij aanvullend onderzoek (F2) verwerkt. Indien u dat zo heeft ingesteld, worden er ook journaalregels met een toelichting bij de uitslag van het onderzoek aangemaakt.


Het voordeel van het gebruik van de MMI is dat meetresultaten automatisch worden verwerkt in Medicom. De meetresultaten zijn daardoor direct inzichtelijk in het dossier van de onderzochte patiënt.

### 3 Randvoorwaarden


PT Medical ondersteunt alleen de instellingen binnen de Spirotrac en Connect software.

## 4 Downloaden Connect Software

Ga naar het beginscherm in Spirotrac en klik op "OVER"

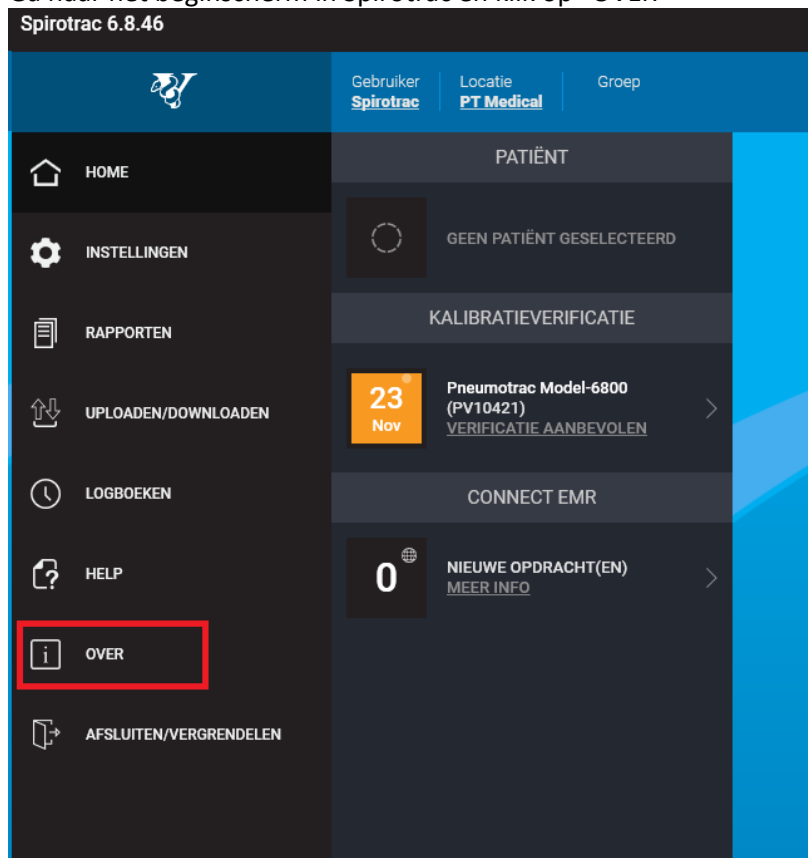


## 5 Klik op "CONTROLLEREN OP CONNECT UPDATES"

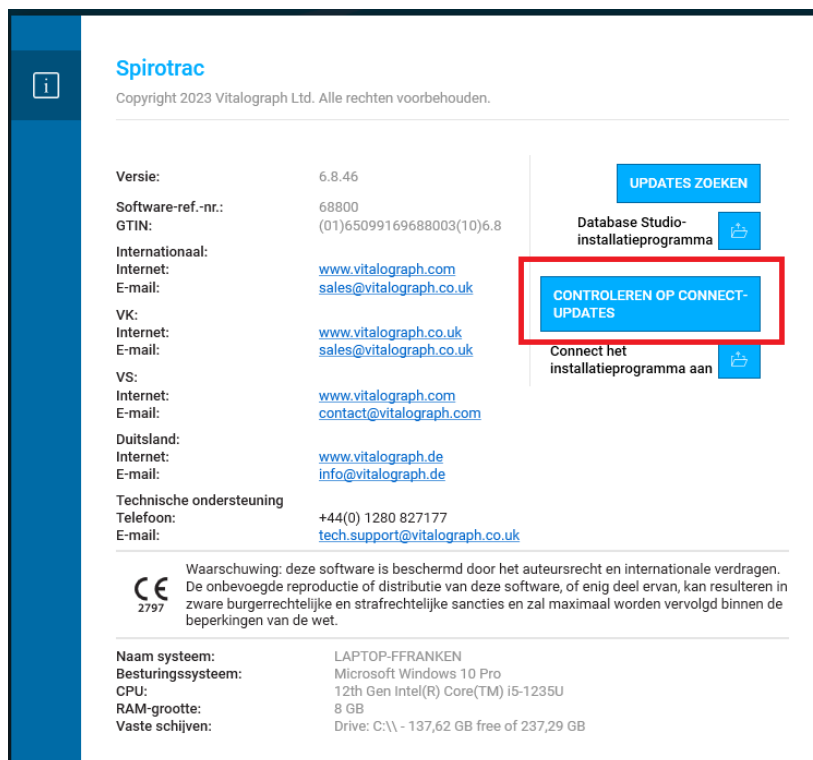


6

Indien er **geen Update beschikbaar** is, zie onderstaande melding, ga dan door naar punt 12, Anders ga door naar punt 7

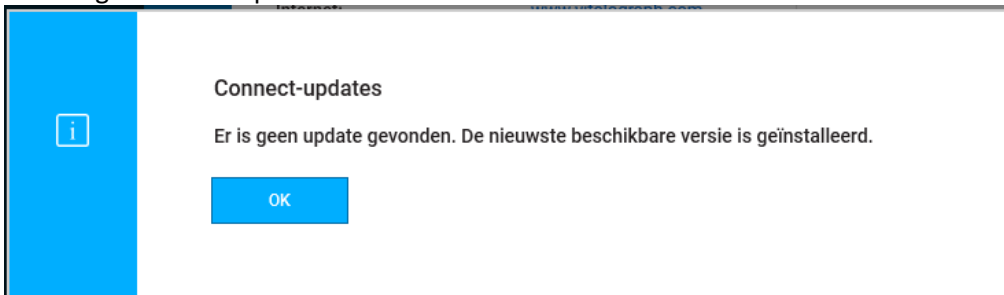


7

Klik op OK

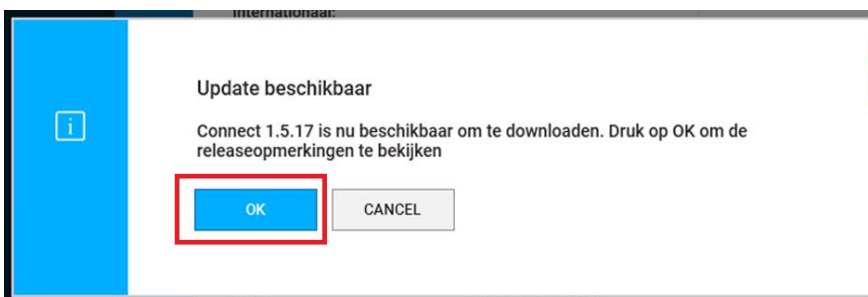


8

Klik op "UPDATES DOWNLOADEN"

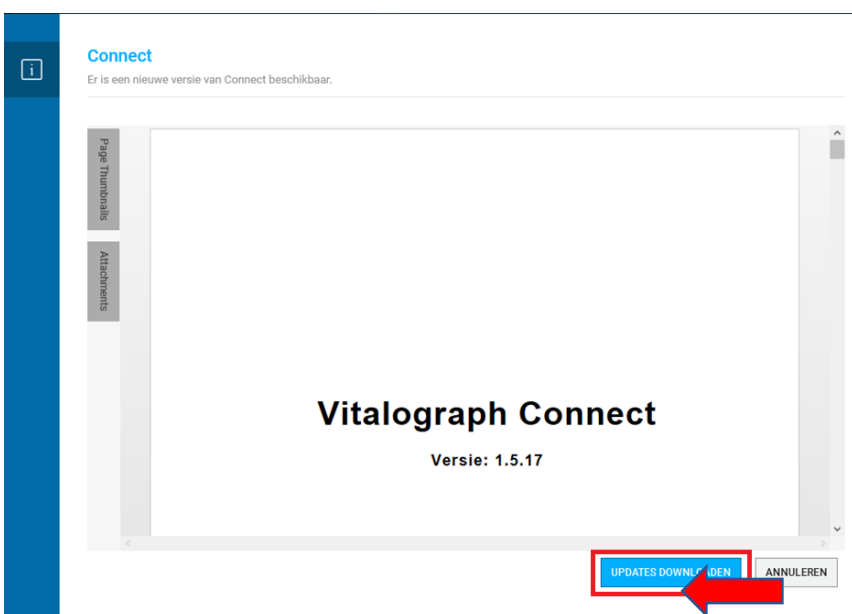


9


Klik op "OK"

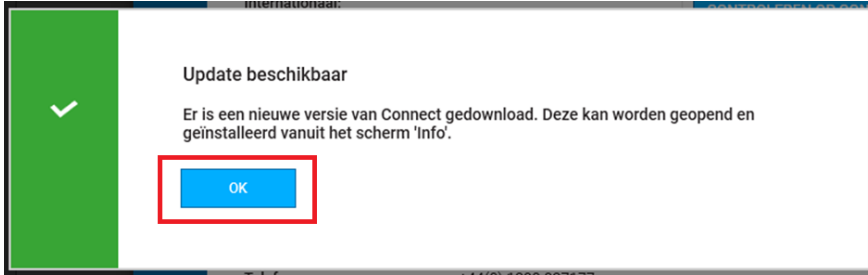

- 10 Klik met de **rechtermuisknop** op “Connect 1.5.17”  
En klik op “Als administrator uitvoeren”

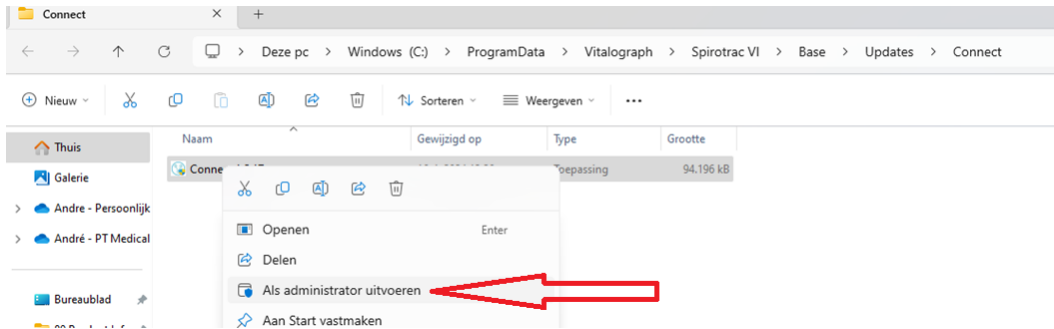


- 11 In het venster wat opent klik op “Finisch”

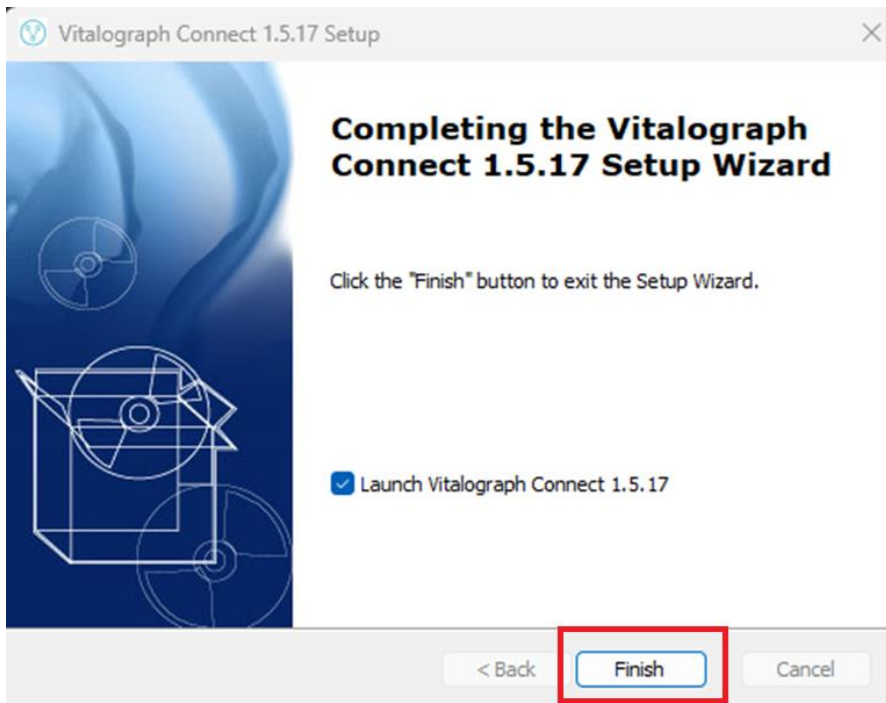


## 12 Instellen Vitalograph Connect:

Let op! Zonder het instellen van de Connect kan Spirotrac hier geen gebruik van maken en Medicom ook niet. Er is dan geen communicatie tussen Vitalograph Connect en Medicom.

## 13 Voeg een nieuwe EMR toe in Connect door op het + te klikken

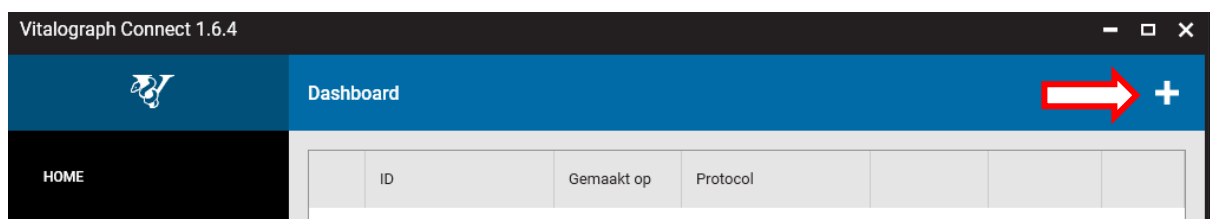

## 14 Vul bij ID Medicom in en bij Protocol kies voor HL7 2.6 en klik op "TOEVOEGEN"



### EMR-systeem toevoegen

---

ID

Protocol

Inkomende overplaatsing


Uitgaande overplaatsing


Inkomende gegevens

Uitgaande gegevens

**15** Klik op de driepuntjes, zie onderstaande afbeelding

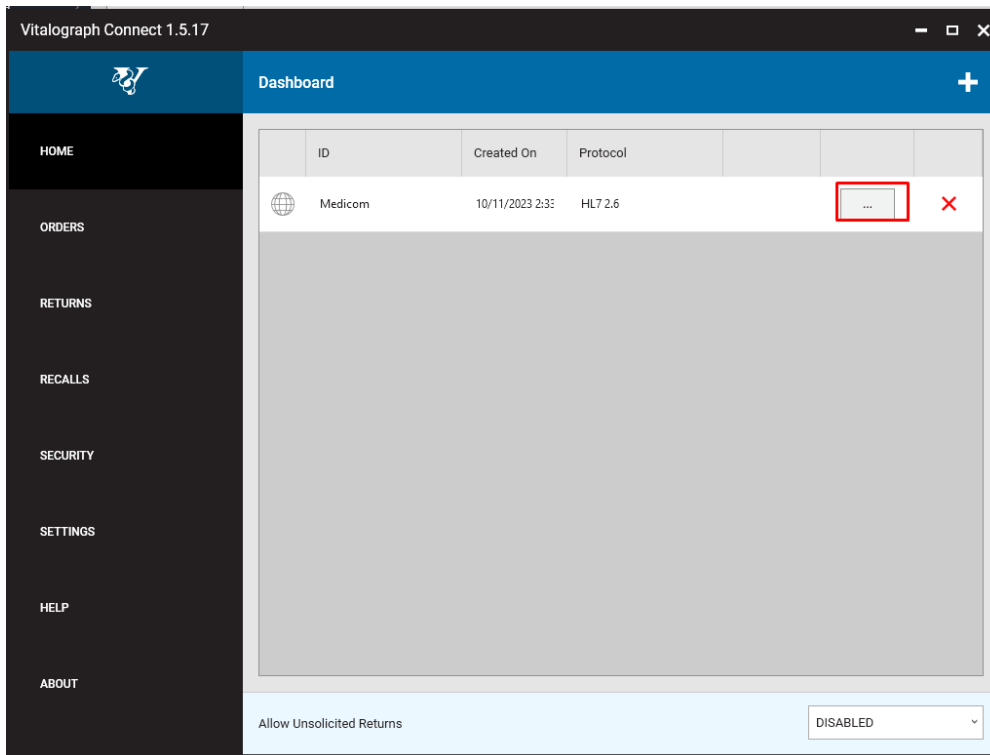

**16** Klik vervolgens op **ALGEMENE INSTELLINGEN** en kies bij de **Decimaal teken** voor **Decimaalpunt**.

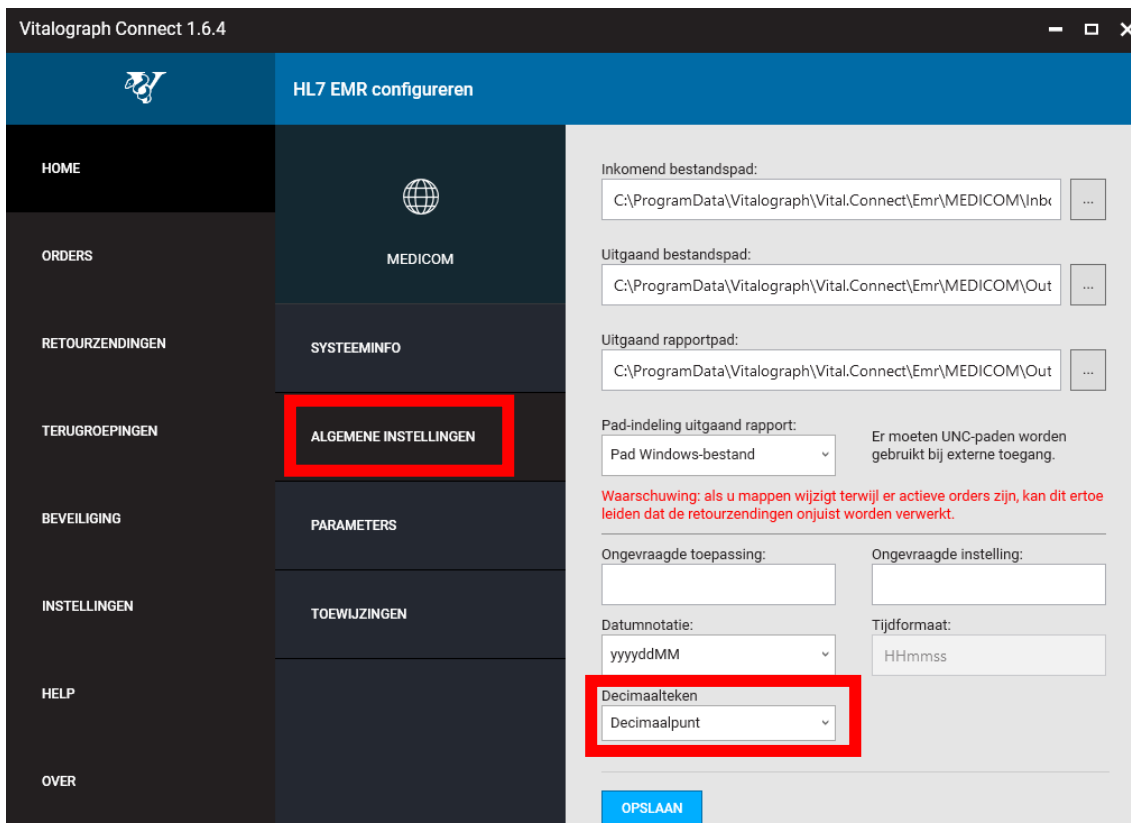

## Instellen SPIROTRAC

17

Niet afgeronde onderzoeken in Spirotrac worden automatisch geannuleerd wanneer de software afgesloten wordt.

Ga naar INSTELLINGEN -> CONNECT ->

- Zet het schuifje “Ingeschakeld” aan.
- Zet het schuifje “Orders automatisch verwerken” uit.

Spirotrac 6.9.30

INSTELLINGEN

HOME

INSTELLINGEN

RAPPORTEN

UPLOADEN/DOWNLOADEN

LOGBOEKEN

HELP

OVER

AFSLUITEN/VERGRENDELLEN

PATIËNT

TESTEN

BEVEILIGING

ETNICITEIT

GROEPEN

MEDICIJNEN

CONNECT

DATABASE

TAAL

URL  
http://localhost:80/connect/

Ingeschakeld

Verbinding testen

Orders automatisch verwerken