

Koppeling Medicom

 **Vitalograph**[®]



pharmapartners
medicom

Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep:
Eltensestraat 7 pat= Huisarts: EIKEL Apotheek: BL NONI
6922 JA Duiwen wwb= Betaler: P 4208120 lvandegraats@huisartsenduiven.nl

RIVM opt-in: Geen antwoord
LSP opt-in: Geen antwoord
LSP: Niet aangemeld



- Acties
- Overzichten** 1

- Journal
- Voorgeschiedenis
- Medicatiestatus
- Medicatiehistorie
- Protocollen overzicht
- Diagnostisch dossier
- Laboratorium aanvragen
- Aanvullend onderzoek** 2
- Documentbeheer
- Kennisregels
- Oproepen
- LSP medicatiehistorie
- Patiënt actielijst
- Patiëntprofiel
- Patiënt eConsults

Aanvullend onderzoek

Datum	Code	Omschrijving	Lab.	Afname	Indicatie	Info	ID	Compleet?	MGN
13-09-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			12		Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			7		Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			7		Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			7		Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN
29-10-2021	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			7		Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN

Aanvullend onderzoek

Datum: 16-05-2024

Definitie: **Vitalograph Spirometer** 3

Omschrijving: Vitalograph Spirometer







Afnamelocatie: Praktijk

Indicatie:

Info:

OK 4 Annuleren

Gebruiker **Spirotrac** Locatie **Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman** Groep

Patient      

HOME **INSTELLINGEN** **RAPPORTEN** **UPLOADEN/DOWNLOADEN** **LOGBOEKEN** **HELP** **OVER** **AFSLUITEN/VERGRENDELEN**

PATIËNT

GEEN PATIËNT GESELECTEERD

KALIBRATIEVERIFICATIE

16 May **Pneumotrac Model-6800 (PV16394) DOORSTAAN** [MEER INFO](#)

CONNECT EMR

1 **NIEUWE OPDRACHT(EN)** [MEER INFO](#) **1**

EMR verbinden

Adres: <http://localhost:80/connect/>

Opdrachten:

Spirometrie/ademhalingspiertesten 16-05-2024 11:02

4208120
Bloem L van Test
Ref. 20240516110225
APP: Medicom

TEST STARTEN **2**

PATIËNT VOEGEN

LICENTIE

Gebruiker **Spirotrac**

Locatie **Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman**

Groep

Patiënt **4208120**
L van Test, Bloem

HOME

INSTELLINGEN

RAPPORTEN

UPLOADEN/DOWNLOADEN

LOGBOEKEN

HELP

OVER

AFSLUITEN/VERGRENDELEN

LICENTIE

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16 May
Pneumotrac Model-6800 (PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EM

0 [🌐]
NIEUWE OPDRACHTEN
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

TEST STARTEN

Bezoek	Beoordelingen
--------	---------------

1 [🌐] EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER

Let op

Een etniciteit kan niet automatisch worden bepaald. Dit is vereist voor voorspelde waarden en interpretaties.

PATIËNT BEWERKEN OK



Patiënt bewerken

Groep

(Geen)



Persoons-ID

4208120

Voornaam:

Bloem

Achternaam:

L van Test

Geboortedatum:

01-jan-2010



Leeftijd:

14,37



1 - 150

Lengte:

173,0

cm

Geboortegeslacht:



Gewicht:

68,0

kg

BMI:

22,7

Etniciteit:



Rookinformatie:



Sigaretten per dag:

Jaren gerookt:

Pakjaren:

-

Geboortegeslacht en Etniciteit invullen!

Deze wijzigingen toepassen op eerdere beoordelingen

OPSLAAN

ANNULEREN

Gebruiker
SpirotracLocatie
**Huisartsenpraktijk Eikelaar en
Bosman**

Groep

Patiënt
4208120
L van Test, Bloem

- HOME
- INSTELLINGEN
- RAPPORTEN
- UPLOADEN/DOWNLOADEN
- LOGBOEKEN
- HELP
- OVER
- AFSLUITEN/VERGRENDELEN

PATIËNT

**4208120**
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16
MayPneumotrac Model-6800
(PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EMR

0**NIEUWE OPDRACHT(EN)**
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

Bezoek

Beoordelingen



Test starten



Base-FVC (FVC-sessie)

[Doorgaan met testen](#)

ECG (ECG-opname)



SELECTEER EEN ANDER APPARAAT

GEEN BEZOEKEN



LICENTIE

1

EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER





- HOME
- INSTELLINGEN
- RAPPORTEN
- UPLOADEN/DOWNLOADEN
- LOGBOEKEN
- HELP
- OVER
- AFSLUITEN/VERGRENDELEN

● Goede sessie

Herhaalbaarheid: FVC: 0,12 L (3,20 %) FEV1: 0,01 L (0,33 %)

PARAMETERS KWALITEIT ANALYSE + NIEUWE TEST

	Test 1 11:05:39	Test 2 11:09:29	Test 3 11:13:12	Test 4	LLN	Z-score	Voorsp	Beste	% Voorsp
FVC L	3,75	3,63	3,51		3,29	-0,68	4,08	3,75	91,91
FEV1 L	3,01	3,00	2,96		2,90	-1,39	3,60	3,01	83,61
FEV1/FVC	0,80	0,83	0,84		0,78	-1,37	0,89	0,80	-
PEF L/s	6,46	6,24	6,33		5,21	-0,69	7,14	6,33	88,66
FIVC L	3,45	3,52	3,50		3,29	-1,16	4,08	3,52	86,27

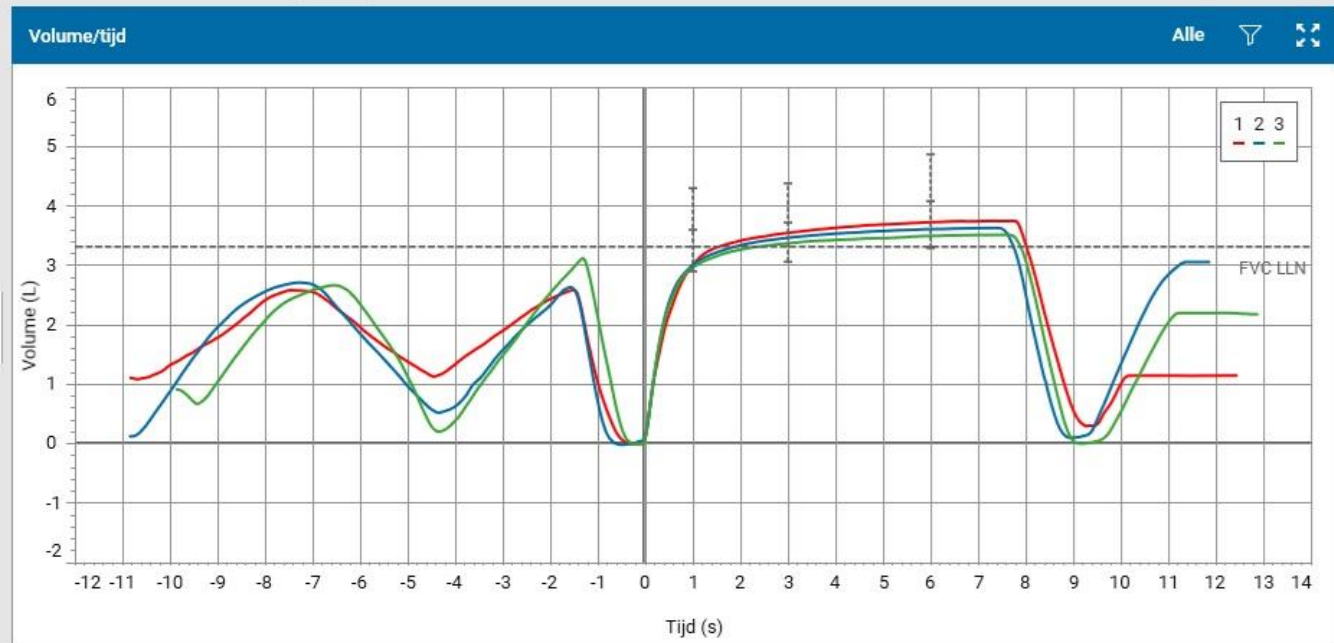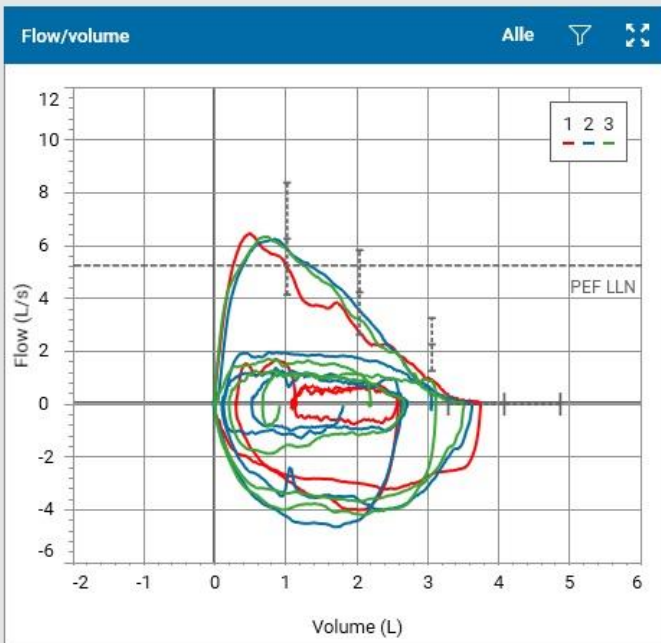

Gebruiker **Spirotrac** Locatie **Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman** Groep

Patiënt **4208120** L van Test, Bloem

HOME

INSTELLINGEN

RAPPORTEN

UPLOADEN/DOWNLOADEN

LOGBOEKEN

HELP

OVER

AFSLUITEN/VERGRENDELEN

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16
May
Pneumotrac Model-6800 (PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EMR

0
NIEUWE OPDRACHT(EN)
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen	11:05:39 Base-FVC

Test starten

- Base-FVC (FVC-sessie)
- Post-FVC (FVC-sessie)**
- ECG (ECG-opname)

SELECTEER EEN ANDER APPARAAT

Doorgaan met testen

11:05:39
Base-FVC


1 EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER

Eventueel POST-test verrichten.

Gebruiker
SpirotracLocatie
Huisartsenpraktijk Eikelaar en
Bosman

Groep

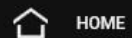Patiënt
4208120
L van Test, Bloem

HOME



INSTELLINGEN



RAPPORTEN



UPLOADEN/DOWNLOADEN



LOGBOEKEN



HELP



OVER



AFSLUITEN/VERGRENDELEN



LICENTIE

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16
MayPneumotrac Model-6800
(PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EMR

0

NIEUWE OPDRACHT(EN)
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

TEST STARTEN

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen 	11:05:39 Base-FVC

1

EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER

Gebruiker **Spirotrac** Locatie **Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman** Groep

Patiënt **4208120**
L van Test, Bloem

HOME

INSTELLINGEN

RAPPORTEN

UPLOADEN/DOWNLOADEN

LOGBOEKEN

HELP

OVER

AFSLUITEN/VERGRENDELEN

LICENTIE

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16 May
Pneumotrac Model-6800 (PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)


CONNECT EMR

0 **NIEUWE OPDRACHT(EN)**
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen	11:05:39 Base-FVC

Beoordelingen retourneren

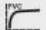Testvolgorde	Beoordeling	Label	Datum	
Spirometrie/ ademhalingsspiertes ten Besteld op 16-05-2024 11:02 Besteld door - Referentie 20240516110225 Toepassing Medicom	 FVC-sessie	Base-FVC	16-05-2024 11:05:39	<input checked="" type="checkbox"/>

< 1 / 1 >

TERUG NEGEREN

Klik op "TERUG"

TEST STARTEN

1 **EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN**

RETOURORDER

Gebruiker
SpirotracLocatie
Huisartsenpraktijk Eikelaar en
Bosman

Groep

Patiënt
4208120
L van Test, Bloem

HOME



INSTELLINGEN



RAPPORTEN



UPLOADEN/DOWNLOADEN



LOGBOEKEN



HELP



OVER



AFSLUITEN/VERGRENDELEN



LICENTIE

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16

May

Pneumotrac Model-6800
(PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EMR

0

NIEUWE OPDRACHT(EN)
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

TEST STARTEN

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen	11:05:39 Base-FVC



Beoordelingen retourneren



Wacht tot de retour volledig is voltooid

1

EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER

Gebruiker
SpirotracLocatie
Huisartsenpraktijk Eikelaar en
Bosman

Groep

Patiënt
4208120
L van Test, Bloem

HOME



INSTELLINGEN



RAPPORTEN



UPLOADEN/DOWNLOADEN



LOGBOEKEN



HELP



OVER



AFSLUITEN/VERGRENDELEN

PATIËNT

4208120
L van Test, Bloem
[PROFIEL BEKIJKEN](#)

KALIBRATIEVERIFICATIE

16

May

Pneumotrac Model-6800
(PV16394)
DOORSTAAN
[MEER INFO](#)

CONNECT EMR

0

NIEUWE OPDRACHT(EN)
[MEER INFO](#)

Bezoeken en beoordelingen

TEST STARTEN

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen	11:05:39 Base-FVC



Weet u zeker dat u Spirotrac wilt afsluiten?

JA

NEE



LICENTIE

0

EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN

RETOURORDER



Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep:
 Eiltensestraat 7 pat= Huisarts: EIKEL Apotheek: BL NONI
 6922 JA Duiwen wwb= Betaler: P 4208120 vandecraats@huisartsenduiven.nl

De resultaten voor de meting van Bloem van Test zijn verwerkt in het dossier.
 LSP opt-in: Geen antwoord
 LSP: Niet aangemeld

- Acties
- (Deel)contact aanmaken
 - Episode aanvullen
 - Nieuw voorschrift
 - Voorschrift via formularium
 - Voorschrift via doseeradvies
 - Uitslag invoeren
 - Bloeddruk invoeren
 - Protocol aanmaken
 - Naar VIPLive
 - Naar KSYOS
 - Naar ZorgDomein
 - Verwijsbrief maken
 - MGN bericht versturen
 - Naar Thuisarts.nl
 - Externe toepassing openen
 - Zorgplein openen
 - Etiket afdrukken
- Overzichten
- Patient
 - Administratie
 - Diversen
 - Identificatie

Journaal
 Aanvullend onderzoek
 Diagnostisch dossier
 Laboratorium bericht
 Documentbeheer
 Huidig contact

Deelcontact

Deelcontact	Episode	Privacy
1 Spirometrie	Kies een episode...	

Journaalregels

Filteren op: Geen

D	Datum*	SOEP*	ICPC	Kenmerk	Code*
1	16-05-2024	O			X

Voortgang

Verwerken bestand 1 van 1.

Dit kan enkele seconden duren!



Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010
Eltensestraat 7 pat=
6922 JA Duiwen wwb=

- Acties
- (Deel)contact aanmaken
 - Episode aanvullen
 - Nieuw voorschrift
 - Voorschrift via formularium
 - Voorschrift via doseeradvies
 - Uitslag invoeren
 - Bloeddruk invoeren
 - Protocol aanmaken
 - Naar VIPLive
 - Naar KSYOS
 - Naar ZorgDomein
 - Verwijsbrief maken
 - MGN bericht versturen
 - Naar Thuisarts.nl
 - Externe toepassing openen
 - Zorgplein openen
 - Etiket afdrukken

- Overzichten
- Patient
- Administratie
- Diversen
- Identificatie

Import verwerken

1 van 1

Longfunctierapport
Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman
Eltensestraat 7, 6922 JA Duiwen

Algemeen Base-FVC
Patient: 4208120
Bloem L van Test

GROEP:	LOCATIE: Huisartsenpraktijk Eikelaar en Bosman	UITGEVOERD: 16-05-2024 11:05:39 Spirotrac (Systeembebruiker)			
Geboortegeslacht	Vrouwelijk	BMI	22,7	Aanvaardbaarheid	Gedeele sessie
Leeftijd	14,37	Roken	-	Apparaatnaam	Pneumotrac Model-6800
Geboortedatum	01-01-2010	Pakjaren	-	Seriële apparaat	PV16394
Bevolking	Kaukasisch	Voorspelde set	GLI Kaukasisch	Kalibratie	16-05-2024 10:46:00
Gewicht	68,9kg; 149,9lb	Correctiefactor	100 %	Temperatuur	24,8°C
Lengte	173,0cm; 68,1in	Aantal tests	3		

Parameter	Beste	LLN	Z-score	Voorsp.	% Voorsp.
FVC (L)	3,75	3,29	-0,68	4,08	91,91%
FEV1 (L)	3,01	2,90	-1,39	3,60	83,61%
FEV1/FVC	0,80	0,78	-1,37	0,89	-
PEF (L/s)	6,33	5,21	-0,69	7,14	88,66%
PFVC (L)	3,52	3,29	-1,16	4,08	86,27%

Sessiekwaliteit en herhaalbaarheid		FVC-beoordeling		FEV1-beoordeling		Langzaam begin		Hoesten in 1e sec		FEV1 afgekeurd		Geen flowplateau		FVC-FVC		EOFE onaanvaardbaar		FVC afgekeurd	
FVC-berh.:	0,12L (3,20%)	FEV1-berh.:	0,01L (0,33%)	FVC-beoordeling	A	FEV1-beoordeling	A	Langzaam begin	0 uitademing (en)	Hoesten in 1e sec	0 uitademing (en)	FEV1 afgekeurd	0 uitademing (en)	FVC-FVC	0 uitademing (en)	EOFE onaanvaardbaar	0 uitademing (en)	FVC afgekeurd	0 uitademing (en)

Interpretaties
Gebruiker: -
GOLD ATS/ERS: Interpretaties van de computer zijn niet betrouwbaar voor het stellen van een diagnose. Normale spirometrie.
Geschatte longleeftijd: -
Opmerkingen over sessie: -
Opmerkingen sessie: -

SOFTWARE: 6800 6.9.35 HANDTEKENING: DATUM: PAGINA 1 / 1
AFGEDRUKT: 16-05-2024 11:19

Patiënt uit bericht
Naam: L van Test V
Geb.dat: 01-01-2010
BSN:
Adres: Eltensestraat 7
6922 JA Duiwen

Specialisme
FUN | functie-onderzoek

Datum
16-05-2024

Journaalregel
Van: Spirometrie, geblazen onder eigen medicatie

Samenvatting

Episode
16-05-2024 | copd

Koppel het bericht hier aan een bestaande episode.

Privacy

Naar journaal

Verwerken Annuleren

Privacy

ren op: Geen

PC	Kenmerk	Code*
X		



Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep:
Eltensestraat 7 pat= Huisarts: EIKEL Apotheek: BL NONI
6922 JA Duiwen wwb= Betaler: P 4208120 I Vandecraats@huisartsenduiven.nl

RIVM opt-in: Geen antwoord
LSP opt-in: Geen antwoord
LSP: Niet aangemeld



Acties

- (Deel)contact aanmaken
- Episode aanvullen
- Nieuw voorschrift
- Voorschrift via formularium
- Voorschrift via doseeradvies
- Uitslag invoeren
- Bloeddruk invoeren
- Protocol aanmaken
- Naar VIPLive
- Naar KSYOS
- Naar ZorgDomein
- Verwijsbrief maken
- MGn bericht versturen
- Naar Thuisarts.nl
- Externe toepassing openen
- Zorgplein openen
- Etiket afdrukken

Overzichten

- Patient
- Administratie
- Diversen
- Identificatie

Journal | Aanvullend onderzoek | **Huidig contact**

Deelcontact

Deelcontact	Episode	Privacy
1 Spirometrie (uitslag onvolledig)	Kies een episode...	

Journaalregels

OK + Nieuwe regel OK + Nieuw deelcontact Verwijderen

Filteren op: Geen

D	Datum*	SOEP*	Omschrijving	ICPC	Kenmerk	Code*
1	16-05-2024	O	Spirometrie (uitslag onvolledig)			

Uitslag onvolledig (alleen PRE-test)

Opslaan Annuleren



Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep:
 Eiltensestraat 7 pat= Huisarts: EIKEL Apotheek: BL NONI
 6922 JA Duiwen wwb= Betaler: P 4208120 |vandecraats@huisartsduiven.nl

RIVM opt-in: **Geen antwoord**
 LSP opt-in: **Geen antwoord**
 LSP: **Niet aangemeld**



- Acties
- (Deel)contact aanmaken
 - Episode aanvullen
 - Nieuw voorschrift
 - Voorschrift via formularium
 - Voorschrift via doseeradvies
 - Uitslag invoeren
 - Bloeddruk invoeren
 - Protocol aanmaken
 - Naar VIPLive
 - Naar KSYOS
 - Naar ZorgDomein
 - Verwijsbrief maken
 - MGN bericht versturen
 - Naar Thuisarts.nl
 - Externe toepassing openen
 - Zorgplein openen
 - Etiket afdrukken

Journaal Aanvullend onderzoek **Huidig contact**

Deelcontact

Deelcontact	Episode	Privacy
1 Spirometrie (uitslag onvolledig)	Kies een episode...	

Episode aanvullen met deelcontact "Spirometrie (uitslag onvolledig)".

Er is nog geen episode toegekend.

Bestaande episode Episodes & Problemen Actief & Niet actief

Datum	P	K	Omschrijving	ICPC	Start	#	A	Mw	Arts	Priori... /
16-05-2024	P		copd	R95	10-05-2022	5	✓	MT	EI	9
26-10-2020	P		BLWI	R74	26-10-2020	2	✓	FJ	JF	9
15-05-2024			tets	N02	11-05-2021	4	✓	LC	EI	9
26-10-2020			Zwang urst:POS	W78	26-10-2020	3		FJ	JF	9
26-10-2020			Pityriasis rosea	S90	24-09-2020	1		FJ	EI	9

Nieuwe episode automatisch
 Nieuwe episode handmatig

OK Annuleren

Journaalregels

OK + Nieuwe regel OK +

D	Datum*	SOEP*
1	16-05-2024	O

Filteren op: Geen

ICPC	Kenmerk	Code*
		overig

- Overzichten
- Patient
- Administratie
- Diversen
- Identificatie

Opslaan Annuleren

