



ORYGEN

DUAL VALVE

Verbeter je ademhalingspiieren.

Een uniek apparaat dat je helpt om zowel de inademingsspiieren als ook de uitademingsspiieren in één keer te trainen.



Leaders in the field of respiratory & critical care products

FORUMED

Respiratory products for Spirometry

ptmedical.nl



Technische Specificaties

Het Orygen Valve ademhaling training apparaat is bedoeld voor longpatiënten, sporters, muzikanten en alle andere mensen die hun gezondheid en ademhalingsprestaties willen verbeteren.

Het is ontworpen in nauwe samenwerking met artsen van de afdeling Longziekten van het Hospital del Mar in Barcelona (Spanje).

Met de Orygen valve kunnen patiënten de inspiratoire en expiratoire spieren tegelijkertijd trainen en de niveaus onafhankelijk van elkaar instellen. De Orygen Dual Valve is een goedkoop, draagbaar en gemakkelijk te gebruiken product dat ademhalingsinstellingen biedt van 0 cm H₂O tot 80 cm H₂O met niveau-aanpassingen van 10 cm H₂O.

Het is een essentieel trainingshulpmiddel voor patiënten die lijden aan of herstellen van: COPD, astma, beroerte, Parkinson, COVID-19 of dysfagie.

Aanbevolen gebruik:

- **Frequentie:** 4 of 5 dagen per week, tweemaal daags
 - **Wanneer te gebruiken:** Ochtend en nacht
 - **Behandelmethode:**
 - Start van het programma: 3 series van 10 herhalingen 's ochtends en 's avonds
 - Zodra comfortabel, verhogen naar 3 series van 20 herhalingen 's ochtends en 's avonds
 - Gevorderd gebruik: 3 series van 10 reps 's ochtends en 's avonds
- Het gebruik van de Orygen valve wordt dagelijks aanbevolen, maar er kunnen al merkbare resultaten worden behaald bij gebruik van 4 dagen per week.



Bestelinformatie

Orygen Dual Valve			
Referentienummer	Bestelnummer	Omschrijving	Verpakking
F-07 DDV	1001123	Orygen Dual Valve inclusief mondstuk en neusklem	Per stuk

Ons customer service team is bereikbaar per telefoon of per e-mail voor vragen over verkoop en/of technische vragen.

 Voor Benelux:
Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG Leek
Nederland
T +31(0) 594 587 280
F +31(0) 594 587 288
mail@ptmedical.nl
www.ptmedical.nl



FORUMED

Respiratory products for Spirometry