

## Spida 5 overzetten naar nieuwe PC – handleiding voor systeembeheerders

---

*Spida 5 software is bedoeld om longfunctietesten mee uit te voeren. Tijdens installatie zijn beheerdersrechten nodig en het serienummer. Oudere versies werken zonder dongle en dienen binnen 30 dagen geregistreerd te worden met een autorisatiecode.*

### Geen Serienummer?

Spida 5 heeft tijdens installatie het 9-cijferige serienummer nodig. Is de klant de CD-ROM kwijt (serienummer staat op het hoesje) dan kan je op de oude werkplek het serienummer terugvinden in het register:

[HKLM\Software\Micro Medical\Spida5\serial](#)

### Geen CD?

De volledige Spida 5 CD is hier te downloaden (89 Mb):

<http://www.micromedical.co.uk/update/spida/spida5/full/Spida5Setup2115.exe>

Eventuele updates zijn vervolgens vanuit de Spida software te vinden onder het menu

[Help -> Zoek naar updates](#)

### Instellingen overnemen

Alle instellingen van Spida worden bewaard in deze map:

[C:\Documents and Settings\\[user\]\Local settings\Application data\Micro Medical](#)

Maak hier een kopie van voor straks...

### Database?

In de bovengenoemde map is in de submap Spida5 een bestand te vinden genaamd [Spida5.ini](#)

Daarin kan eenvoudig het pad naar de database achterhaald worden. Let op de regel FileName:

[FileName=C:\PROGRAM FILES\MICRO MEDICAL\SPIDA5\DATABASE.MDB](#)

Indien de Microsoft Access database op de lokale PC stond, maak dan een kopie. Indien de database op een server staat; lekker laten staan.

### Installatie

Installeer de software. Indien de klant nog Promedico VDF heeft, wijzig het installatiepad naar:

[C:\Program files\Spida 5](#) tijdens de installatieroutine.

Start de software 1x op en sluit weer af.

Vervang tot slot de [Micro Medical](#) folder in de juiste docs and settings map met de back-up van de oude PC.

### Registratie?

Indien het serienummer van de praktijk begint met [51xxxxxx](#) dan hebben ze geen dongle. Negeer de dongle melding in de software en ga in Spida naar het menu

[Help -> registreer Spida 5](#). Hier kan een nieuwe autorisatiecode aangevraagd worden.

Deze wordt nagestuurd door de fabrikant via email/fax.

Bellen kan ook (naar Engeland): +44 1634 899 599, optie 0 en vervolgens receptie aangeven dat je Spida wilt registreren. Ze vragen het serienummer en de [hardware key](#) (per PC uniek)

Je hebt de autorisatiecode dan meteen. De software werkt 30 dagen volledig, daarna stopt Spida met werken tot de dongle of autorisatiecode ingevoerd is!