
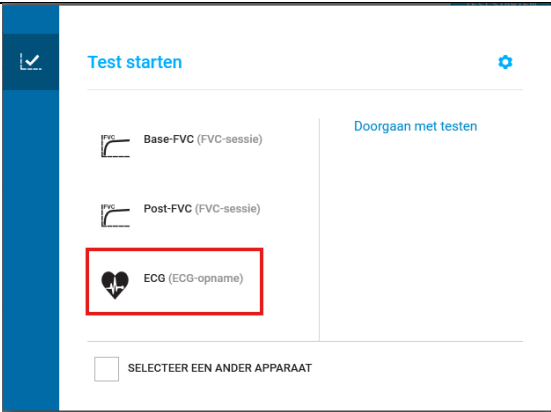
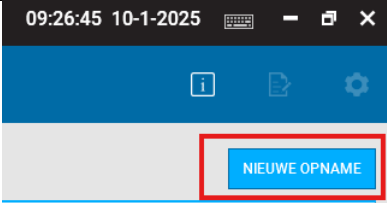
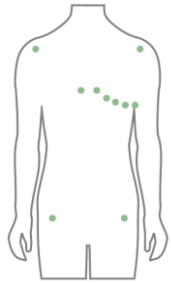
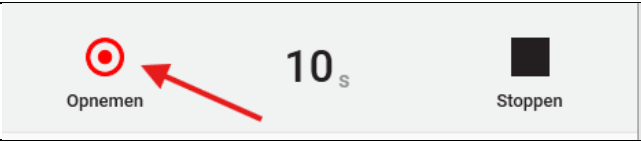
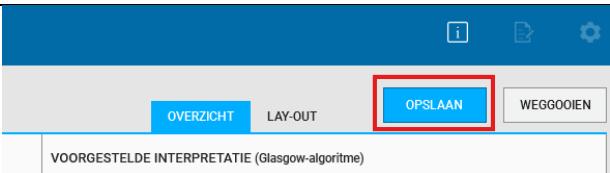
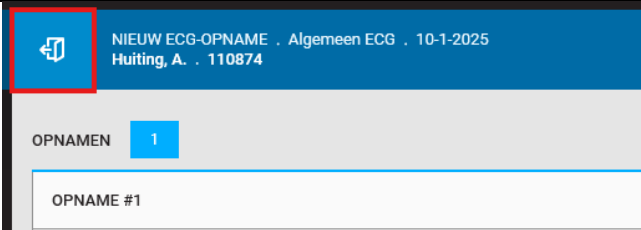
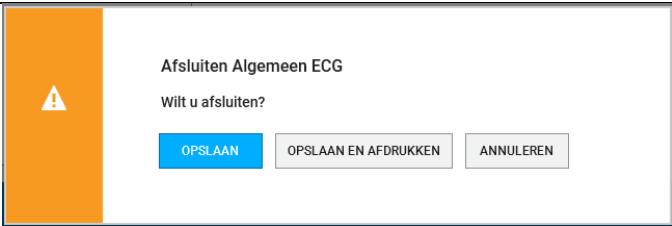
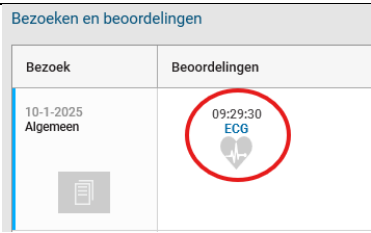


Verkorte Handleiding ECG Spirotrac

1.	Zoek of maak een nieuwe Patiënt aan. Of start de software op via het HIS	
2.	Klik op TEST STARTEN	
3.	Kies voor ECG (ECG-opname)	
4.	Schakel het ECG-apparaat in. Het apparaatdisplay geeft aan wanneer het apparaat klaar is voor gebruik.	
5.	Plaats de elektroden volgens bijlage 1 en sluit de draden aan op de plakkers.	
6.	Klik op NIEUWE OPNAME	
7.	Controleer de torsoafbeelding om er zeker van te zijn dat er een goed signaal van elke afleiding afkomstig is. Wacht met het registreren van een ECG totdat er een "net" ECG verschijnt.	
8.	Klik op het pictogram Opnemen. De opname eindigt automatisch na de ingestelde tijd (10 sec).	

9.	Bekijk de opname en kies ervoor om de opname op te slaan of weg te gooien.	
10.	Herhaal stap 6-9 als er tijdens deze sessie nog meer opnames nodig zijn.	
11.	Klik op het “Deurtje” om De test af te sluiten.	
12.	Kies voor “OPSLAAN” of eventueel “OPSLAAN EN AFDRUKKEN”	
Printen of opslaan als PDF		
13.	Om het ECG op te slaan als PDF open dan opnieuw het ECG door op het ECG icoontje te klikken.	
14.	Klik op het printer icoontje. Een PDF wordt aangemaakt, dit kan eventjes duren!	
15.	Klik op “EXPORTEREN” om het ECG op te slaan als PDF op de computer.	

Referentiekaart voor plaatsen ECG electrodes

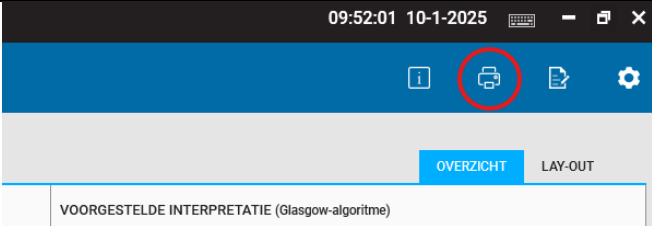