



Animatie inschakelen.

1

Klik op het tandwiel

Z-Score	Pred	Best	% Pred
-0,47	5,72	5,37	93,88
-1,05	4,49	3,88	86,41
-1,10	0,79	0,72	-
-0,95	10,80	9,31	86,20
-0,93	5,72	5,03	87,94

2

Scrol naar beneden en kies bij "Incentive Options" voor de gewenste animatie

Incentive Options

Incentives

Big Bad Wolf

×

▼

Ball and Tube

Candles

Big Bad Wolf

3

Bij Target Values kun je instellen hoe moeilijk het is om bv het huisje van de biggetjes omver te blazen. Als het de patiënt niet lukt om het huisje omver te blazen kies je voor een lager getal.

Target Values

50 ————— 150 86

4

Om de animatie af te sluiten klik op het Kruisje;
“CLOSE” De animatie vebergen, bij de volgende blaaspoging start hij weer op
“CLOSE AND DISABLE” Sluit de animatie volledig af



Closing Incentives

Are you sure you wish to close?

CLOSE

CLOSE AND DISABLE

CANCEL