

Patiënt gegevens achteraf aanpassen

1

Selecteer de patiënt waarvan u de gegevens wilt aanpassen.

2

Verander (bv de lengte) naar de juiste waarde en klik op "Opslaan en toepassen op eerdere beoordelingen"

Patiënt bewerken

Groep
CASPIR -- v

Persoons-ID
110874

Voornaam:
André

Achternaam:
Huiting

Geboortedatum:
08-nov-1974 v

Leeftijd:
48,61 1 - 150

Geboortegeslacht:
Mannelijk v

Lengte:
187,0 cm

Gewicht:
87,0 kg

BMI:
24,9

Etniciteit:
Caucasian (GLI Kaukasisch, 1,00) v

Rookinformatie:
Niet-roker v

Sigaretten per dag:

Jaren gerookt:

Pack Years:

OPSLAAN ANNULEREN

Opslaan en toepassen op eerdere beoordelingen

3 Selecteer de test die je wilt bijwerken en klik op “Bijwerken”

Patiënt bewerken

Groep: CASPIR

Eerdere beoordelingen patiënt

Bezoek	Beoordeling	Type	Uitgevoerd op	Tijd	Status	
General	Post-FVC	FVC	20-6-2023	12:54:23		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	20-6-2023	12:40:14		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	19-6-2023	11:51:24		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	31-5-2023	18:38:26		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	31-5-2023	18:14:49		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	22-5-2023	16:43:09		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	15-5-2023	11:56:29		Bijwerken

Voltooien

4 Zet een vinkje bij de parameter die je wilt bijwerken, en klik op “OPSLAAN”


Demografische gegevens van de beoordeling bewerken

Demografische Gegevens	Vorige	Nieuw	Bijwerken	Beoordelingswaarde
Lengte:	178,0 cm	187,0 cm	☒	187,0 cm
Gewicht:	87,0 kg	87,0 kg	☐	
Rookinformatie:	Niet-roker	Niet-roker	☐	
Sigaretten per dag:	-	-	☐	
Jaren gerookt:	-	-	☐	

OPSLAAN **ANNULEREN**

5

Klik op "JA"

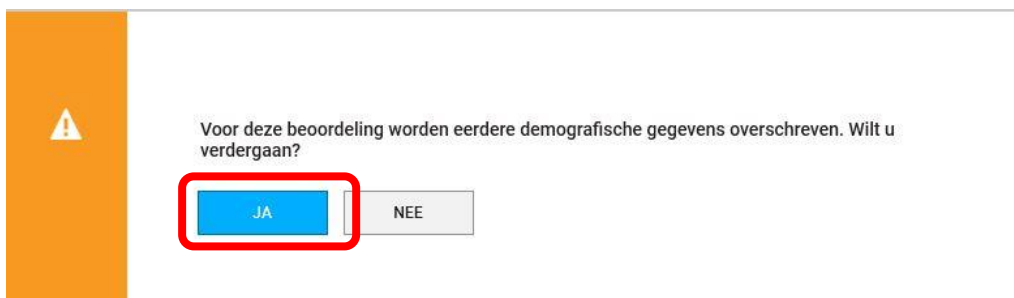


Voor deze beoordeling worden eerdere demografische gegevens overschreven. Wilt u verdergaan?

JA NEE

6

Klik op "OK"

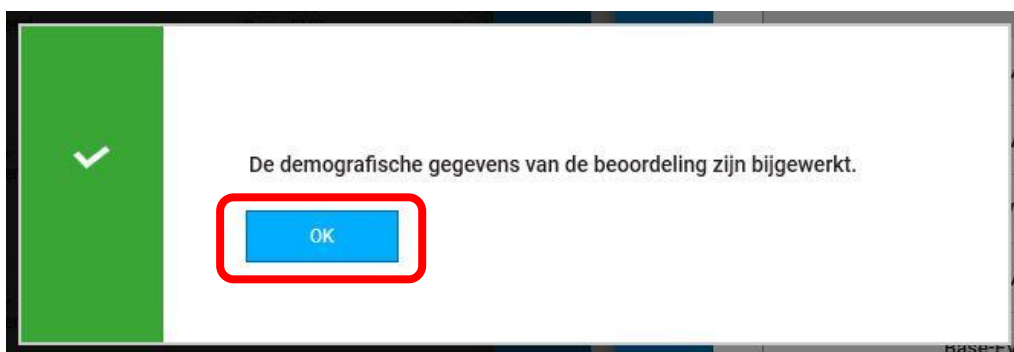


De demografische gegevens van de beoordeling zijn bijgewerkt.

OK

7

Klik op "VOLTOOIEN"

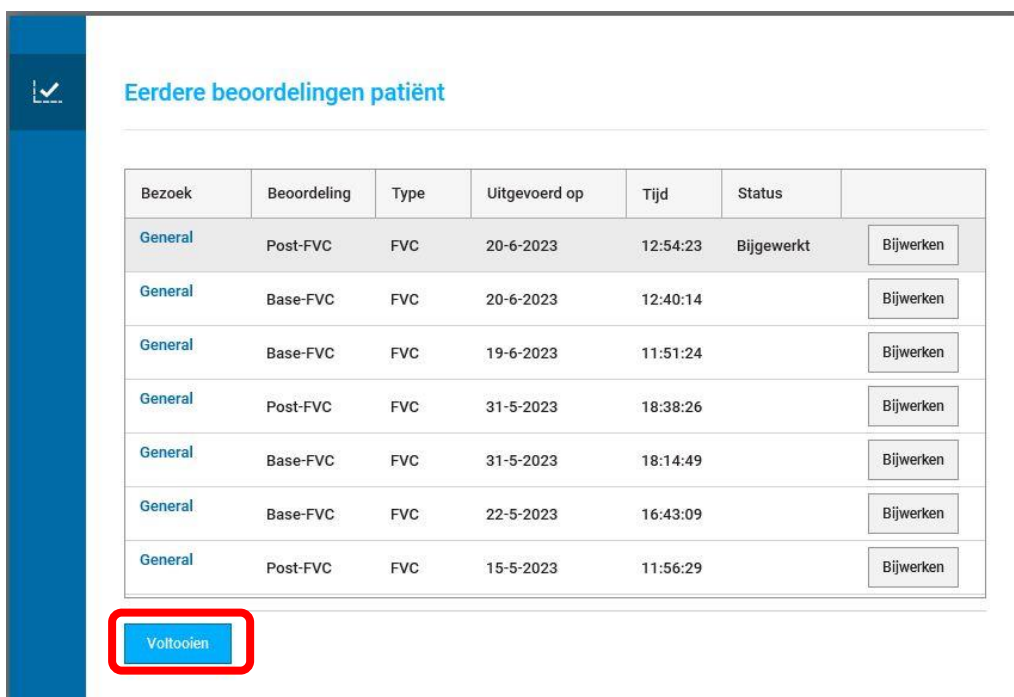

Eerdere beoordelingen patiënt

Bezoek	Beoordeling	Type	Uitgevoerd op	Tijd	Status	
General	Post-FVC	FVC	20-6-2023	12:54:23	Bijgewerkt	Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	20-6-2023	12:40:14		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	19-6-2023	11:51:24		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	31-5-2023	18:38:26		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	31-5-2023	18:14:49		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	22-5-2023	16:43:09		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	15-5-2023	11:56:29		Bijwerken

Voltoeien

8

Dubbelklik vervolgens op het onderzoek die je hebt aan gepast.

Bezoeken en beoordelingen

Patiënt bewerken TEST STARTEN

Bezoek	Beoordelingen
20-6-2023 General	12:40:14 Base-FVC 12:54:23 Post-FVC 13:10:24 ECG
19-6-2023 General	11:51:24 Base-FVC
31-5-2023 General	18:14:49 Base-FVC 18:38:26 Post-FVC
22-5-2023 General	16:43:09 Base-FVC

9

Print of sla het aangepaste rapport opnieuw op door op het printer icoontje te klikken

08:59:02 22-6-2023







		PARAMETERS	KWALITEIT	ANALYSE
% Voorsp	Basis	Basis % Voorsp.	Wijzigen	% wijziging
81,87	5,66	99,65	-1010 mL	-17,84
88,51	3,81	85,81	120 mL	3,15
-	0,67	-	-	-
61,77	9,74	90,60	-3,10	-31,83
57,39	4,94	86,97	-1680 mL	-34,01