


Rapport instellen t.b.v. portfolio CASPIR

Alle curve's op rapport t.b.v. portfolio:

1. Ga naar **RAPPORTEN**, → **FVC PARAMETERINFO**, → En kies bij testopties voor "Alles tonen"

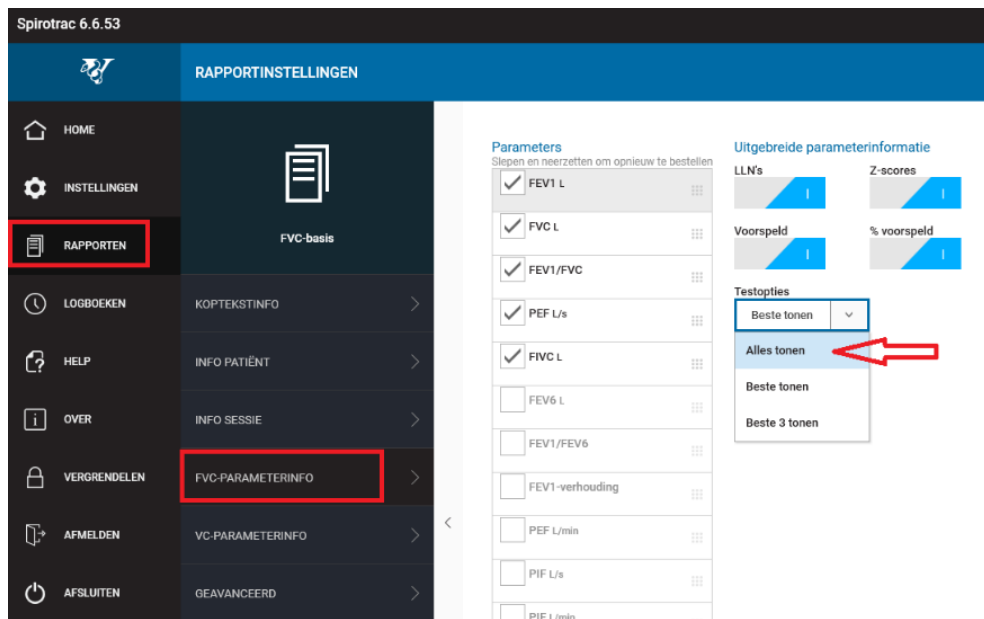


- En klik op **OPSLAAN**:



Naam en geboorte datum niet weergeven op het rapport:

- Ga naar **RAPPORTEN**, → **INFO PATIËNT**, → En zet de “Naam” en “Geboortedatum” uit.

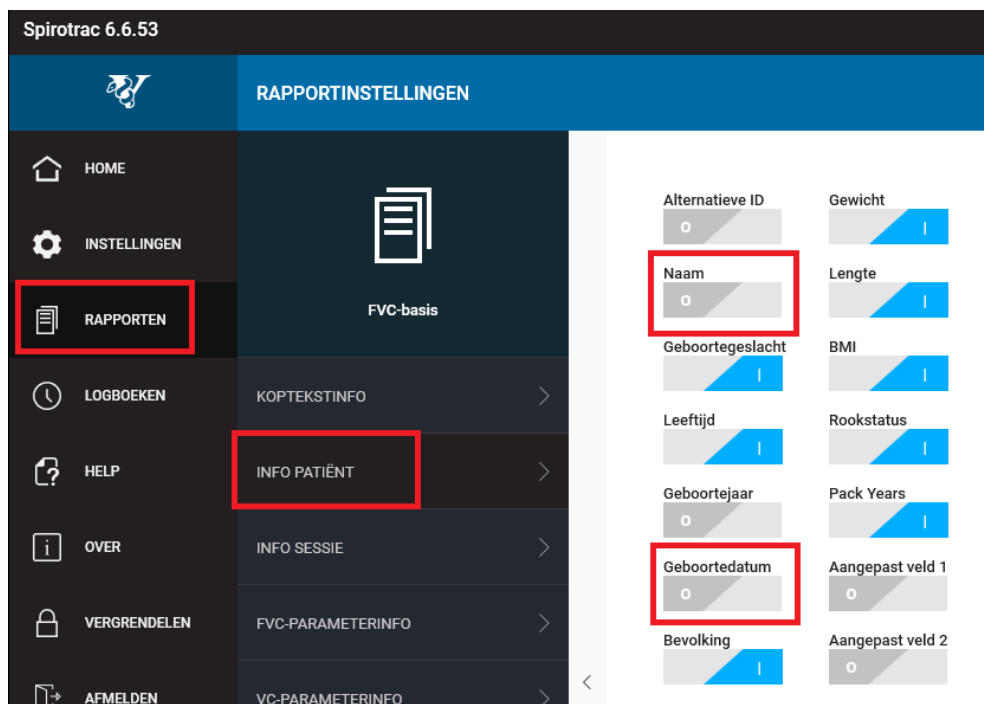

- En klik op **OPSLAAN**:



Sessiekwaliteit uitgebreid weergeven en Miniatuurgrafieken aanzetten:

- Ga naar **RAPPORTEN**, → **GEAVANCEERD**, → En zet bij “Kwaliteitsopties” deze op “Gedetailleerd tonen”
- En zet “Miniatuurgrafieken” aan


The screenshot shows the 'Sessiekwaliteit' (Session Quality) settings panel on the left, which is highlighted with a red box. It includes a dropdown menu for 'Kwaliteitsopties' (Quality Options) set to 'Gedetailleerd tonen' (Detailed tones). Below this are sections for 'Opmerkingen' (Remarks) with options for 'Opmerkingen over sessie' (Remarks on session) and 'Opmerkingen over Patiënt' (Remarks on Patient), and 'Testopmerkingen' (Test remarks). The 'Miniatuurgrafieken' (Miniaturized graphs) section is also highlighted with a red box and set to 'I' (On). To the right of the settings is a vertical axis with a red line graph and several data points.

- En klik op **OPSLAAN**:

The screenshot shows the bottom of the reporting interface. On the left, there is a dark bar with a 'LICENTIE' (License) icon and text. On the right, there are two buttons: 'OPSLAAN' (Save) and 'ANNULEREN' (Cancel). A red arrow points down to the 'OPSLAAN' button. Below the buttons, there is a 'Paint' icon.

POST Rapport:

- Herhaal bovenstaande ook voor het POST-RAPPORT

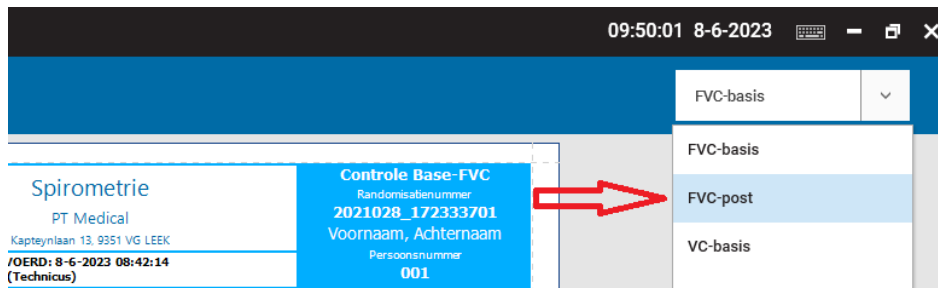

Rapporten aanmaken:

Maak nu van alle patiënten zowel een pre rapport als een post rapport zodat de beoordelaar alle benodigde informatie heeft.

Het is ook mogelijk een rapport op te slaan als Excel bestand, hierdoor is het erg gemakkelijk om de bv de curves te gebruiken in een PowerPoint presentatie:

Rapport afdrukken



Zet hierna alle instellingen weer terug, en ook weer op opslaan klikken !