

Instructies voor het reinigen van de Vitalograph Pneumotrac

Hygiëne

Een spirometer is niet ontworpen of geleverd als steriel apparaat.


Om kruisbesmetting te voorkomen dient bij elke patiënt een nieuw Vitalograph Bacterieel Viraal Filter (BVF™) gebruikt te worden! Het gebruik van een Vitalograph bacteriefilter biedt een hoge mate van bescherming van de proefpersoon, het apparaat en de gebruiker tegen kruisbesmetting tijdens spirometriemanoeuvres.

De **binnenkant** van een Vitalograph flowhead hoeft niet te worden gereinigd als voor elke proefpersoon een nieuwe Vitalograph bacteriefilter wordt gebruikt.

De **buitenkant** van de flowhead kan worden gereinigd in overeenstemming met vereisten voor voorwerpen die in de hand worden gehouden.

Reiniging van de buitenzijde van de Flowhead

Aanbevolen reinigingsmethode waarbij voor elke patiënt een nieuw Vitalograph bacteriefilter wordt gebruikt:

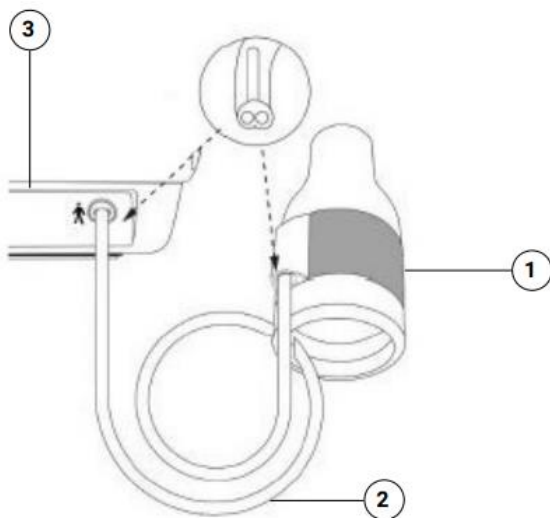

1. Flowhead
2. Slang
3. Basisstation

Afbeelding 1: Doorstroomkop compleet, doorstroomkopverbinding slang en apparaat

- Neem de buitenkant van het apparaat, de slang en de flowkopbuis af met een 70% isopropylalcoholgeïmpregneerde doek om deze te reinigen en te zorgen voor een lichte vorm van desinfectie.