

Installeren en instellen Connect software

1 Inleiding

De Vitalograph Connect software koppelt de Vitalograph Spirometer met Medicom middels de Medicom Meetapparatuur Interface (MMI).

In deze handleiding wordt beschreven hoe de Vitalograph Connect software te installeren op de PC en hoe de Connect Software en Spirotrac in te stellen.

2 Inleiding

Met de MMI kunnen de onderzoeksgegevens in Medicom worden opgeslagen. De onderzoeksgegevens, bestaande uit meetwaarden, worden automatisch in het diagnostisch dossier (F6) en bij aanvullend onderzoek (F2) verwerkt. Indien u dat zo heeft ingesteld, worden er ook journaalregels met een toelichting bij de uitslag van het onderzoek aangemaakt.

Het voordeel van het gebruik van de MMI is dat meetresultaten automatisch worden verwerkt in Medicom. De meetresultaten zijn daardoor direct inzichtelijk in het dossier van de onderzochte patiënt.


3 Randvoorwaarden

PT Medical ondersteunt alleen de instellingen binnen de Spirotrac en Connect software.

4


Downloaden Connect Software

Ga naar het beginscherm in Spirotrac en klik op “OVER”

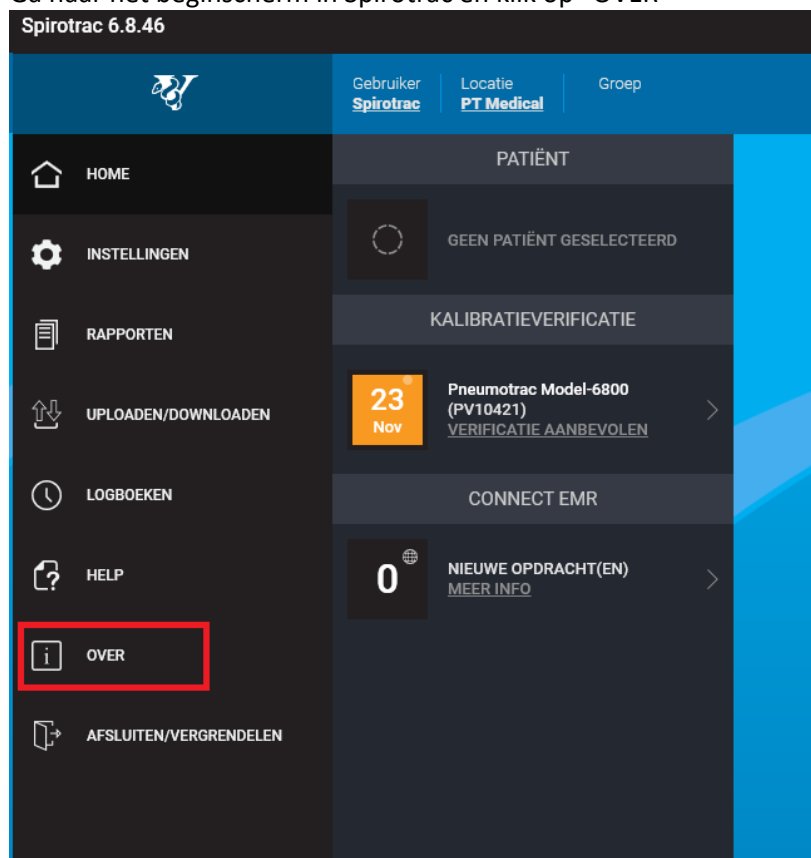


5

Klik op “CONTROLLEREN OP CONNECT UPDATES”

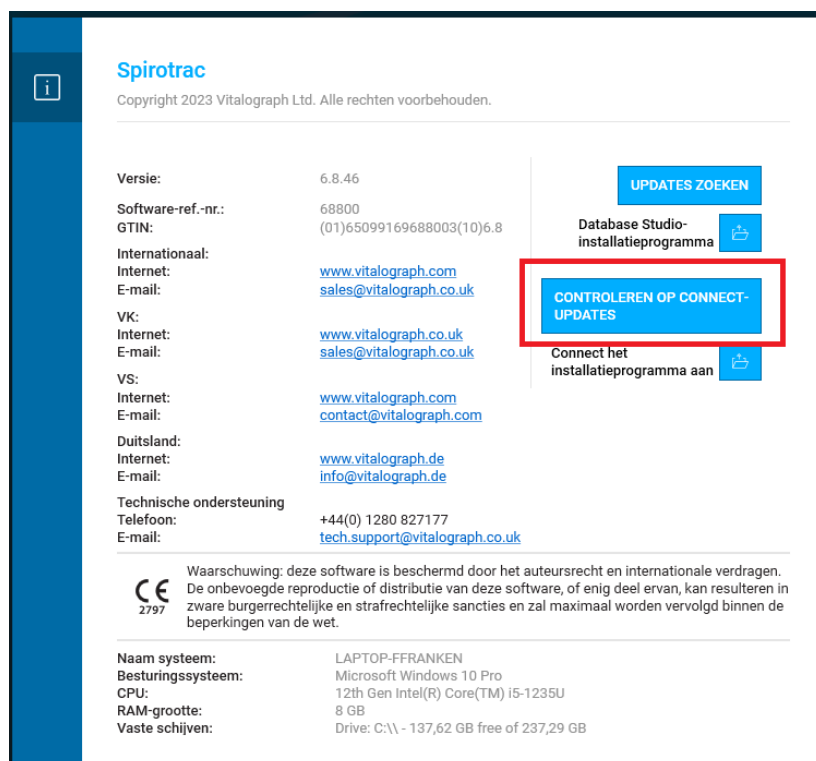


6

Indien er **geen Update beschikbaar** is, zie onderstaande melding, ga dan door naar punt 12, Anders ga door naar punt 7

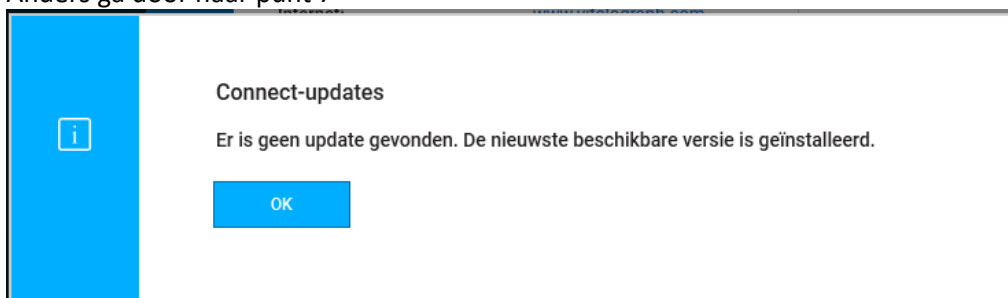


7

Klik op OK

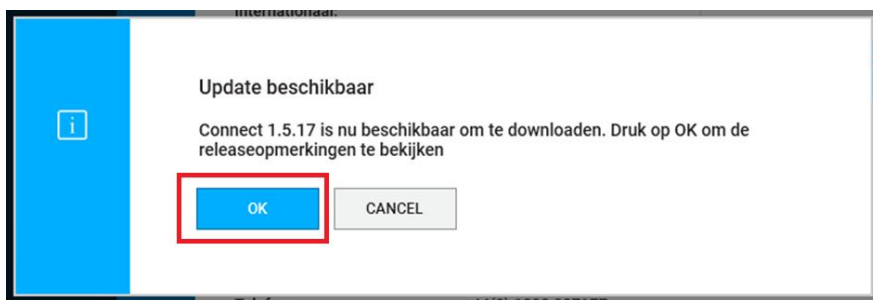

8

Klik op "UPDATES DOWNLOADEN"

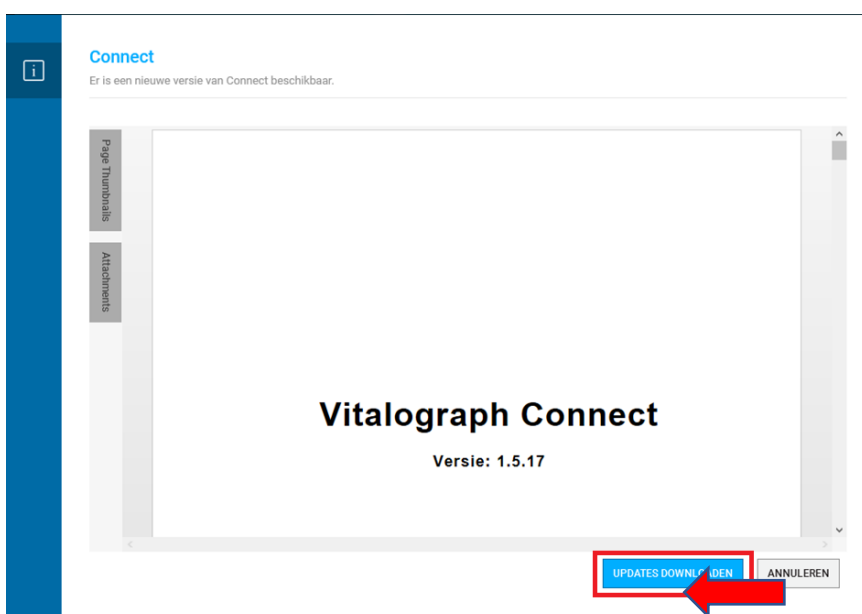


9

Klik op "OK"




10

Klik met de **rechtermuisknop** op “Connect 1.5.17”
En klik op “Als administrator uitvoeren”

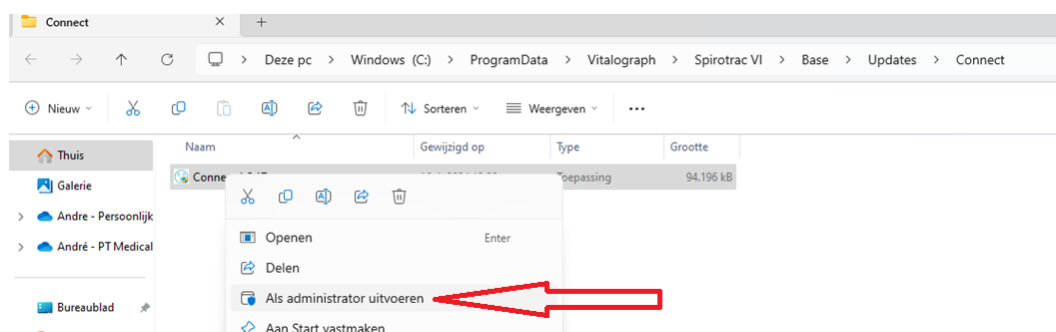

11


In het venster wat opent klik op “Finish”

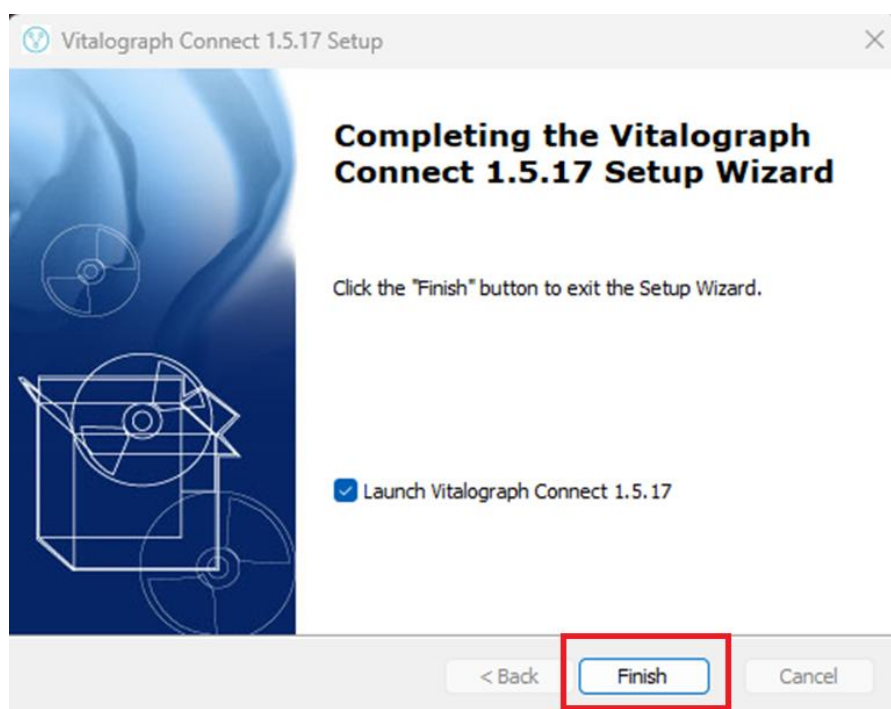

12 Instellen Vitalograph Connect:

Let op! Zonder het instellen van de Connect kan Spirotrac hier geen gebruik van maken en Medicom ook niet. Er is dan geen communicatie tussen Vitalograph Connect en Medicom.

13 Voeg een nieuwe EMR toe in Connect door op het + Toevoegen te klikken

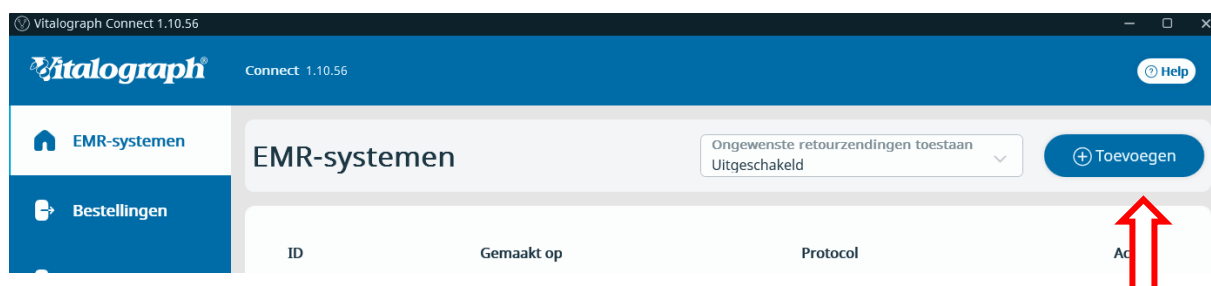

14 Vul bij ID Medicom in en bij Protocol kies voor HL7 2.6 en klik op "TOEVOEGEN"

15


Klik op het blauwe “EMR-systeem configureren” icoontje, zie onderstaande afbeelding



16

Scroll een stukje naar beneden!

En vul bij Decimaalteken “Decimaalpunt in” en klik op opslaan.

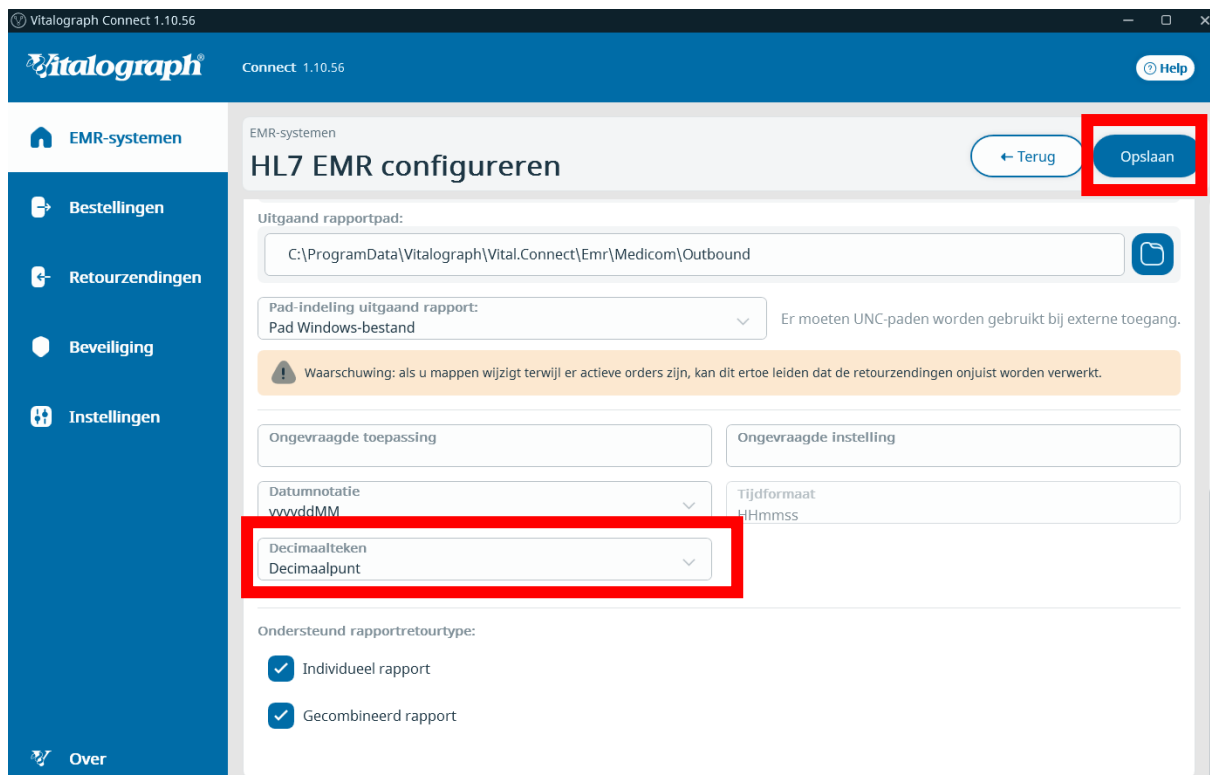

Instellen SPIROTRAC

17

Ga naar INSTELLINGEN -> CONNECT ->

- Zet het schuifje “Ingeschakeld” aan.
- Zet het schuifje “Orders automatisch verwerken” uit.

