

Procedure Spirometrie vanuit Medicom

De actuele lengte en gewicht moet voorafgaand aan het opstarten van de spirometrie ingevuld worden in Medicom!


1. Ga naar aanvullend onderzoek (F2), en kies bij definitie voor de Vitalograph Spirometer, en klik op "OK"

The screenshot shows the Medicom software interface. The main window is titled 'Medicom - Dossier - Bloem van Test'. The left sidebar contains a menu with options like 'Journaal', 'Voorgeschiedenis', 'Medicatiestatus', 'Medicatiehistorie', 'Protocollen overzicht', 'Diagnostisch dossier', 'Laboratorium aanvragen', 'Aanvullend onderzoek', 'Documentbeheer', 'Kennisregels', 'Oproepen', 'LSP medicatiehistorie', 'Patiënt actielijst', 'Patiëntprofiel', and 'Patiënt eConsults'. The 'Aanvullend onderzoek' window is open, showing a table of research entries and a form for adding a new entry. The form includes fields for Date, Code, Description, Lab, Name, Indication, ID, Completion, and MGN. The 'Definitie' (Definition) field is set to 'Vitalograph Spirometer'.


Datum	Code	Omschrijving	Lab.	Ahame	Indicatie	Info	ID	Compleet?	MGN
13-09-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk			12	Niet beoordeeld c.q. niet beschikbaar voor MGN	
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk				beschikbaar voor MGN	
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk				beschikbaar voor MGN	
10-05-2022	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk				beschikbaar voor MGN	
29-10-2021	Spirometrie...	Spirometrie CareFusion	PTCAREFU	Praktijk				beschikbaar voor MGN	

The 'Aanvullend onderzoek' window is open, showing a form for adding a new entry. The form includes fields for Date, Code, Description, Lab, Name, Indication, ID, Completion, and MGN. The 'Definitie' (Definition) field is set to 'Vitalograph Spirometer'.

2. Spirotrac wordt opgestart; Klik op “NIEUWE OPDRACHTEN” en daarna op “TEST STARTEN”

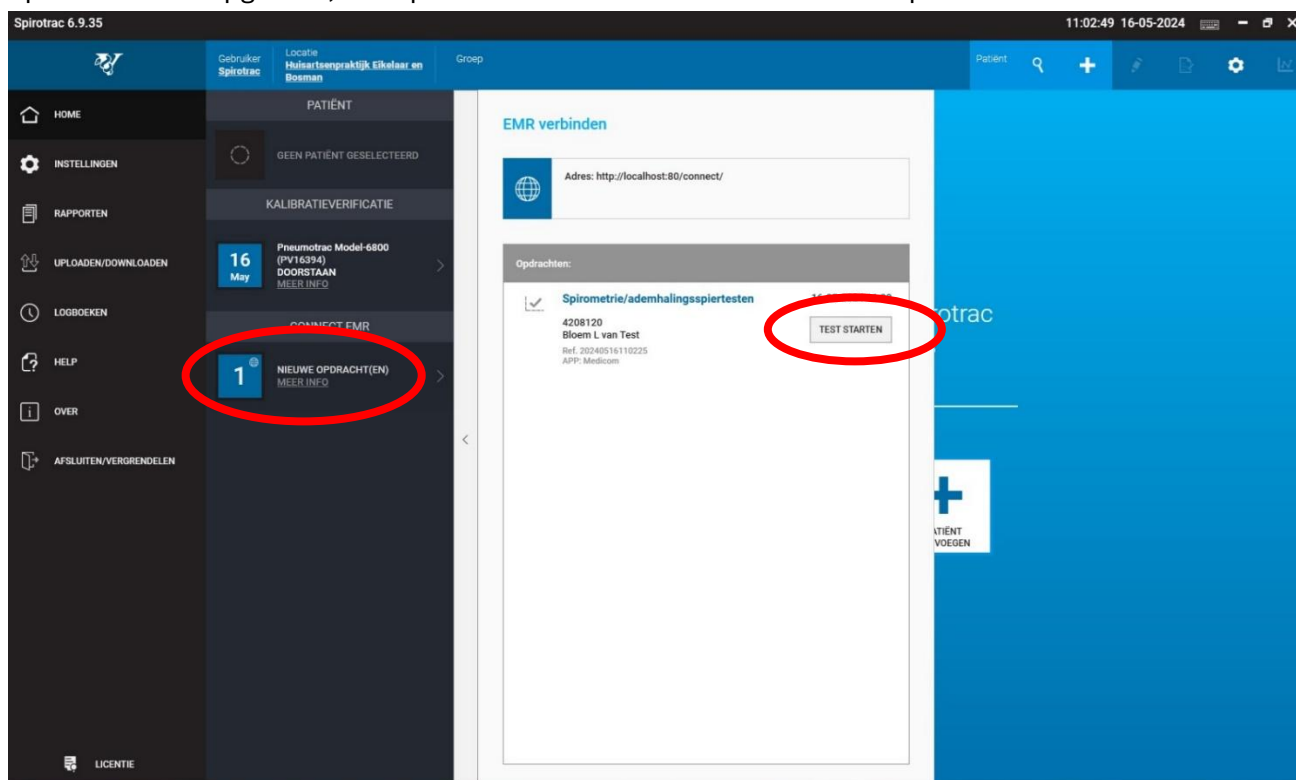

3. Klik op “PATIENT BEWERKEN” om het Geboortegeslacht en de Etniciteit aan te vullen

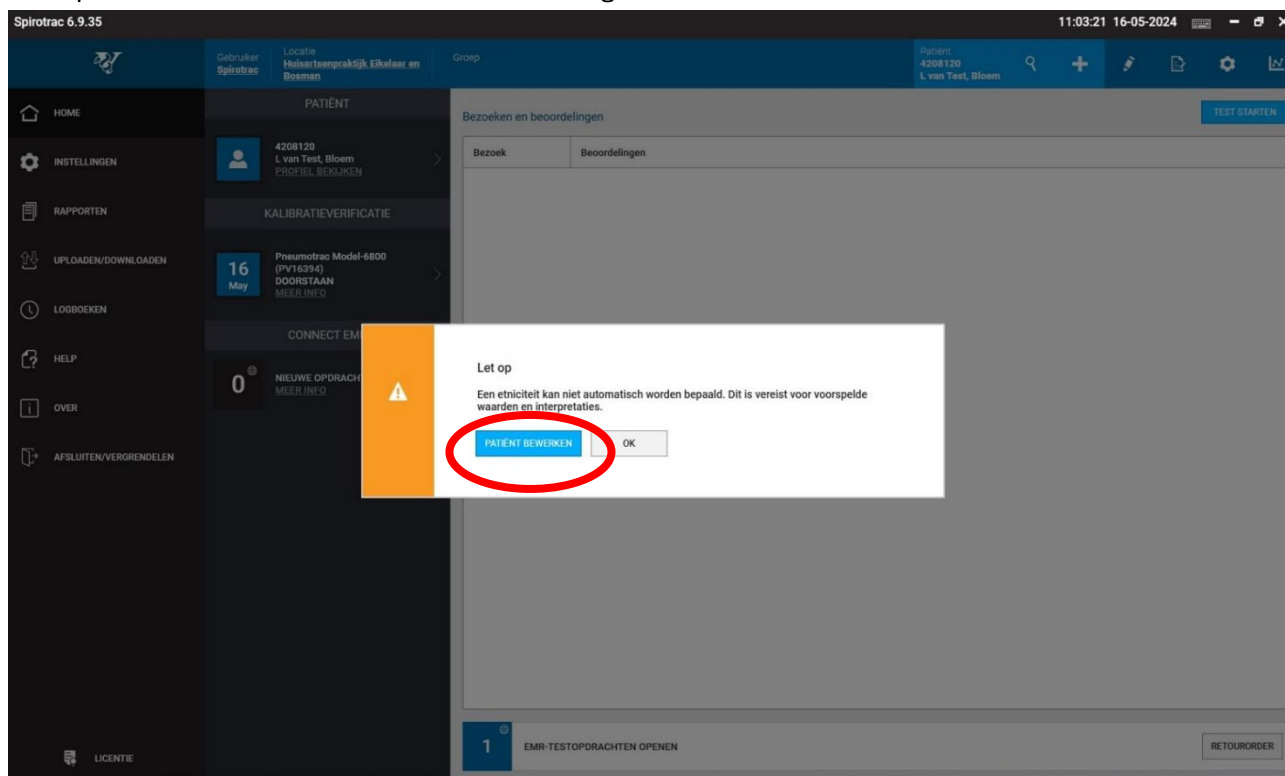

4. Vul het Geboortegeslacht en Etniciteit in en klik op "OPSLAAN"

Patiënt bewerken

Groep: (Geen) ▼

Persoons-ID: 4208120 Voornaam: Bloem Achternaam: L van Test

Geboortedatum: 01-jan-2010 ▼ Leeftijd: 14,37 1 - 150 Lengte: 173,0 cm

Geboortegeslacht: ▼ **Gewicht:** 68,0 kg **BMI:** 22,7

Etniciteit: ▼ **Rookinformatie:** ▼

Sigaretten per dag: Jaren gerookt: Pakjaren: -

☐ Deze wijzigingen toepassen op eerdere beoordelingen

OPSLAAN **ANNULEREN**

5. Klik op "TEST STARTEN" Kies voor een PRE test, POST test of voor ECG

Spirotrac 6.10.43 15:57:02 26-7-2024

Patiënt: 1679 Huijting, André

TEST STARTEN

Test starten

- Base-FVC (FVC-sessie)
- Post-FVC (FVC-sessie)
- ECG (ECG-opname)


☐ SELECTEER EEN ANDER APPARAAT

Doorgaan met testen

0 EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN


RETOURORDER

6. Klik op het deurtje om de PRE en of POST test te verlaten

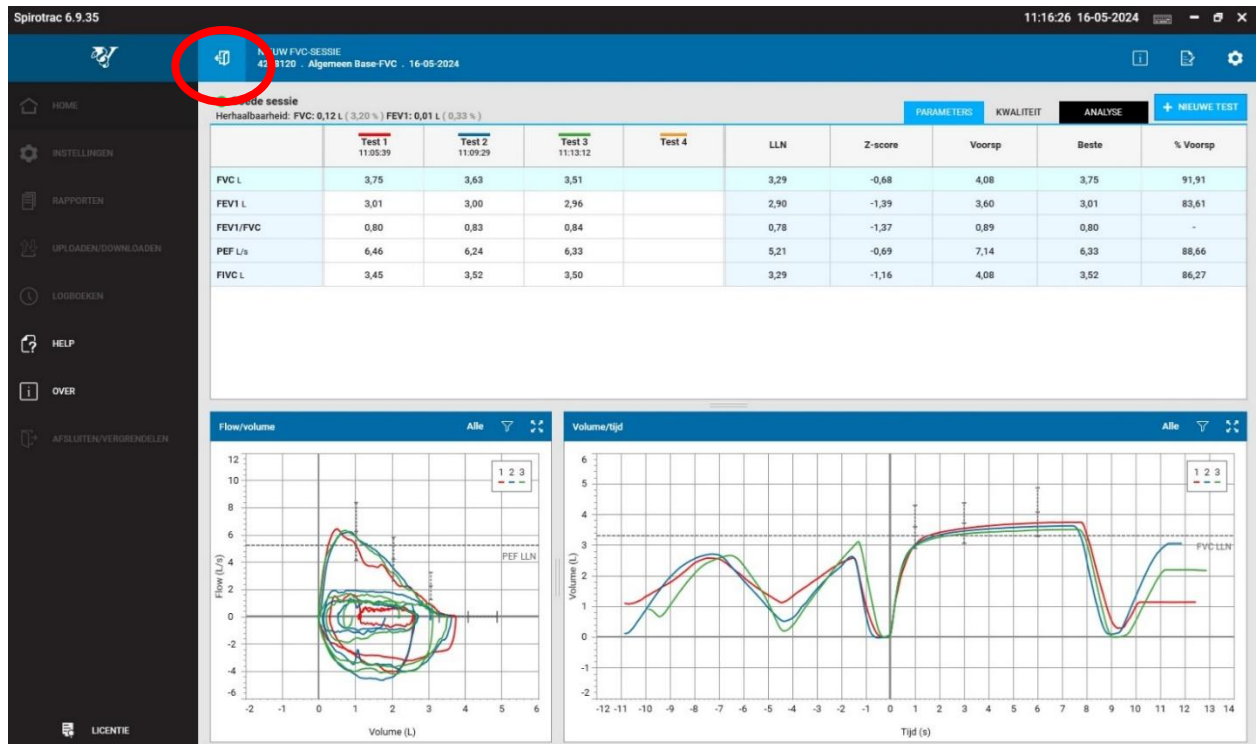

Let op: Doe nu eerst eventueel een Post-test (ZIE PUNT 5)

7. Klik rechts onderin het scherm op "RETOURORDER" om de gegevens te exporteren naar Medicom

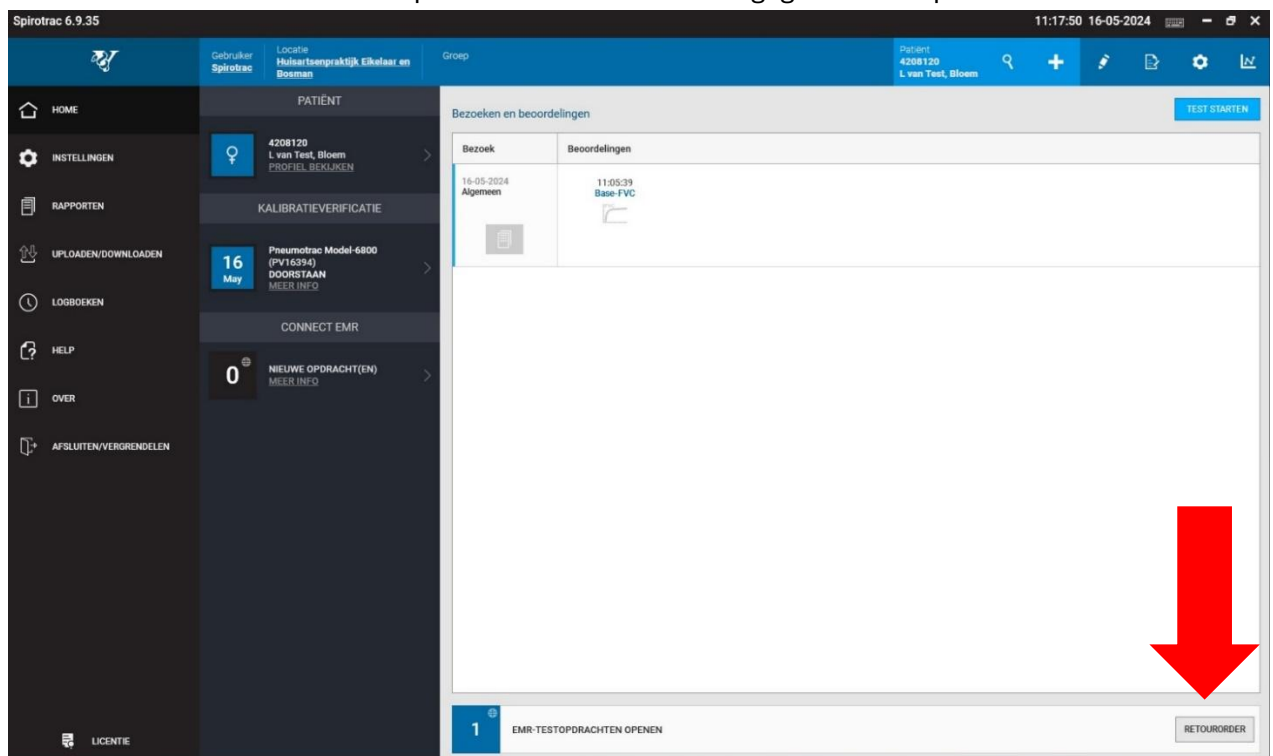

8. Klik vervolgens om "EXPORTEREN"

Beoordelingen retourneren

Testvolgorde		Beoordeling	Label	Datum	
Spirometrie/ ademhalingsspiertes ten Besteld op 20-11-2024 13:14 Besteld door - Referentie - Toepassing -		FVC-sessie	Post-FVC	20-11-2024 20:07:00	☒
		FVC-sessie	Base-FVC	3-4-2024 15:40:07	☐

<
 1 / 2
 >

EXPORTEREN

AFSLUITEN

9. De Gegevens worden nu gexporteerd naar Medicom, dit kan eventjes duren

Spirotrac 6.9.35
 11:19:11 16-05-2024

Gebruiker: Spirotrac
 Locatie: Huisartsenpraktijk Elkester en Bosman
 Groep:
 Patient: 4208120 L van Test, Bloem

HOME
 INSTELLINGEN
 RAPPORTEN
 UPLOADEN/DOWNLOADEN
 LOGBOEKEN
 HELP
 OVER
 AFSLUITEN/VERGRENDELEN

PATIENT
 4208120 L van Test, Bloem
 PROFIEL BEKIJKEN
 KALIBRATIEVERIFICATIE
 16 May
 Pneumotrac Model-6800 (PV16394)
 DOORSTAAN
 MEER INFO
 CONNECT EMR
 0
 NIEUWE OPDRACHT(EN)
 MEER INFO

Bezoeken en beoordelingen
 TEST STARTEN
 Bezoek: 16-05-2024 Algemeen
 Beoordelingen: 11:05:39 Base-FVC

Beoordelingen retourneren
 Wacht tot de retour volledig is voltooid

1
 EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN
 RETOURORDER

10. Het Beoordelingen scherm is nu leeg en klik op “AFSLUITEN”

Beoordelingen retourneren

Testvolgorde	Beoordeling	Label	Datum
Spirometrie/ ademhalingsspiertes ten Besteld op 20-11-2024 13:14 Besteld door - Referentie - Toepassing -			

< 1 / 2 >

EXPORTEREN **AFSLUITEN**

11. Sluit Spirotrac af met het kruisje in de rechter bovenhoek en klik op “JA”

Spirotrac 6.9.35 11:20:15 16-05-2024

Gebbruiker: Spirotrac Locatie: Huisartspraktijk Elkelaar en Bosman Groep: Patient: 4208129 L van Test, Bloem

HOME PATIËNT 4208129 L van Test, Bloem PROFIEL BEKIJKEN

INSTELLINGEN KALIBRATIEVERIFICATIE

RAPPORTEN 16 May Pneumotrac Model-6800 (PVI6394) DOORSTAAN MEER INFO

UPLOADEN/DOWNLOADEN LOGBOEKEN CONNECT EMR

HELP 0 NIEUWE OPDRACHT(EN) MEER INFO

OVER AFSLUITEN/VERGRENDELEN

Bezoeken en beoordelingen

Bezoek	Beoordelingen
16-05-2024 Algemeen	11:05:39 Base-FVC

Weet u zeker dat u Spirotrac wilt afsluiten?

JA NEE

EMR-TESTOPDRACHTEN OPENEN RETOURNEREN

12. In Medicom worden de gegevens geïmporteerd, **dit kan enkele seconden duren!**

Medicom - Dossier - Bloem van Test

Bestand Bekijken Beeld Dossier Financien Venster Administratie Sessie Extra Help

Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat 4208120 Beroep: Huisarts BIJEL Apotheek BL
Ellensstraat 7 pat= 6922 JA Duiven wvb= hancraats@huisartsenduiven.nl

De resultaten voor de meting van Bloem van Test zijn verwerkt in het dossier.

Acties: (Deel)contact aanmaken, Episode aanmaken, Nieuw voorschrift, Voorschrift via formulier, Voorschrift via doseeradvies, Uitslag invoeren, Bloeddruk invoeren, Protocol aanmaken, Naar VIPLive, Naar KSYOS, Naar ZorgDomein, Verwijsbrief maken, MGN bericht versturen, Naar Thuisarts.nl, Externe toepassing openen, Zorgplein openen, Etiket afdrukken

Overzichten: Patient, Administratie, Diversen, Identificatie

Dossier: Bloem van Test

Deelcontact: 1 Spirometrie

Journaalregels: OK - Nieuwe regel, OK - Nieuw deelcontact, Verwijderen

Voortgang: Verwerken bestand 1 van 1.

ICPC: Kenmerk, Code*

Opgeven, Annuleren

EJ - MT - 1370

13. Vul de gegevens in bij Specialisme, Journaalregel en Episode en klik op “Verwerken”

Medicom - Dossier - Bloem van Test

Bestand Bekijken Beeld Dossier Financien Venster Administratie Sessie Extra Help

Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat 4208120 Beroep: Huisarts BIJEL Apotheek BL
Ellensstraat 7 pat= 6922 JA Duiven wvb= hancraats@huisartsenduiven.nl

Import verwerken

Longfunctie-rapport

Algemeen Base-FVC

Naam: L van Test V
Gebdat: 01-01-2010
BSN: 6922 JA Duiven
Adres: Ellensstraat 7
6922 JA Duiven

Specialisme: FUN | functie-onderzoek

Journaalregel: Van: Spirometrie, geblazen onder eigen medicatie

Episode: 16-05-2024 | copd

Verwerken

Opgeven, Annuleren

EJ - MT - 1370

14. Klik in het volgende scherm op “Opslaan”

Medicom - Dossier - Bloem van Test

Bestand Begerken Beeld Dossier Financien Venster Administratie Sessie Extra Help

Zoeken... (Ctrl+Shift+F)

Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep: Huisarts: EIKEL Apotheek: BL
Eltensestraat 7 pat= 6922 JA Duiven wwb= Betaler: P 4208120 lvandecraats@huisartsenduiven.nl

De resultaten voor de meting van Bloem van Test zijn verwerkt in het dossier.

LSP opt-in: Geen antwoord LSP: Niet aangemeld

Acties: (Deel)contact aanmaken, Episode aanvullen, Nieuw voorschrift, Voorschrift via formulier, Voorschrift via doseeradvies, Uitslag invoeren, Bloeddruk invoeren, Protocol aanmaken, Naar VIPLive, Naar KSYOS, Naar ZorgDomein, Verwijsbrief maken, MGN bericht versturen, Naar Thuisarts.nl, Externe toepassing openen, Zorgplein openen, Etiket afdrukken

Overzichten: Patient, Administratie, Diversen, Identificatie

Dossier: Bloem van Test

EJ - MT - 1370

15. Klik op “OK”

Medicom - Dossier - Bloem van Test

Bestand Begerken Beeld Dossier Financien Venster Administratie Sessie Extra Help

Zoeken... (Ctrl+Shift+F)

Bloem van Test (14 jaar) 01-01-2010/V Pat: 4208120 Beroep: Huisarts: EIKEL Apotheek: BL
Eltensestraat 7 pat= 6922 JA Duiven wwb= Betaler: P 4208120 lvandecraats@huisartsenduiven.nl

RVM opt-in: Geen antwoord LSP opt-in: Geen antwoord LSP: Niet aangemeld

Acties: (Deel)contact aanmaken, Episode aanvullen, Nieuw voorschrift, Voorschrift via formulier, Voorschrift via doseeradvies, Uitslag invoeren, Bloeddruk invoeren, Protocol aanmaken, Naar VIPLive, Naar KSYOS, Naar ZorgDomein, Verwijsbrief maken, MGN bericht versturen, Naar Thuisarts.nl, Externe toepassing openen, Zorgplein openen, Etiket afdrukken

Overzichten: Patient, Administratie, Diversen, Identificatie

Dossier: Bloem van Test

EJ - MT - 1370

16. De gegevens zij nu via F6 en F11 terug te vinden in Medicom

Voorkomende problemen:

- A.** Als de spirometrie uitslag niet binnenkomt in Medicom, kan dit komen t.g.v. het niet goed uitvoeren van de stappen. Hierdoor kan het zijn dat er een order is blijven “hangen”. Voer dan onderstaande stappen uit om dit op te lossen.
- B.** Open de “Connect software”, welke meestal op het bureaublad staat. En klik op “Bestellingen”

LET OP! KIK GOED OF JE IN HET TABBLAD BESTELLINGEN HEBT GEOPEND

Vitalograph Connect 1.10.56

Connect 1.10.56

EMR-systemen

Bestellingen

Retourzendingen

Beveiliging

Instellingen

Over

Bestellingen/terugroepingen

Totaal aantal mislukte bestellingen 1, Laatste mislukte order: 11/3/2025 5:15:51 PM

Foutbericht bekijken

Filteren

Type:	Testtype	Besteld	Testpers	Status	Acties
Bestelling	Spirometrie	4-nov-2025 16:20:45	04112025	In behandeling	✖
Bestelling	Spirometrie	3-nov-2025 17:17:00	031124	Geannuleerd	✖
Bestelling	Spirometrie	30-okt-2025 11:44:15	11874	Geannuleerd	✖
Bestelling	Spirometrie	28-okt-2025 09:10:03	11874	Geannuleerd	✖
Bestelling	Spirometrie	28-okt-2025 09:04:53	11874	Geretourneerd	✖

< 1 2 >

LET OP! KLIK NIET OP HET RODE PRULLEBAKJE ACHTER MEDICOM!

Vitalograph Connect 1.10.56

Connect 1.10.56

EMR-systemen

Bestellingen

Retourzendingen

Beveiliging


EMR-systemen

Ongewenste retourzendingen toestaan
Uitgeschakeld

+ Toevoegen

ID	Gemaakt op	Protocol	Acties
Medicom	16-dec-2024 14:39:42	HL7 2.6	✖

- C. Kijk of er een order in de rij staat welke nog in behandeling is, en sluit deze order m.b.v. het vel rode kruis achter de order.

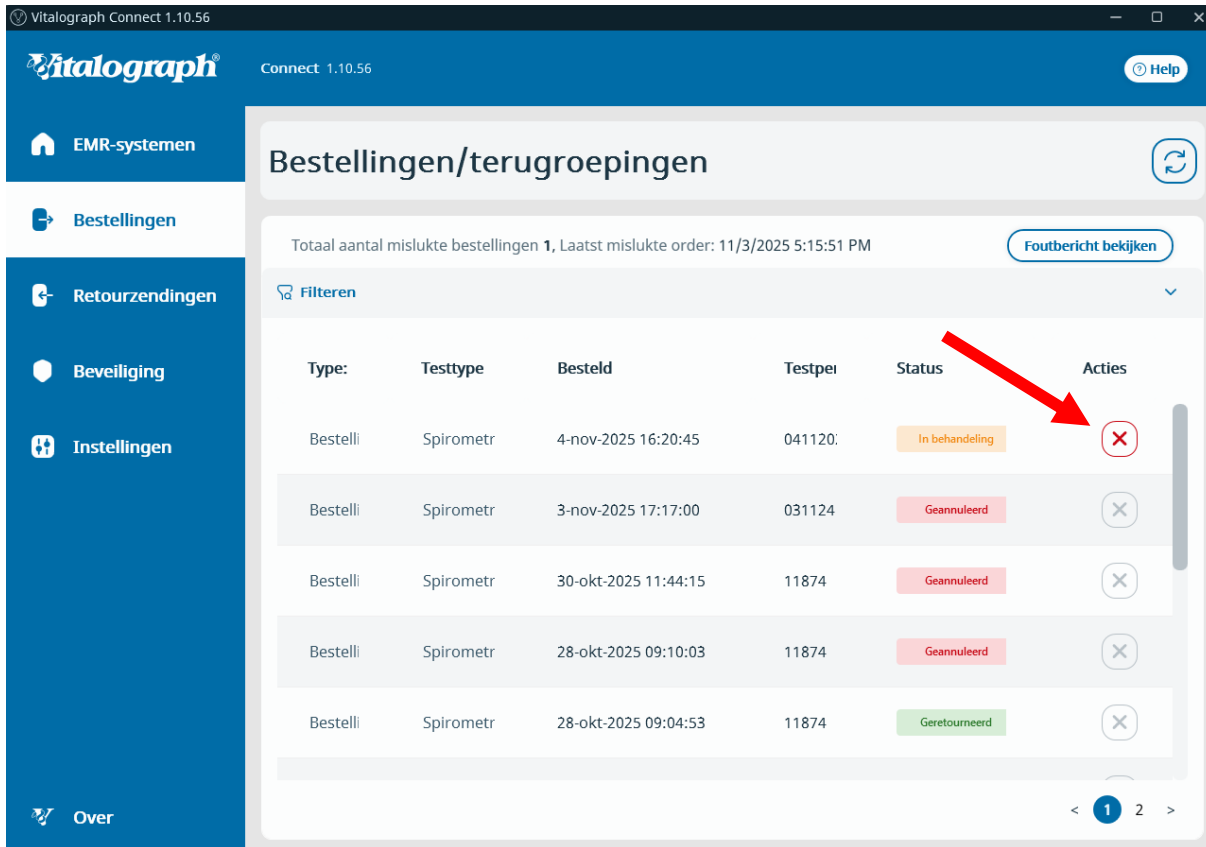

Vitalograph Connect 1.10.56

Connect 1.10.56

EMR-systemen

Bestellingen

Retourzendingen

Beveiliging

Instellingen

Over

Bestellingen/terugroepingen

Totaal aantal mislukte bestellingen 1, Laatst mislukte order: 11/3/2025 5:15:51 PM [Foutbericht bekijken](#)

Filteren

Type:	Testtype	Besteld	Testpe	Status	Acties
Bestelli	Spirometr	4-nov-2025 16:20:45	041120:	In behandeling	
Bestelli	Spirometr	3-nov-2025 17:17:00	031124	Geannuleerd	
Bestelli	Spirometr	30-okt-2025 11:44:15	11874	Geannuleerd	
Bestelli	Spirometr	28-okt-2025 09:10:03	11874	Geannuleerd	
Bestelli	Spirometr	28-okt-2025 09:04:53	11874	Geretourneerd	

< 1 2 >

- D. Klik op **Bevestigen**



Order annuleren

Deze actie is onomkeerbaar.

Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

Bevestigen Annuleren

- E. Om de spirometrieuitslag alsnog te retourneren naar Medicom, Volg Stap1 en Stap 2, En kik daarna direct op "RETOURORDER" (stap 7) en zet een vinkje bij het desbetreffende onderzoek. De spirometrie wordt alsnog verzonden naar Medicom