
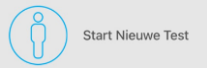
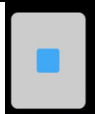


Verkorte handleiding Norav Mobile ECG App.

1.		Start de Norav App
2.		Plak de ECG elektroden (zie evt. uitleg op de achterkant van deze pagina)
3.		Kik op "Start Nieuwe Test" en voor de patiënt gegevens in. En kik op "Start"
4.		De ECG (opname) start nu vanzelf.
6.		Wacht minstens 10sec. Klik op stop als het ECG signaal stabiel / netjes is.
7.		Er wordt automatisch een PDF van het ECG gemaakt en opgeslagen.
		
8.		Klik op dit icoontje om het ECG als PDF per mail te versturen
9.		Klik op het deurtje om het Scherm te verlaten.
10.		ECG verwijderen van de Tablet.

Referentiekaart voor plaatsen ECG electrodes

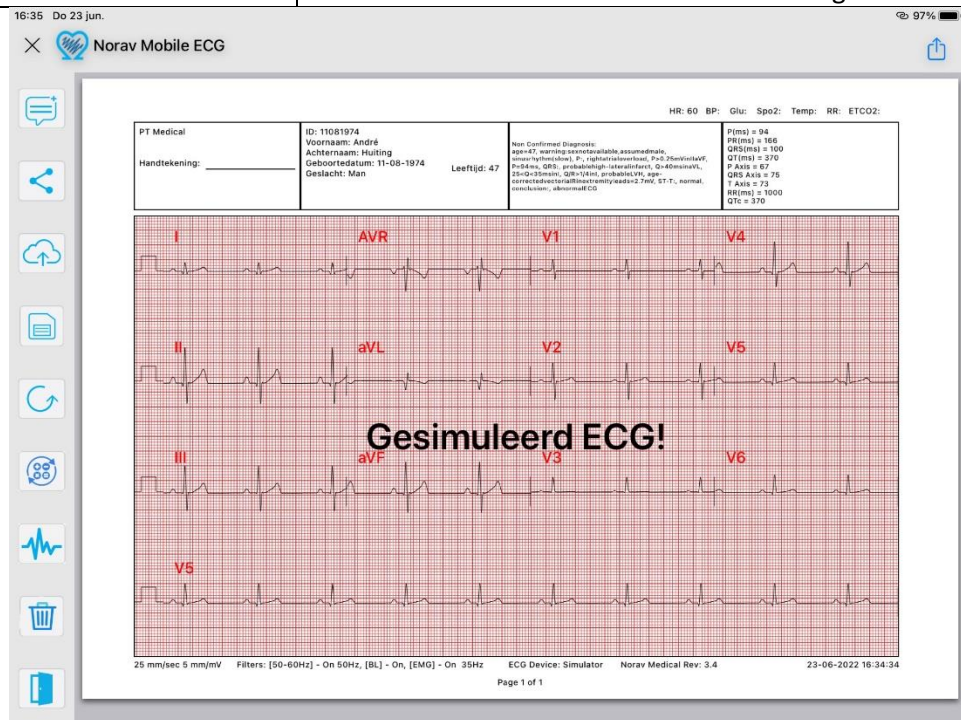