
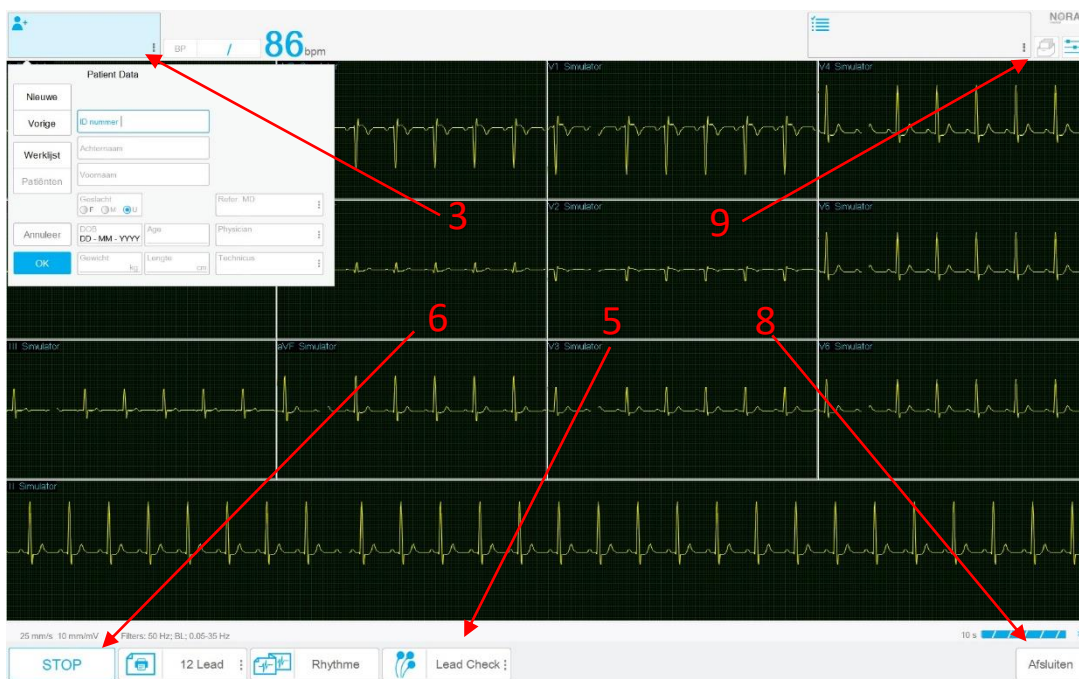
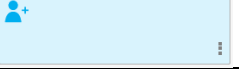


Verkorte handleiding PC-ECG software.

1.		Start het ECG systeem.
2.		Plak de ECG elektroden (zie evt. uitleg op de achterkant van deze pagina)

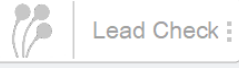

3.		Klik linksboven en voer de patiëntgegevens in. Vervolgens met OK bevestigen.
4.		De ECG (opname) start nu vanzelf.
5.		Klik op "leadcheck" om te kijken of alle afleidingen goed signaal hebben.
6.		Wacht minstens 10sec. Klik op stop als het ECG signaal stabiel / netjes is.
7.		Er wordt automatisch een PDF van het ECG gemaakt en opgeslagen.
8.		Sluit vervolgens de software via de knop afsluiten.
9.		Klik op de kaartenbak om naar de ECG Database te gaan.

Referentiekaart voor plaatsen ECG electrodes

