

Backup maken en importeren (nieuwe PC)

- Installeer Database Studio op de (oude) PC waar de database op staat om een Back-up te maken.
- Database Studio is te downloaden vanaf onze website:
<https://www.pt-medical.nl/service/software-handleidingen/?folder=%5CLeveranciers%5CVitalograph%5CSoftware%5CDatabase+Studio>

Open Database Studio

- Ga naar BACK-UP DATABASE en kies bij Server de juiste server door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Kies de juiste Database door op het pijltje naar beneden te klikken.
- **Kies bij Back-up locatie voor de C:\Temp map!**
- Kopieer het Back-up bestand naar een USB-Stick

Spirotrac® Database Studio

GEGEVENS MIGREREN

GEGEVENS IMPORTEREN

DATABASE MAKEN

DATABASE UPGRADEN

BACK-UP DATABASE

DATABASE HERSTELLEN

INSTELLINGEN

OVER

HELP

SOFTWAREVERSIE
6.13.38

NAAM SYSTEEM
TESTOMGEVING2

Back-up maken van database

• Zorg ervoor dat alle open verbindingen met de database zijn gesloten.

Server (Server\exemplaar)
TESTOMGEVING2\SPIROTRAC

Verificatie
☒ Windows ☐ SQL

Database
Spirotrac6

Back-uplocatie
C:\Temp

BACK-UPLOCATIE

Een andere locatie dan "C:\Temp" kan foutmeldingen veroorzaken !!


BACK-UP

Nieuwe Computer

- Installeer Spirotrac volledig inclusief een SQL database op een (nieuwe) PC.
Spirotrac is hier te downloaden:
<https://www.pt-medical.nl/service/software-handleidingen/?folder=%5CLEveranciers%5CVitalograph%5CSoftware%5CVolledige+installatie+incl+SQL%2Dserver>
- Start na installatie Spirotrac om te kijken of de software functioneert en de SQL-Database goed is geïnstalleerd.
- Installeer Database Studio op de (nieuwe PC)
- Plaats de USB stick met de back-up in de nieuwe PC
- Kopieer het Back-up bestand naar de C:\Temp op de nieuwe PC

Open Database Studio

- Klik op DATABASE HERSTELLEN
- Kies de server door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Bedenk een naam voor de Database bv Spirotrac66 (**geen Spirotrac6 gebruiken!**)
- Kies bij Back-upbestand voor C:\Temp en dan het back-up bestand.
- Klik op HERSTELLEN (Er komt een melding dat de databse met succes is aangemaakt)

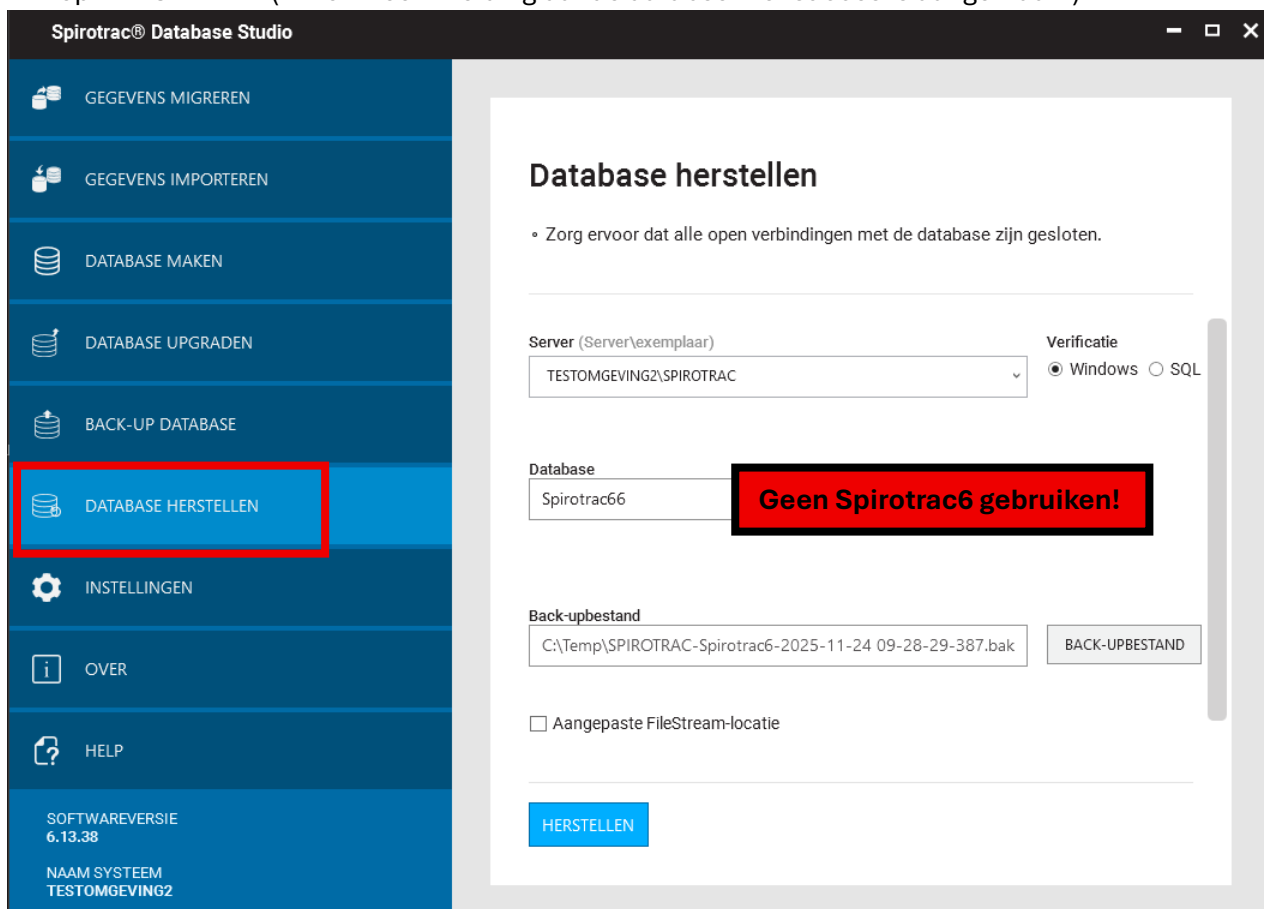

Spirotrac® Database Studio

GEGEVENS MIGREREN

GEGEVENS IMPORTEREN

DATABASE MAKEN

DATABASE UPGRADEN

BACK-UP DATABASE

DATABASE HERSTELLEN

INSTELLINGEN

OVER

HELP

SOFTWAREVERSIE
6.13.38

NAAM SYSTEEM
TESTOMGEVING2

Database herstellen

• Zorg ervoor dat alle open verbindingen met de database zijn gesloten.

Server (Server\exemplaar)
TESTOMGEVING2\SPIROTRAC

Verificatie
☒ Windows ☐ SQL

Database
Spirotrac66

Geen Spirotrac6 gebruiken!

Back-upbestand
C:\Temp\SPIROTRAC-Spirotrac6-2025-11-24 09-28-29-387.bak


BACK-UPBESTAND

☐ Aangepaste FileStream-locatie


HERSTELLEN

Open Spirotrac

- Ga naar INSTELLINGEN en daarna naar DATABASE
- Klik op het + teken

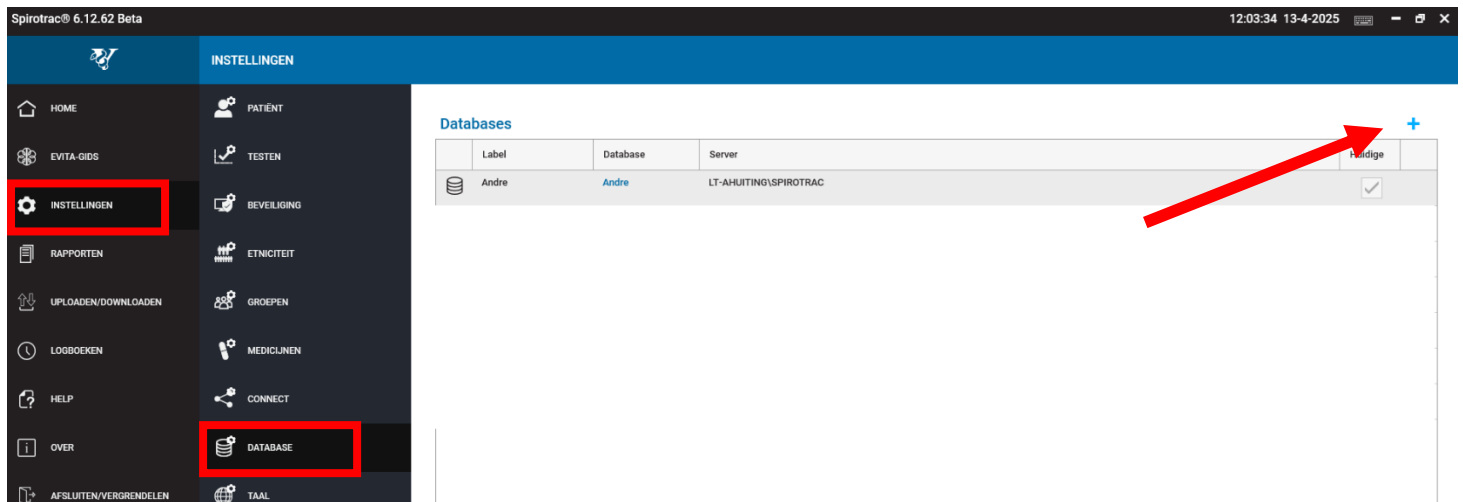

- Kies de juiste server en klik op VERBINDEN

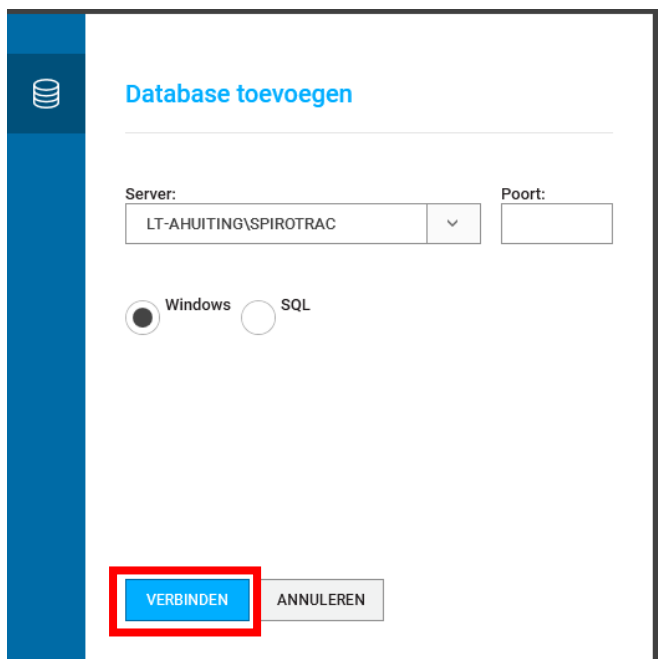

- Kies de juiste Database door op het kleine pijltje naar beneden te klikken.
- Geef de Database een Label (bv Backup)
- Klik op HERSTELLEN
- De (Back-up) database wordt toegevoegd bij de Databases.

Database toevoegen

Server: LT-AHUITING\SPIROTRAC
Poort: -
WIJZIGEN

Database:
Spirotrac66

Label:
BackUP

HERSTELLEN ANNULEREN

- Zet een vinkje achter de toegevoegde (Back-up) database en klik op JA

Spirotrac® 6.12.62 Beta 21:38:27 10-4-2025

INSTELLINGEN

HOME PATIENT
EVITA-GIDS TESTEN
INSTELLINGEN BEVEILIGING
RAPPORTEN ETNICITEIT
UPLOADEN/DOWNLOADEN GROEPEN
LOGBOEKEN MEDICIJNEN
HELP CONNECT
OVER DATABASE
AFSLUITEN/VERGRENDELEN TAAL

Databases

Label	Database	Server	Huidige
Andre	Andre	LT-AHUITING\SPIROTRAC	☐
Standaard	Spirotrac6	\Spirotrac	☒

Huidige database wijzigen
De toepassing wordt afgesloten en de wijzigingen worden van kracht de volgende keer dat u de toepassing uitvoert. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

JA NEE

Spirotrac sluit af en start daarna Spirotrac weer op. Spirotrac is nu verbonden met de Back-up database.

Stel Spirotrac goed in met de juiste instellingen, zie eventueel hiervoor dit document:

https://www.pt-medical.nl/download/Handleidingen%20Vitalograph/Screenshots%20standaard%20instellingen_wi-24-08.pdf