


Installatie Spirotrac 6:

1

Plaats USB Stick in de PC


2

Dubbel klik op “setup”

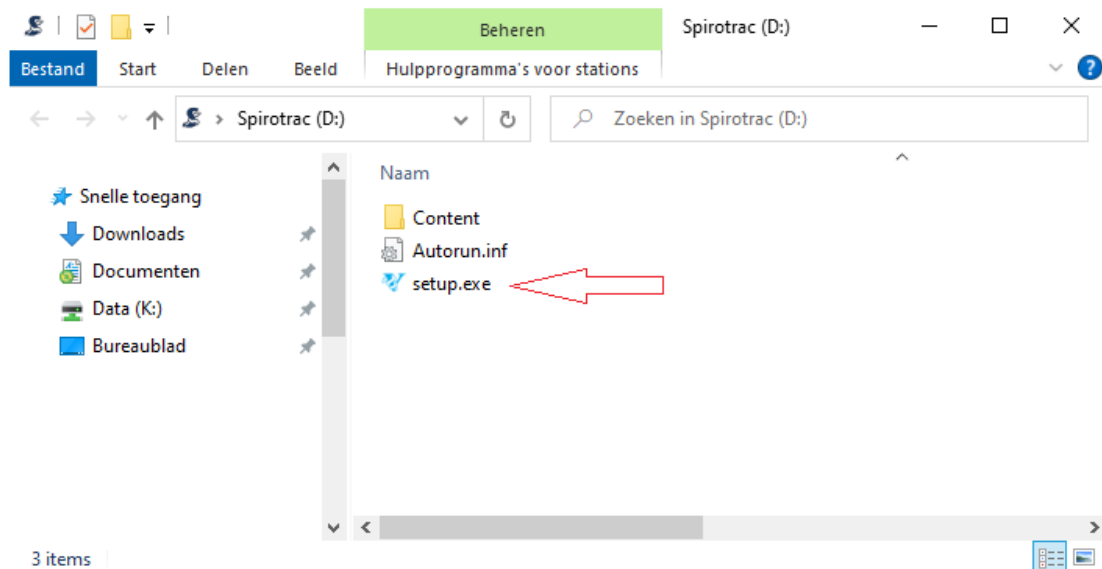

3

Klik op “Spirotrac installeren”

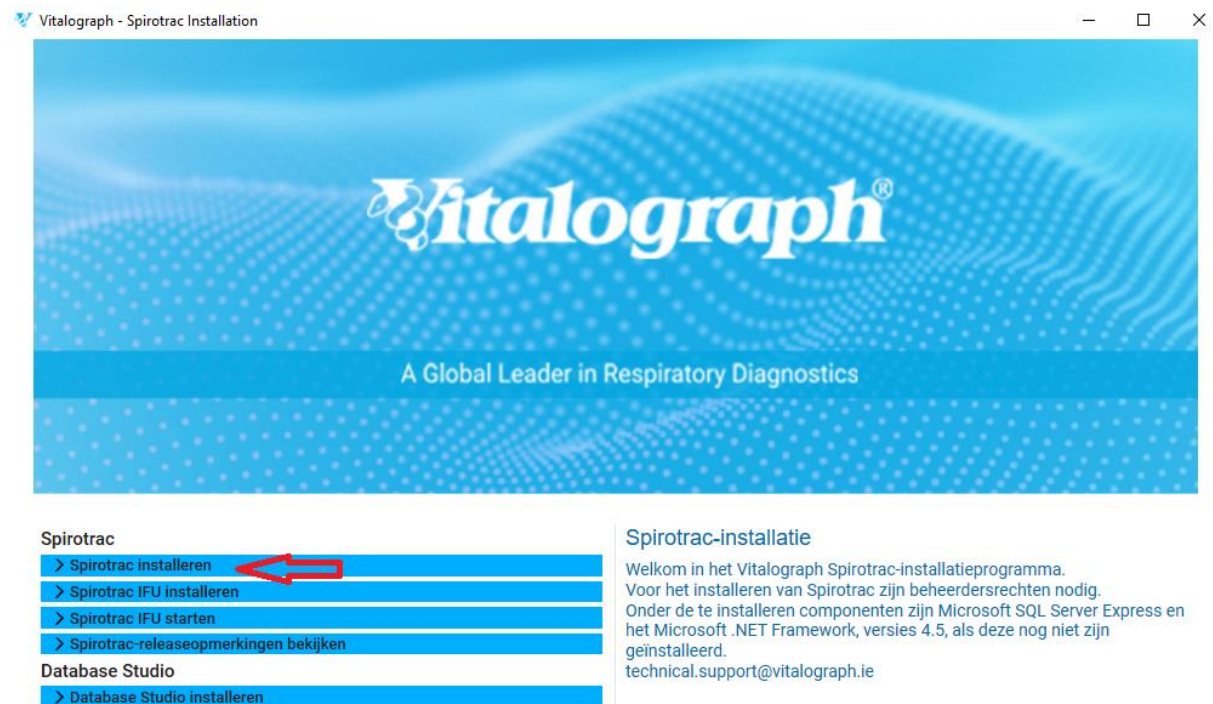

4

Klik op “Volgende”




5

Klik op “Volgende”




6

Klik op "Volgende"

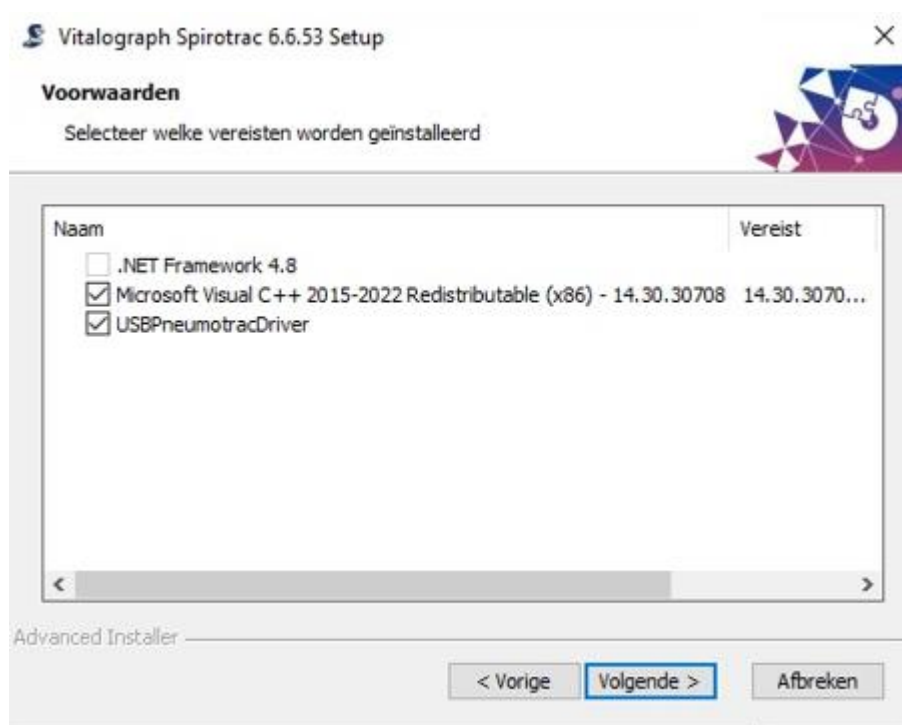


7

Accepteer de voorwaarden en klik op "Volgende"

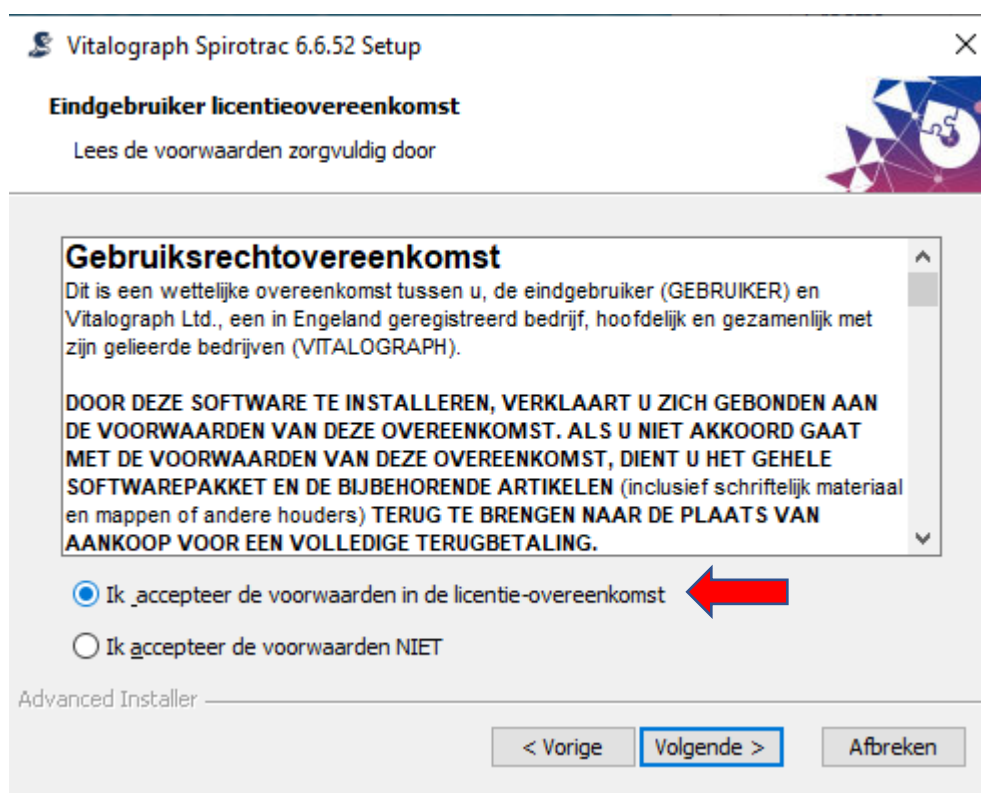


8

Klik op “Volgende”

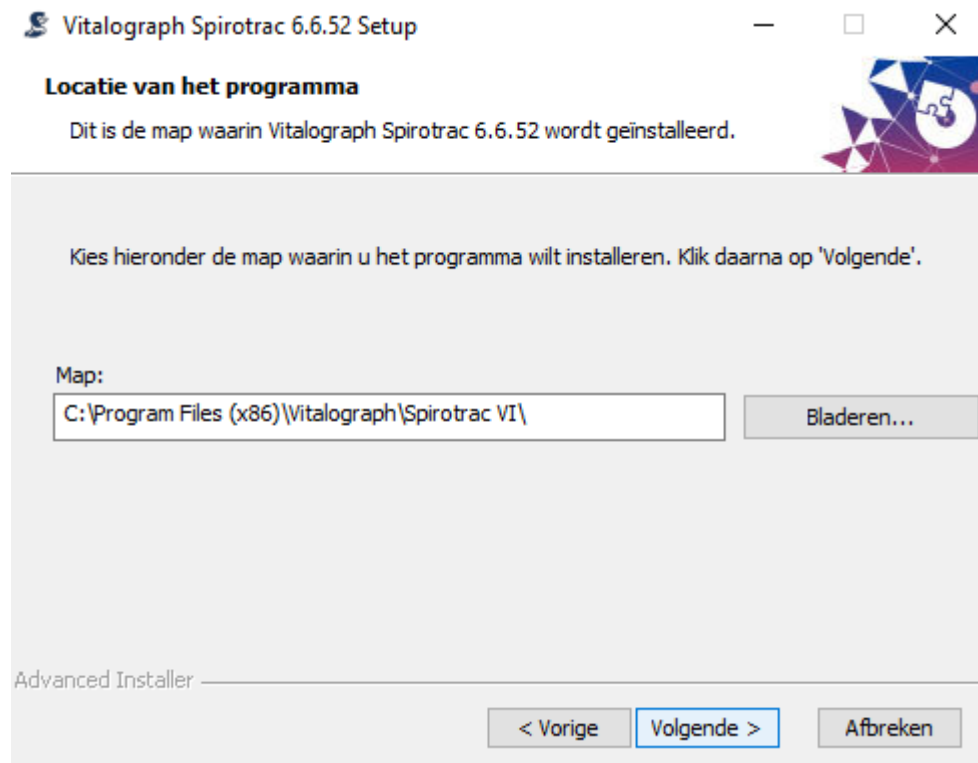


9

Klik op “installeren”

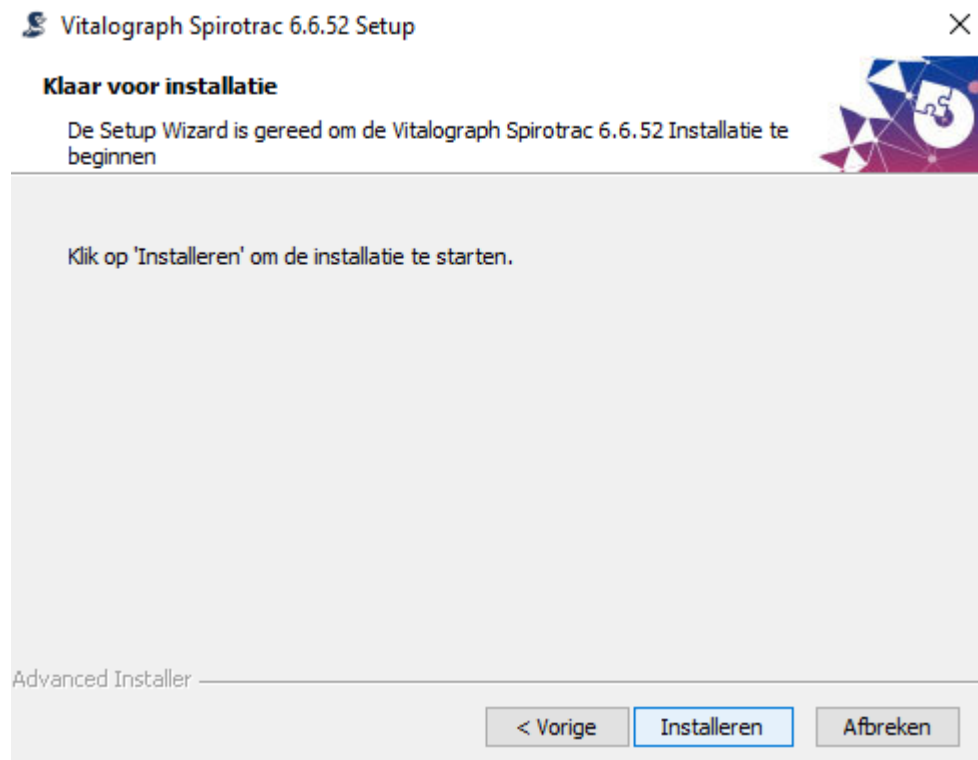

10

Er verschijnt een tweede venster; Selecteer “Spirotrac gebruiken met lokale en netwerkdatabases SQL server wordt geïnstalleerd” en klik op “DOORGAAN”

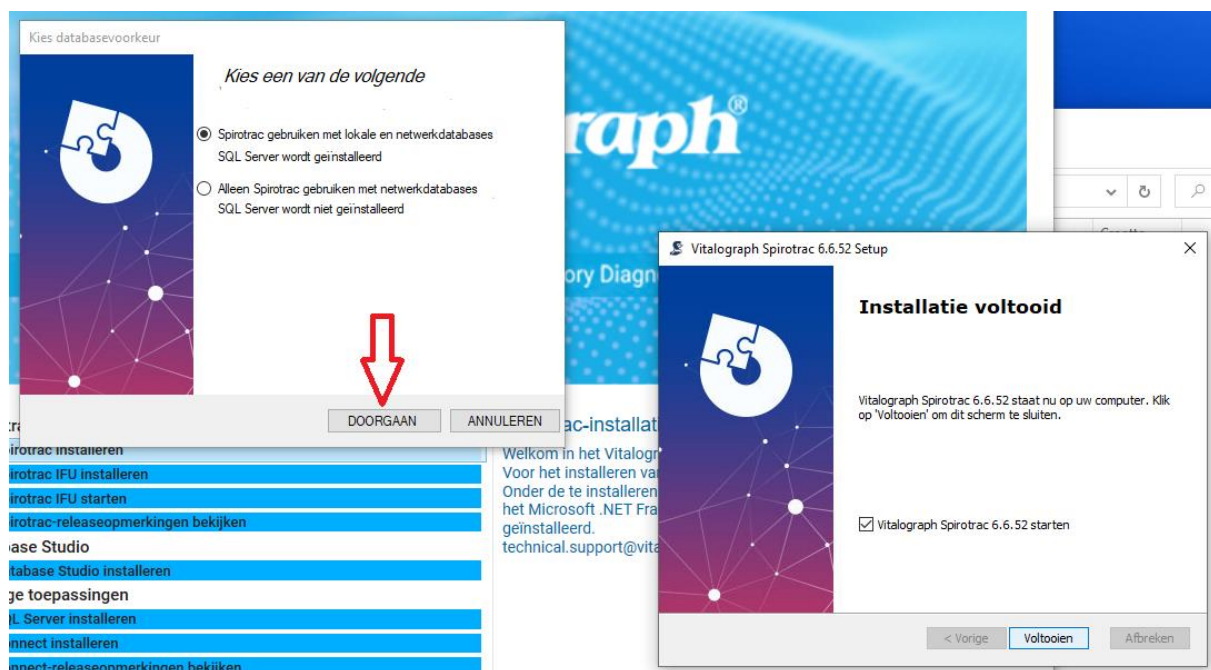

11

Klik op “Voltooien”



12

Kies voor "STANDAARDDATABASE"

Database kiezen

STANDAARDDATABASE
Spirotrac gebruikt een standaard lokale database.

AANGEPASTE DATABASE
Kies een lokale of netwerkdatabase die Spirotrac zal gebruiken.

13

Vul onderstaande gegevens in (onthoud deze goed!)
En klik op "Verder"

Locatie

Naam
[]

De naam wordt in alle rapporten weergegeven.

Beheerder

Gebruikersnaam
[]

Beveiligingsvragen
[]

Antwoord
[]

Wachtwoord
[]

Wachtwoord bevestigen
[]

Het wachtwoord moet ten minste 8 tekens bevatten, waaronder HOOFDLETTERS, kleine letters en cijfers.

Welkom

Neem even de tijd om uw Spirotrac-exemplaar in te stellen.

Verder Annuleren

14 Log in met de aangemaakte gegevens

Aanmelden bij Spirotrac

15:47:01

PT Medical




Gebruikersnaam

Wachtwoord

[Aanmelden](#)


[Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten](#)

15 **Optioneel:** Schakel de inlog optie uit: Ga naar "INSTELLINGEN" en dan naar "BEVEILIGING"

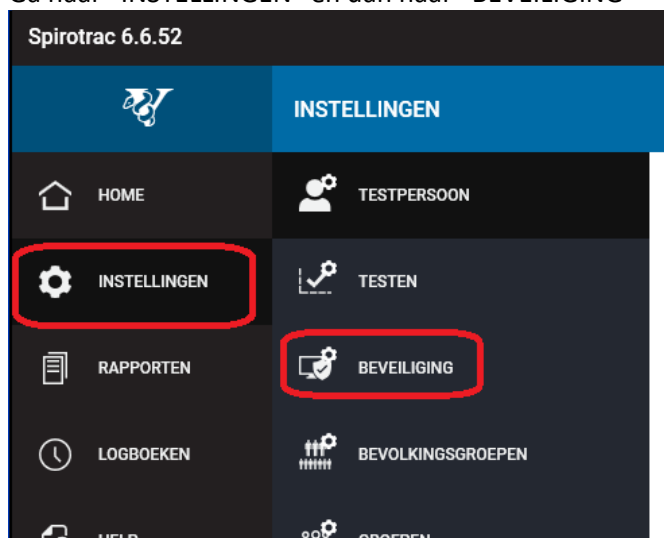


16

Bij “GEBRUIKERS” de beveiliging uitschakelen:
De software wordt nu afgesloten.

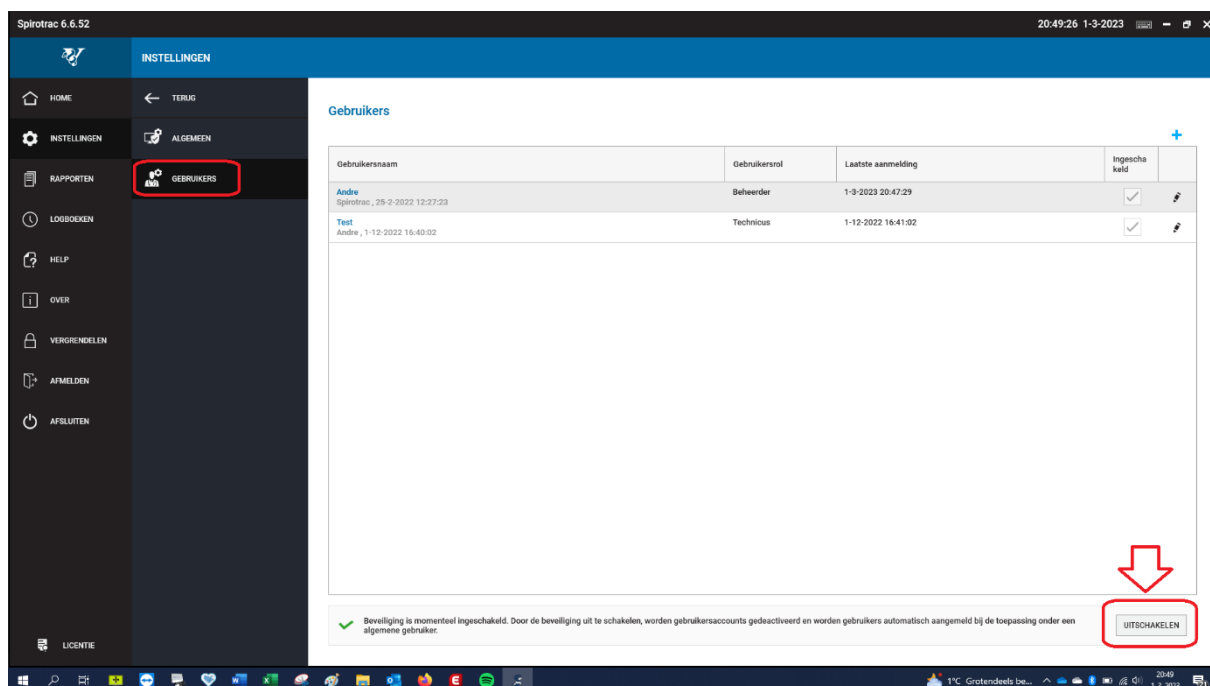


17

Start Spirotrac opnieuw op

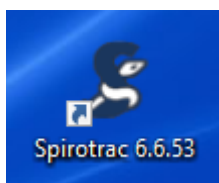

18

Klik links onderin op Licentie en vervolgens op de link “register spirotrac” in de popup

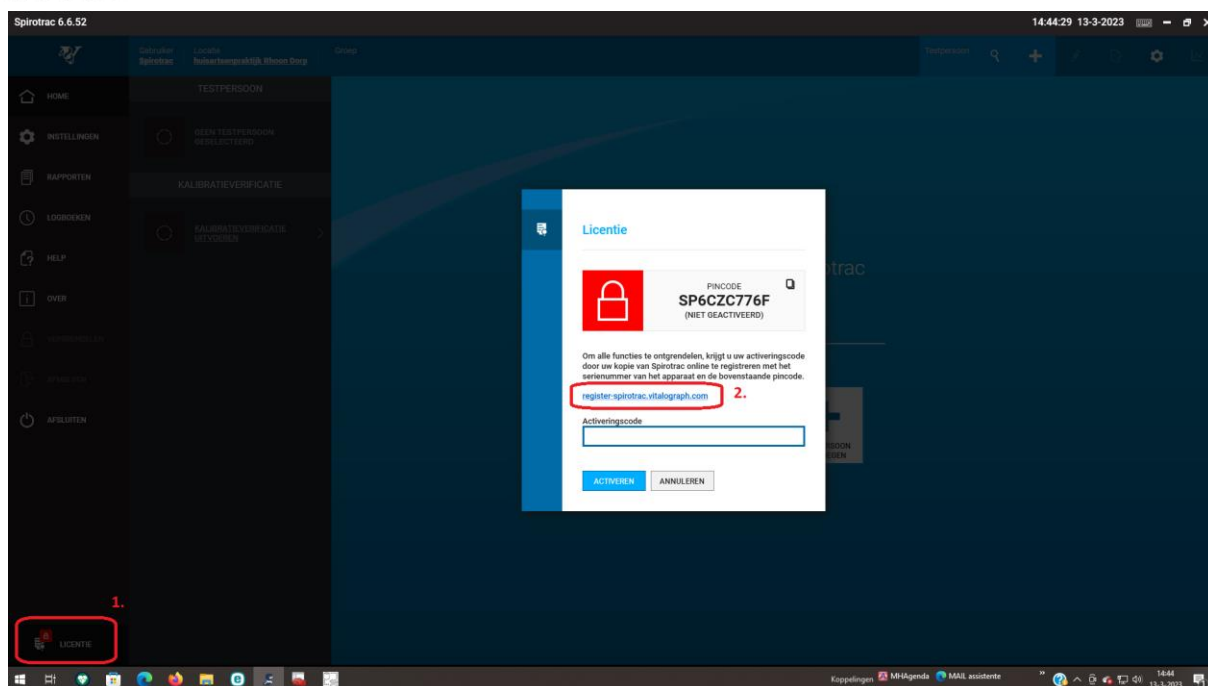

19

De software opent de website van Vitalograph.com
Klik op "Launch software activation Tool"

Spirotrac 6 Software Activation

This tool is used to activate Vitalograph Spirotrac 6 software to unlock all features of the product and download software updates.

To proceed and obtain an activation code, you will need to create a **Vitalograph account**. After creating your account you must register your **device serial number** first followed by your **Spirotrac PIN**.

LAUNCH SOFTWARE ACTIVATION TOOL



Find your device serial number

The serial number is 2 letters followed by 5 digits and is located on the product label on the device.

Find your Spirotrac PIN

1. Open Spirotrac 6.
2. Select the license icon at the bottom of the screen.
3. The PIN is displayed in the License window.

Once you have the activation code proceed as follows:

1. Open Spirotrac 6.
2. Select the license icon at the bottom of the screen.
3. Enter the activation code in the text box provided.
4. Click the "Activate" button.

20

Kik op Nieuw account aanmaken
(Indien er al een account is aangemaakt vul de inlog gegevens in en klik op "Inschrijven")

Inschrijven



E-mail

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

 [Nieuw account aanmaken](#)

21 Vul de gevraagde gegevens in en klik op registreren.

Registreren

E-mail

Wachtwoord

Wachtwoord bevestigen

Voornaam

Achternaam

Organisatie

Land

Captcha

☐ Akkoord gaan met dienstvoorwaarden

☐ Houd me op de hoogte van de Vitalograph-producten en -diensten

[Inschrijven](#) [Registreren](#)

22 Vul het nummer (Token) in welke gestuurd is naar het ingevulde email adres.

E-mailbevestiging

✓ Volg de instructies in de e-mail om de registratie te voltooien. Indien u geen e-mail hebt ontvangen, kijk dan in uw junk- of spammap.

Voer de naar uw e-mailadres verzonden code in om de registratie te voltooien

Token

[Token opnieuw verzenden](#) [E-mail bevestigen](#)

23

Log opnieuw in.

Inschrijven



E-mail

email@example.com

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

[Nieuw account aanmaken](#)

Inschrijven

24

Als extra beveiliging wordt er opnieuw een code verzonden naar het opgegeven email adres. Voor deze code in en zet eventueel een vinkje voor "Apparaat onthouden". Dan wordt er niet weer om een code gevraagd bij het opnieuw aanmelden op deze PC.

Voer code in

Voer de code in die naar u is gemailld om het inloggen te voltooien.

Code

Apparaat onthouden


☐

[Terug](#) | [Code nogmaals versturen](#)

Verifiëren

Vitalograph Account v1.1.536 © Vitalograph

25

Vul het serienummer van de spirometer in, deze is te vinden aan de onderkant van de spirometer of op de doos.

Vul de pincode in van de software, deze is te vinden in de software.

Kopieer deze code door op het vierkantje te klikken (rode pijl)

Software activeren

Voer het serienummer van het apparaat in.

Serie-

Voer de PINCODE van de software in.

PINCODE

[Terug naar producten](#) [activeren](#)

Licentie

Pincode kopiëren

PINCODE
SP6CZC77
(NIET GEACTIVEERD)

Om alle functies te ontgrendelen, krijgt u uw activeringscode door uw kopie van Spirotrac online te registreren met het serienummer van het apparaat en de bovenstaande pincode.

register-spirotrac.vitalograph.com

Activeringscode

[ACTIVEREN](#) [ANNULEREN](#)

26

Kopieer de activeringscode

Account | Vitalograph

Account Profile Producten

Producten

Product	Serie-	Geregistreerd	Activeringscode Downloaden
Spirotrac 6	SP6CZC77	13-Mar-2023	
Pneumotrac 5	PV107		

« < 1 > »

Software activeren

Voer de code in om dit product te activeren wanneer dat gevraagd wordt.

Activeringscode


[Activeringscode kopiëren](#)

[Software activeren](#) [Apparaat registreren](#)

[Terug naar producten](#)

27

Open de Spirotrac software.
Plak de activeringscode en klik op "ACTIVEREN"

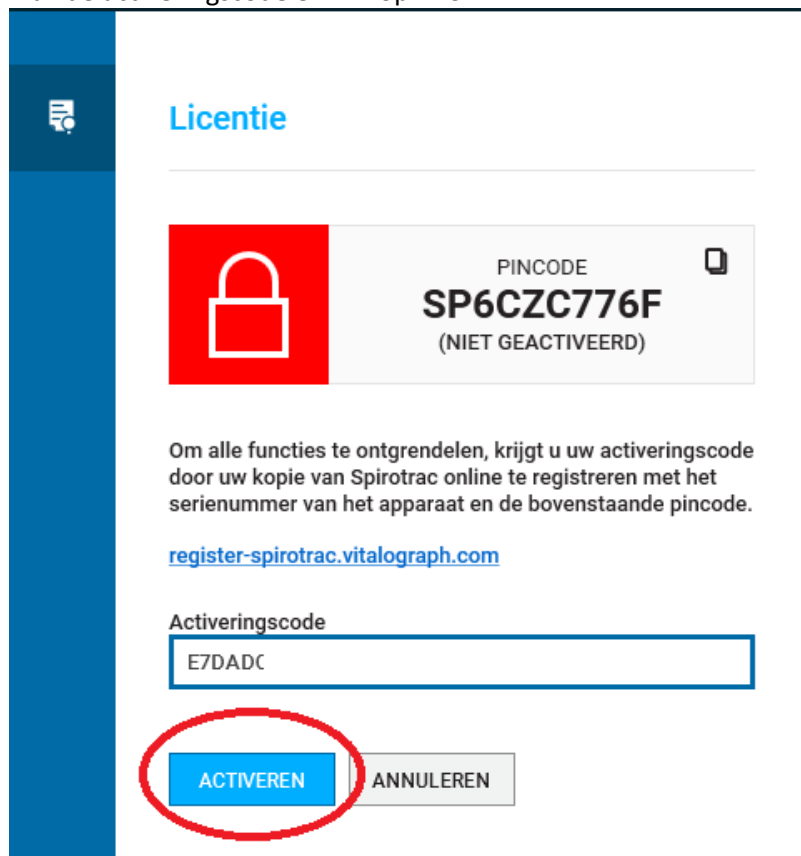

Licentie

 PINCODE 
SP6CZC776F
(NIET GEACTIVEERD)

Om alle functies te ontgrendelen, krijgt u uw activeringscode door uw kopie van Spirotrac online te registreren met het serienummer van het apparaat en de bovenstaande pincode.

register-spirotrac.vitalograph.com

Activeringscode
E7DADC

ACTIVEREN ANNULEREN