


USB driver niet geïnstalleerd:


- 1 Indien de spirometer is aangesloten en hij wordt niet gevonden door de software kan het zijn dat de driver niet juist is geïnstalleerd.

- 2 Ga naar Apparaatbeheer door de Windows-toets en op de X tegelijk in te drukken en kies voor Apparaatbeheer

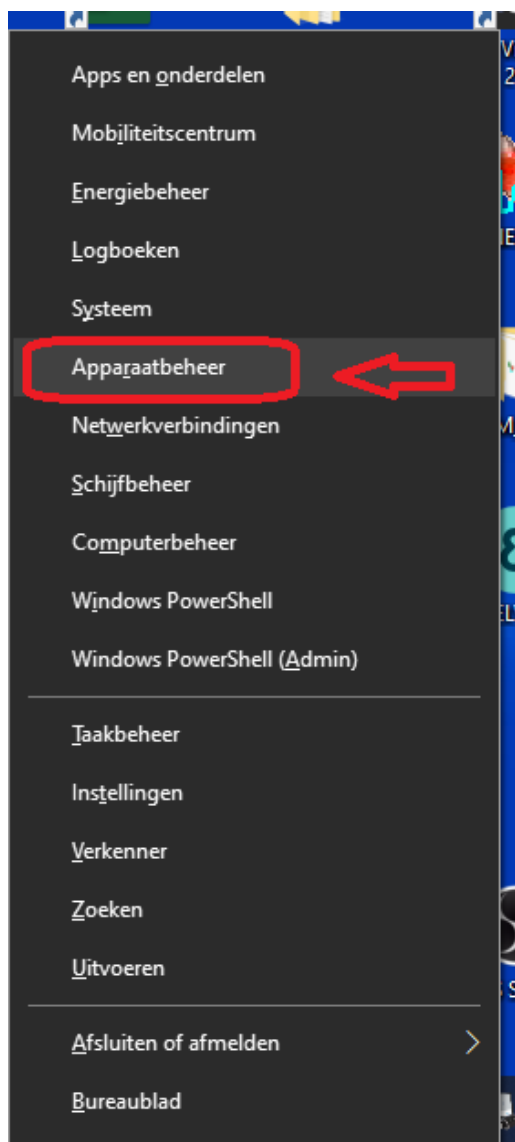


3

Klik rechts op "Vitalograph USB Pneumotrac"

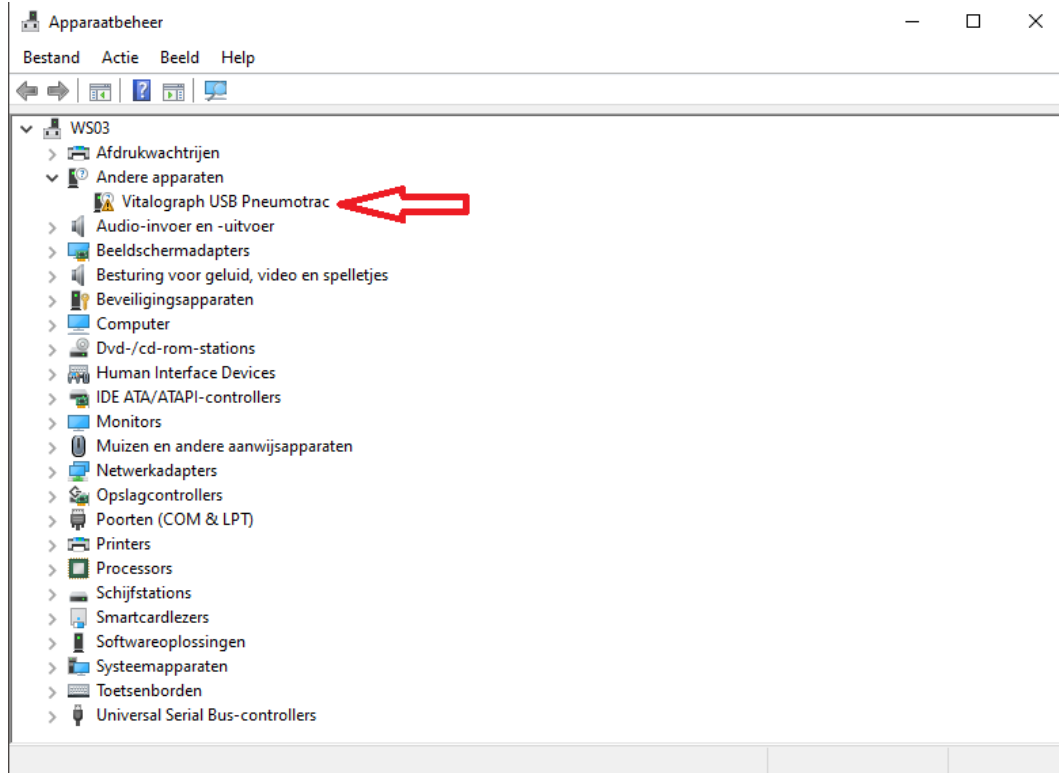

4


Klik op Stuurprogramma bijwerken

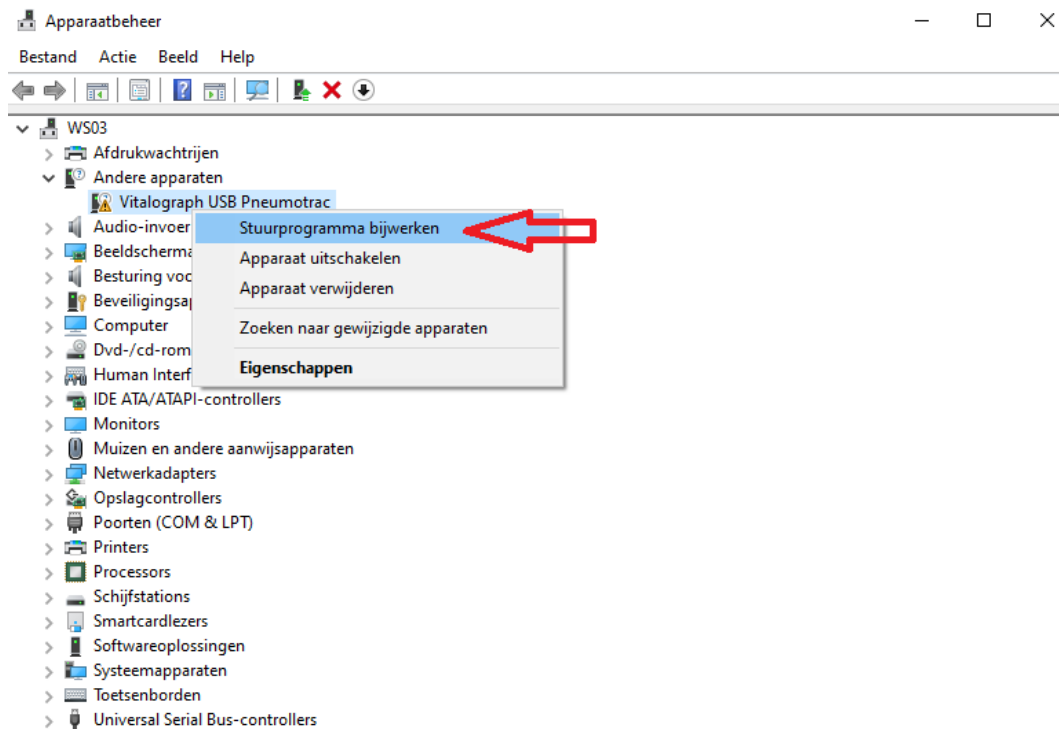

Hiermee wordt de wizard Stuurprogramma bijwerken voor het geselecteerde apparaat gestart.


5

Klik op "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken"

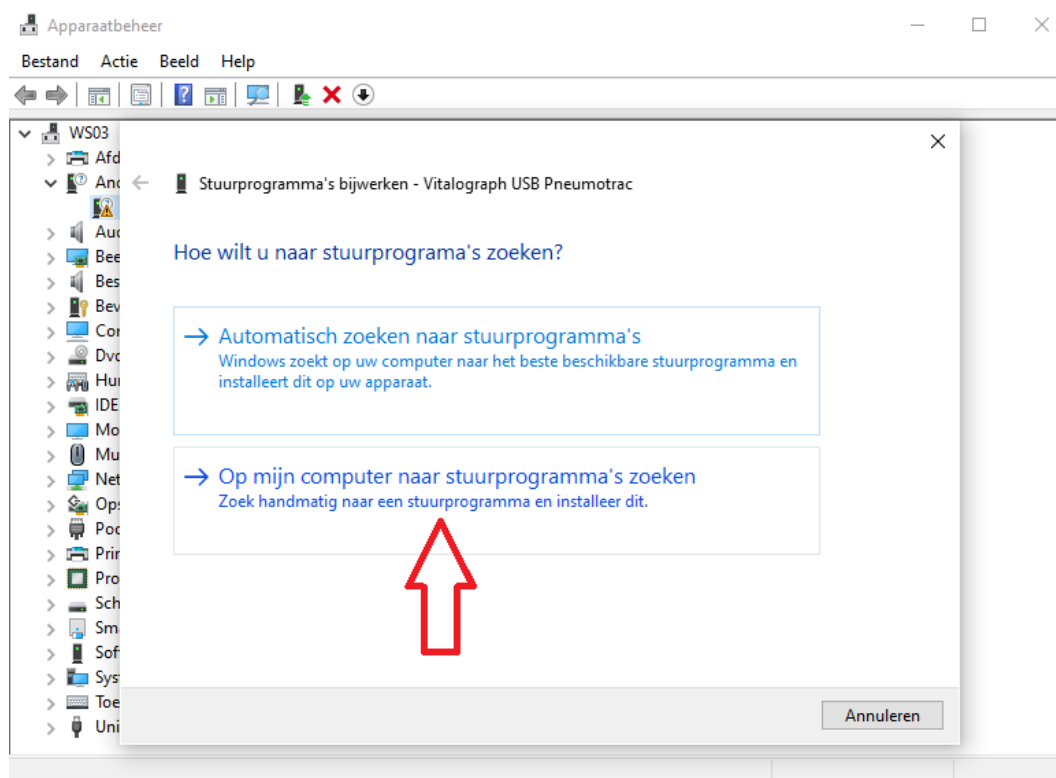


6

Klik op Bladeren en kies de locatie: C:\Program Files (x86)\Vitalograph en klik op "Volgende"

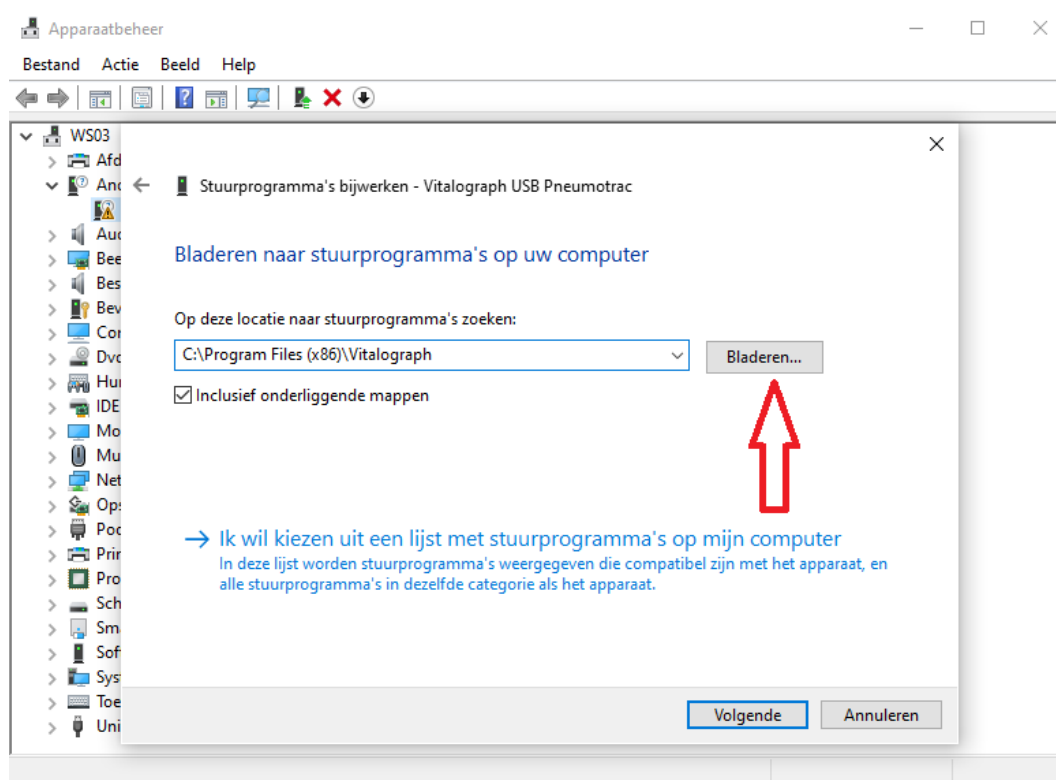


7

Klik op “Sluiten”

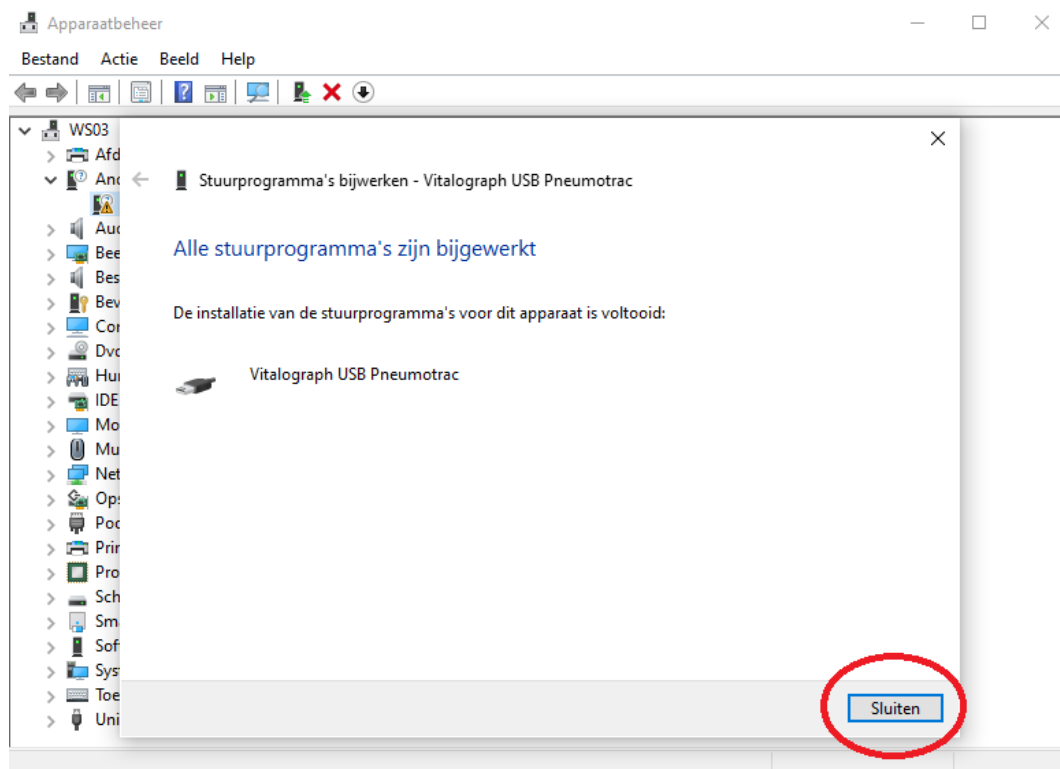


8

Klik rechts op “USB Serial Port” en klik op Stuurprogramma bijwerken

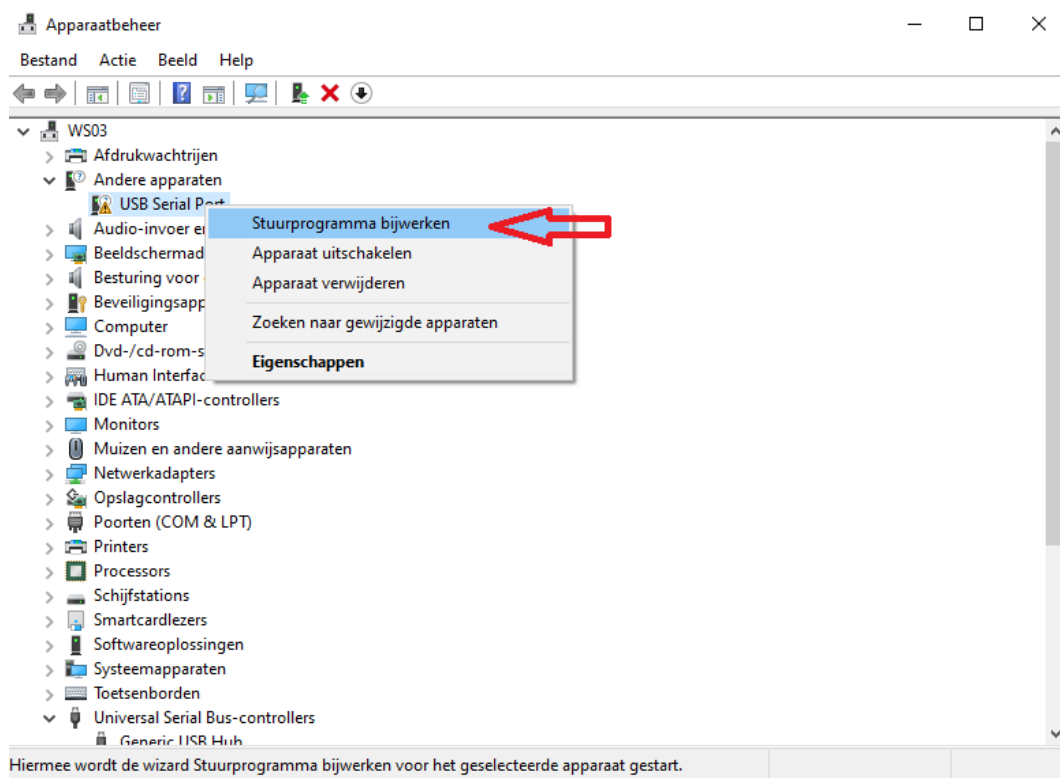


9

Klik op "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken"

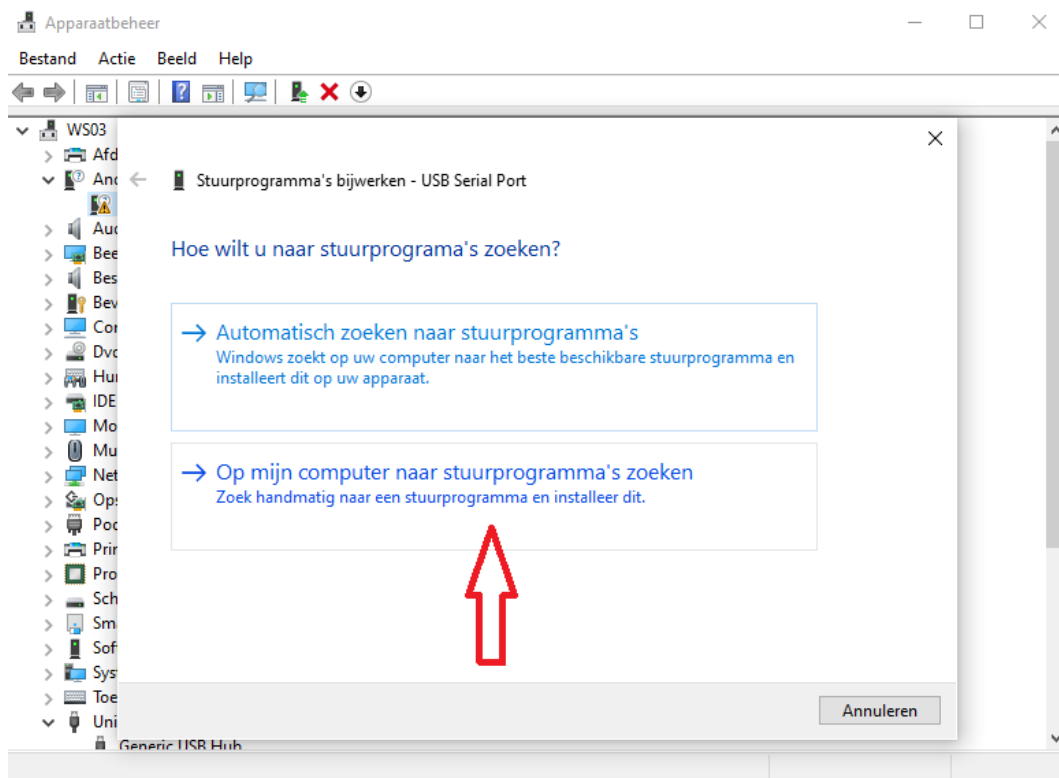

10

Klik op Bladeren en kies de locatie: C:\Program Files (x86)\Vitalograph en klik op "Volgende"

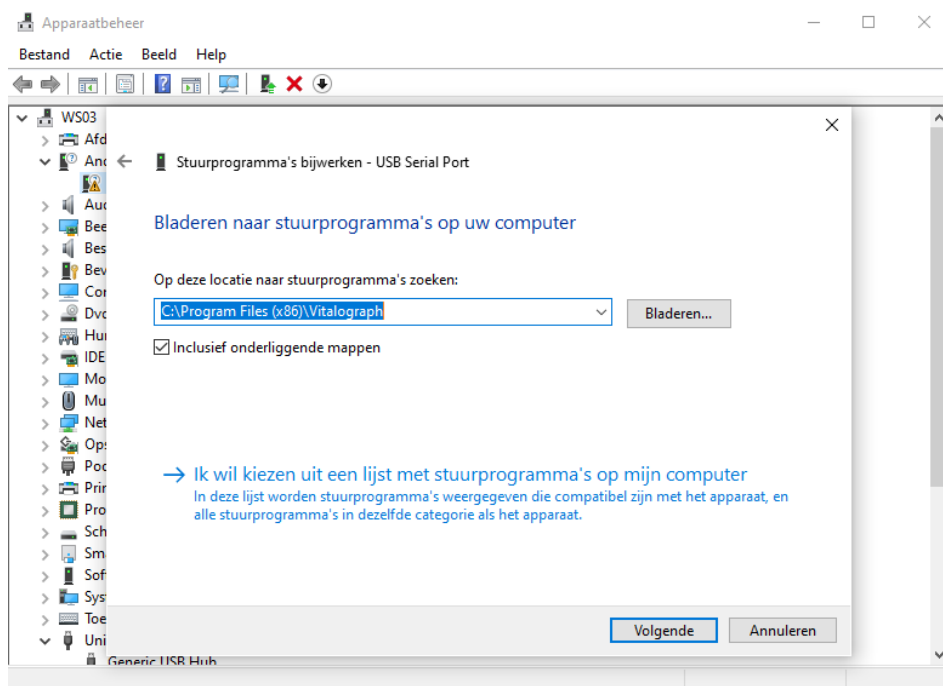



12_USB_Driver_wi-24-12, 18-2-2025

11

Klik op “Sluiten”

