


Patiënt gegevens achteraf aanpassen

1

Selecteer de patiënt waarvan u de gegevens wilt aanpassen.

2

Verander (bv de lengte) naar de juiste waarde en klik op “Opslaan en toepassen op eerdere beoordelingen”

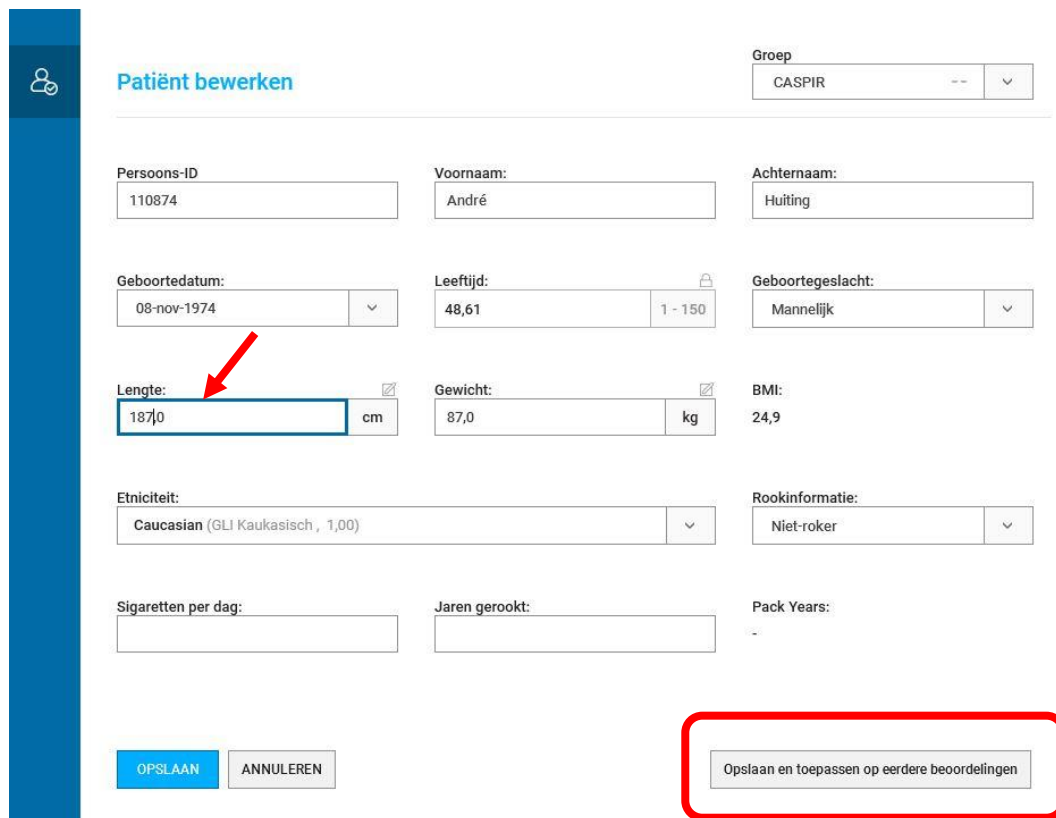

Patiënt bewerken

Groep: CASPIR -- ▾

Persoons-ID: 110874

Voornaam: André

Achternaam: Huiting

Geboortedatum: 08-nov-1974 ▾

Leeftijd: 48,61 1 - 150

Geboortegeslacht: Mannelijk ▾

Lengte: 187,0 cm

Gewicht: 87,0 kg

BMI: 24,9

Etniciteit: Caucasian (GLI Kaukasisch, 1,00) ▾

Rookinformatie: Niet-roker ▾

Sigaretten per dag:

Jaren gerookt:

Pack Years: -

OPSLAAN ANNULEREN

Opslaan en toepassen op eerdere beoordelingen

3 Selecteer de test die je wilt bijwerken en klik op "Bijwerken"

Patiënt bewerken Groep
CASPIR

Eerdere beoordelingen patiënt

Bezoek	Beoordeling	Type	Uitgevoerd op	Tijd	Status	
General	Post-FVC	FVC	20-6-2023	12:54:23		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	20-6-2023	12:40:14		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	19-6-2023	11:51:24		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	31-5-2023	18:38:26		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	31-5-2023	18:14:49		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	22-5-2023	16:43:09		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	15-5-2023	11:56:29		Bijwerken

[Voltooien](#)


4 Zet een vinkje bij de parameter die je wilt bijwerken, en klik op "OPSLAAN"

Demografische gegevens van de beoordeling bewerken

Demografische Gegevens	Vorige	Nieuw	Bijwerken	Beoordelingswaarde
Lengte:	178,0 cm	187,0 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	187,0 cm
Gewicht:	87,0 kg	87,0 kg	<input type="checkbox"/>	
Rookinformatie:	Niet-roker	Niet-roker	<input type="checkbox"/>	
Sigaretten per dag:	-	-	<input type="checkbox"/>	
Jaren gerookt:	-	-	<input type="checkbox"/>	

[OPSLAAN](#) [ANNULEREN](#)


5 Klik op "JA"

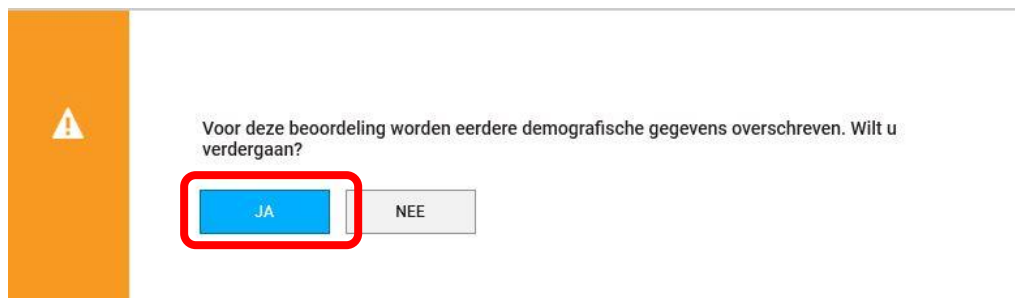

6 Klik op "OK"



7 Klik op "VOLTOOIEN"

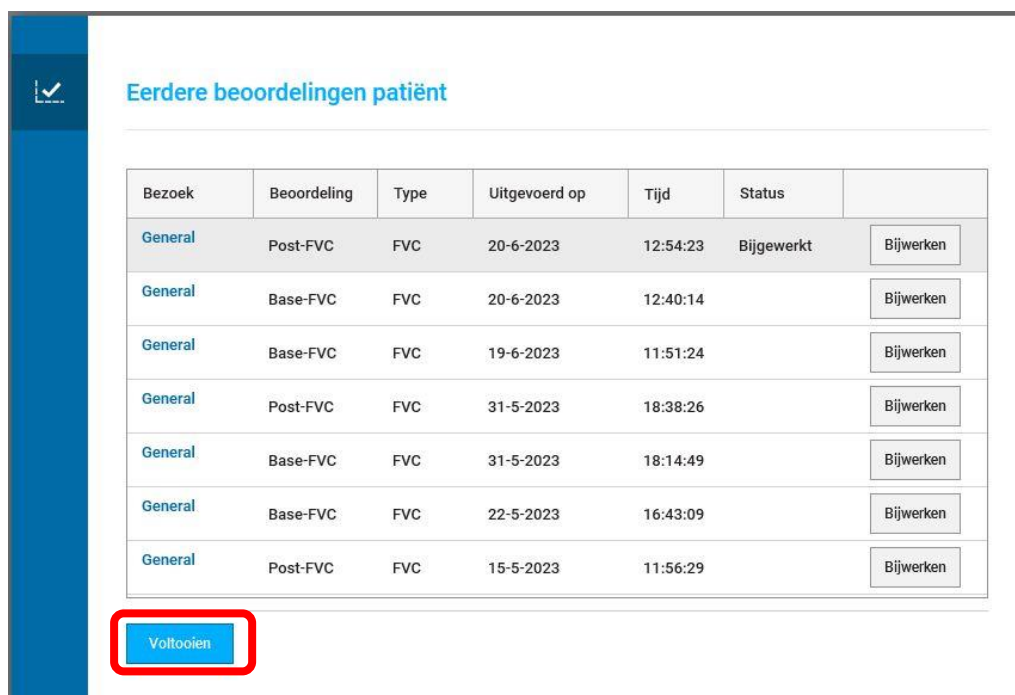

Eerdere beoordelingen patiënt








Bezoek	Beoordeling	Type	Uitgevoerd op	Tijd	Status	
General	Post-FVC	FVC	20-6-2023	12:54:23	Bijgewerkt	Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	20-6-2023	12:40:14		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	19-6-2023	11:51:24		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	31-5-2023	18:38:26		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	31-5-2023	18:14:49		Bijwerken
General	Base-FVC	FVC	22-5-2023	16:43:09		Bijwerken
General	Post-FVC	FVC	15-5-2023	11:56:29		Bijwerken

Voltoeien

8

Dubbelklik vervolgens op het onderzoek die je hebt aan gepast.

Bezoeken en beoordelingen Patiënt bewerken **TEST STARTEN**

Bezoek	Beoordelingen
20-6-2023 General	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>12:40:14 Base-FVC </div> <div>12:54:23 Post-FVC </div> <div>13:10:24 ECG </div> </div>
19-6-2023 General	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 11:51:24 Base-FVC  </div>
31-5-2023 General	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>18:14:49 Base-FVC </div> <div>18:38:26 Post-FVC </div> </div>
22-5-2023 General	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>16:43:09 Base-FVC </div> </div>

9

Print of sla het aangepaste rapport opnieuw op door op het printer icoontje te klikken

08:59:02 22-6-2023   







		PARAMETERS	KWALITEIT	ANALYSE
% Voorsp	Basis	Basis % Voorsp.	Wijzigen	% wijziging
81,87	5,66	99,65	-1010 mL	-17,84
88,51	3,81	85,81	120 mL	3,15
-	0,67	-	-	-
61,77	9,74	90,60	-3,10	-31,83
57,39	4,94	86,97	-1680 mL	-34,01