


Rapport instellen t.b.v. portfolio CASPIR

Alle curve's op rapport t.b.v. portfolio:

1. Ga naar **RAPPORTEN**, → **FVC PARAMETERINFO**, → En kies bij testopties voor "Alles tonen"

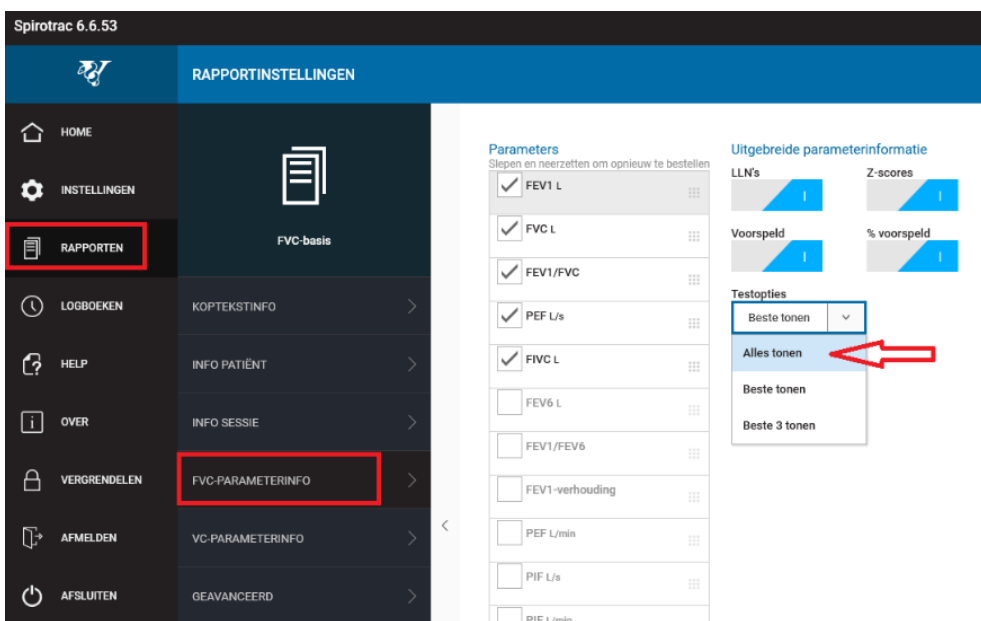


- En klik op **OPSLAAN**:



Naam en geboorte datum niet weergeven op het rapport:

- Ga naar **RAPPORTEN**, → **INFO PATIËNT**, → En zet de “Naam” en “Geboortedatum” uit.

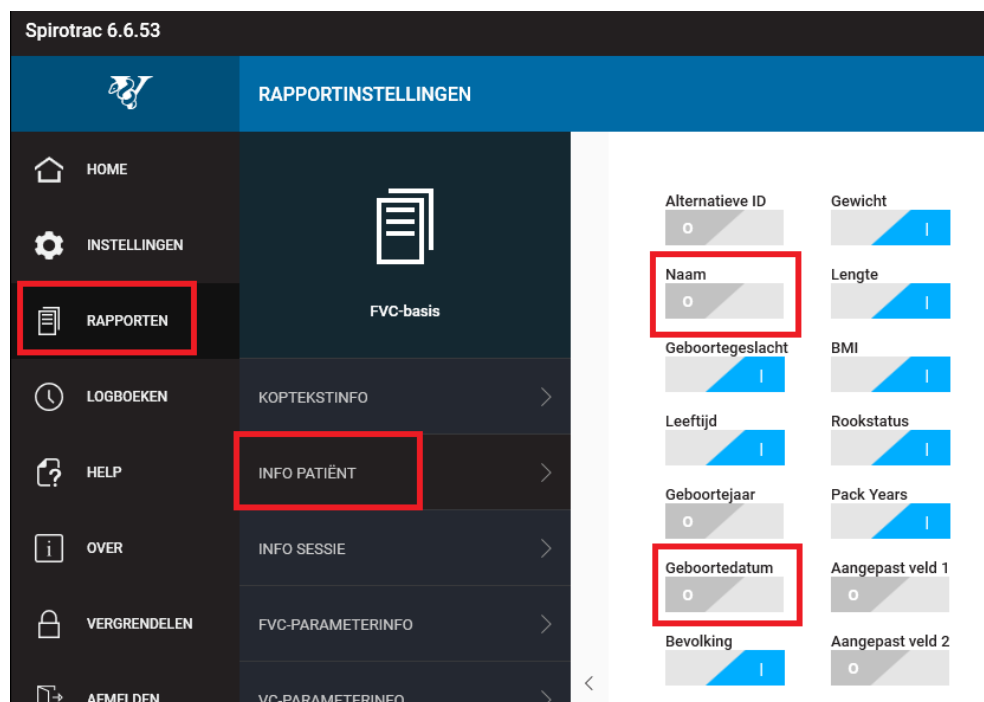

- En klik op **OPSLAAN**:



Sessiekwaliteit uitgebreid weergeven en Miniatuurgrafieken aanzetten:

- Ga naar **RAPPORTEN**, → **GEAVANCEERD**, → En zet bij “Kwaliteitsopties” deze op “Gedetailleerd tonen”
- En zet “Miniatuurgrafieken” aan


The screenshot shows a settings menu on the left side of a software interface. The menu items are: 'Sessiekwaliteit' (highlighted with a red box) with a sub-menu 'Kwaliteitsopties' set to 'Gedetailleerd tonen'; 'Opmerkingen' with sub-menus 'Opties voor opmerkingen over sessie' (set to 'Laatste tonen') and 'Opties voor opmerkingen over Patiënt' (set to 'Verbergen'); 'Opmerkingen' with sub-menus 'Opmerkingen sessie' (set to 'I') and 'Testopmerkingen' (set to 'O'); 'SpO2-informatie' with sub-menu 'Sectie' (set to 'O'); 'Miniatuurgrafieken' (highlighted with a red box) with sub-menu 'Sectie' (set to 'I'); and 'ArtiQ-rapport' with sub-menu 'Sectie' (set to 'O'). To the right of the settings is a vertical axis with a red line graph and several data points.

- En klik op **OPSLAAN**:

The screenshot shows a dark interface with a 'LICENTIE' button on the left. On the right, there are two buttons: 'OPSLAAN' (highlighted with a red arrow) and 'ANNULEREN'. Below the buttons is a 'Paint' label.

POST Rapport:

- Herhaal bovenstaande ook voor het POST-RAPPORT

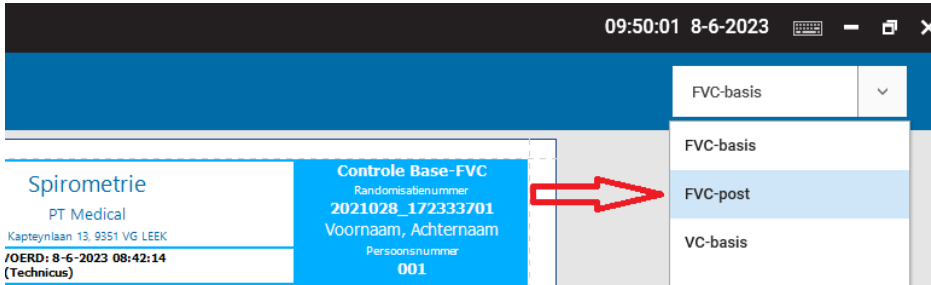

Rapporten aanmaken:

Maak nu van alle patiënten zowel een pre rapport als een post rapport zodat de beordelaar alle benodigde informatie heeft.

Het is ook mogelijk een rapport op te slaan als Excel bestand, hierdoor is het erg gemakkelijk om de bv de curves te gebruiken in een PowerPoint presentatie:

Rapport afdrukken



Zet hierna alle instellingen weer terug, en ook weer op opslaan klikken !