



Kenmerken

AirFeel[®] IMT is een medisch hulpmiddel voor het trainen van de inademingsspieren. Het is ontworpen om de longcapaciteit te vergroten, het middenrif te versterken en de kracht van de bekkenbodemspieren te verbeteren.

AirFeel[®] IMT is geïndiceerd voor klinische toepassingen (cystische fibrose, COPD, astma, hartfalen), beroepsmatige toepassingen (hypoxie, gewichtheffen), sporttoepassingen (fietsen, hardlopen, zwemmen) en andere activiteiten die een goede ademhalingscapaciteit vereisen.

Compliance



Made in Italy



Bereik 7 –67 cm H2O



Toegankelijke dop voor optimale reiniging






Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarde



Eenvoudige drukinstelling



Neusklem meegeleverd

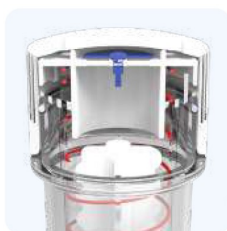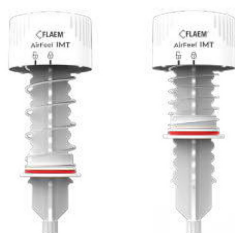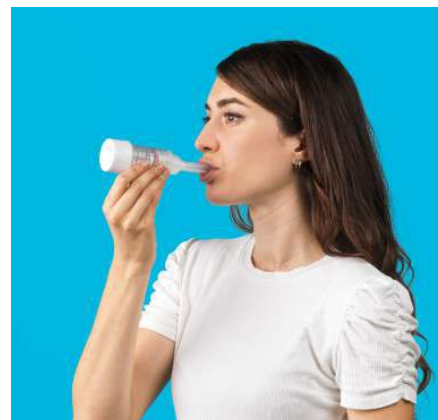


Rust positie

In de ruststand oefent de veer druk uit op de klep, waardoor luchtstroming wordt voorkomen en het systeem goed wordt afgesloten.

Materialen van medische kwaliteit

Het apparaat is gemaakt van materialen van medische kwaliteit: polypropyleen, siliconen en roestvrij staal, die geschikt zijn voor reiniging, chemische en thermische desinfectie en ook autoclaveerbaar zijn. Een praktische neusklem wordt meegeleverd om de uitrusting compleet te maken, waardoor ademhalingsoefeningen kunnen worden geoptimaliseerd.

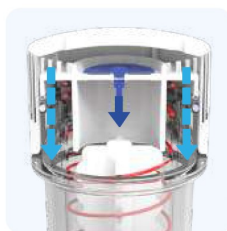


Instelbare klepactivering

Wanneer de patiënt ademt, zorgt de druk die op de klep wordt uitgeoefend (blauwe pijl) ervoor dat de kap naar beneden schuift en de lucht (lichtblauwe pijl) doorlaat.

De druk kan worden ingesteld door de centrale as te draaien en de veer samen te drukken/los te laten.

Airfeel IMT functies & accessoires

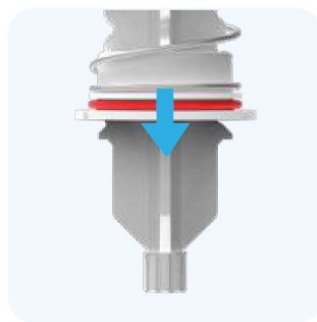

Draagbaar, eenvoudig te demonteren en te steriliseren.

Het bestaat uit slechts enkele onderdelen, waaronder een praktische neusklem om ademhalingsoefeningen te optimaliseren. AirFeel® IMT heeft een gepatenteerd ontwerp met een afneembare kap voor een grondigere reiniging. Het is gemaakt van duurzame en veilige materialen (polypropyleen, siliconen en roestvrij staal) die geschikt zijn voor chemische en thermische desinfectie en ook autoclaveerbaar zijn.



Pep-masker

AirFeel® IMT is compatibel met PEP-maskers met een 22M-aansluiting.



Tracheostoma

AirFeel® IMT is compatibel met accessoires voor tracheostoma met een 22M-aansluiting.

