


3. Post test selecteren vanuit Pre-test

Je kunt gelijk vanuit de Pre-test naar de Post-test door op het Post icoontje te klikken

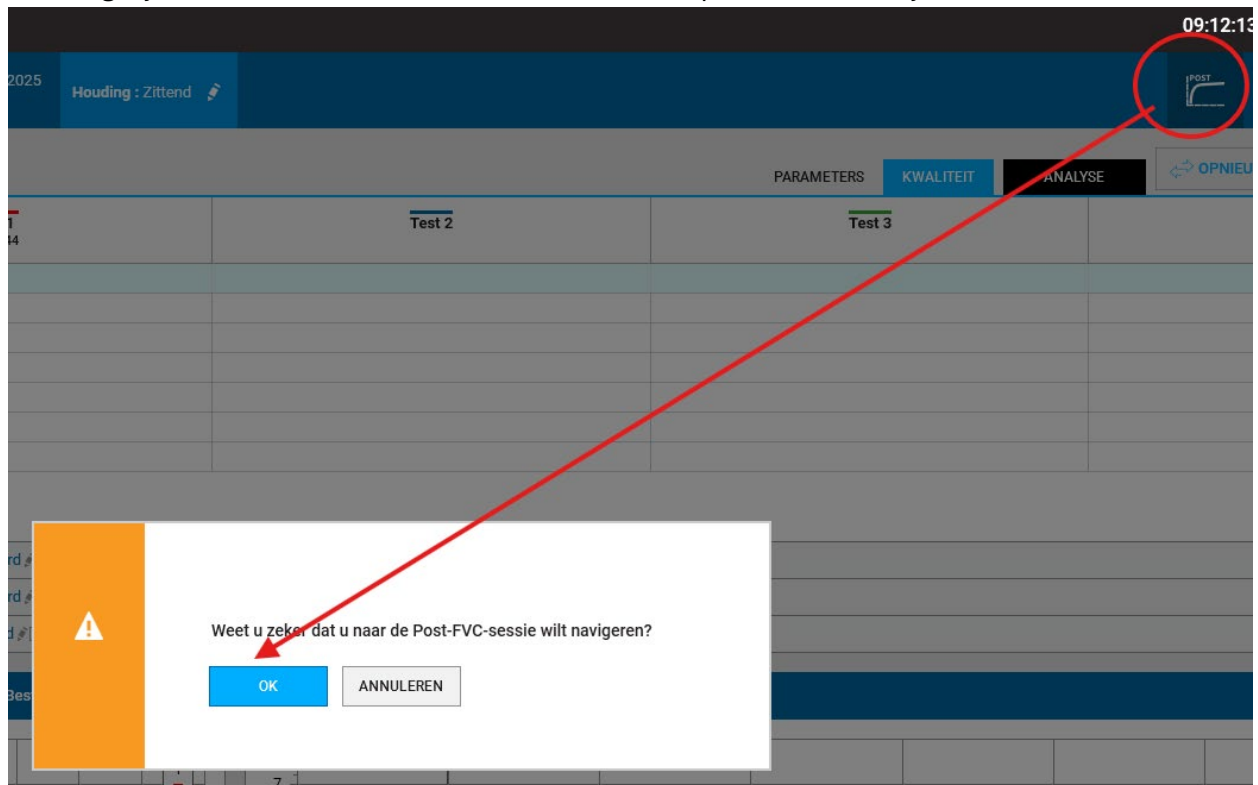

4. Tijd wanneer Medicatie gegeven

Je kunt invoeren op welk tijdstip de medicatie is gegeven voor de reversibiliteitstest.

Spirotrac geeft ook een melding als je te vroeg start met de Post-test en of je zeker weet dat je wilt doorgaan.

5. Trend mogelijk op rapport

Het is mogelijk om een trendgrafiek af te beelden op het Pre of Post Rapport.

Ga hiervoor naar RAPPORTEN → GEAVANCEERD en zet het schuifje bij Patiënttrend aan.

The screenshot shows the Vitalograph software interface. On the left is a dark sidebar menu with options: HOME, EVITA-GIDS, INSTELLINGEN, **RAPPORTEN** (highlighted with a red box), UPLOADEN/DOWNLOADEN, LOGBOEKEN, HELP, OVER, and AFSLUITEN/VERGRENDELLEN. To the right of the sidebar is a list of report categories: KOPTEKSTINFO, INFO PATIËNT, INFO SESSIE, FVC-PARAMETERINFO, VC-PARAMETERINFO, **GEAVANCEERD** (highlighted with a red box), and AFDRUKOPTIE. Below the sidebar, there are several toggle switches for different report sections: 'Geschatte longleeftijd', 'Sessiekwaliteit', 'Opmerkingen', 'SpO2-informatie', 'FeNO-informatie', 'Miniatuurgrafieken', and **Patiënttrend** (highlighted with a red box). The main area displays a patient trend graph for Spirometry, showing data from January 2019. The graph plots four metrics: Base-FVC (FVC L) in red, Post-FVC (FEV1 L) in blue, Basis-VC (PEF L/min) in green, and Post-VC (FEV6 L) in orange. Below the graph is a table summarizing the data.

Post-FVC(FEV1 L)				Basis-VC(PEF L/min)				Post-VC(FEV6 L)			
Gemiddeld	Max.	Min.	Gemiddeld	Max.	Min.	Gemiddeld	Max.	Min.	Gemiddeld	Max.	Min.
2,45	6,90	1,90	4,40	6	2	4	5,70	2,70	4,20	5,70	4,20

6. Beste FEV1 en FVC vetgedrukt


De Beste FVC en de beste FEV1 worden nu vetgedrukt in de software.

Goede sessie
Herhaalbaarheid: FVC: 0,02 L (0,40 %) FEV1: 0,02 L (0,57 %)

	Test 1 19:15:57	Test 2 19:16:38	Test 3 19:18:02
FVC L	4,93	4,81	4,95
FEV1 L	3,50	3,38	3,48
FEV1/FVC	0,71	0,70	0,70
PEF L/s	9,24	7,98	6,97
FIVC L	3,10	1,87	2,92

7. Melding Evita Variabiliteit

Evita geeft een melding indient de FVC en of de FEV1 met meer dan 500ml is verander t.o.v. een voorgaand bezoek. Dit ivm mogelijke variabiliteit.

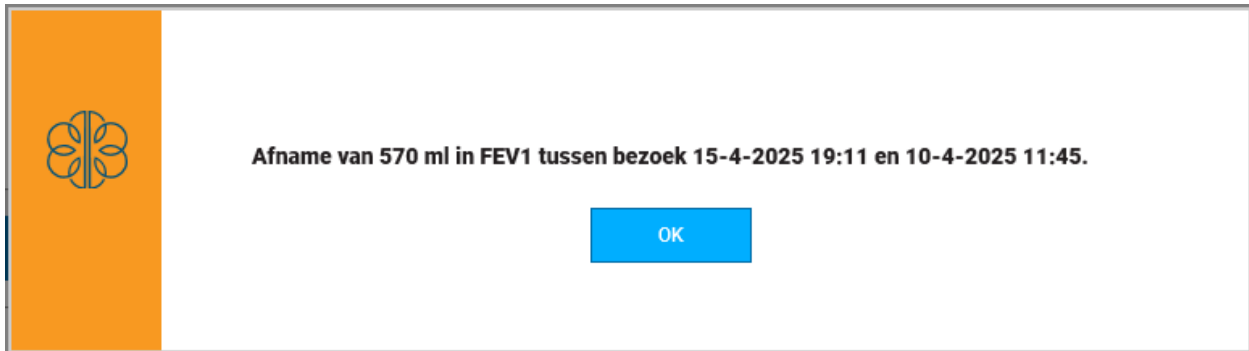

8. Fout in de ATS/ERS 2021 beoordeling opgelost

In de ATS/ERS 2021 Algoritme voor het beoordelen van de Spirometrie zat een fout. Deze is in Spirotrac 6.12 opgelost.